



MANUALE D'USO


SM3461 (BLC520)

Handrail



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento

Spiegazione dei simboli grafici sull'etichetta/imballaggio

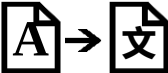	Attenzione, consultare il manuale delle istruzioni prima dell'uso		Leggere attentamente il manuale prima dell'installazione e dell'uso
	Fabbricante del dispositivo medico		Anno di fabbricazione del dispositivo medico
	Codice prodotto		Numero di serie
	Lotto di produzione		Tradotto da: MORETTI S.P.A Via Bruxelles, 3-Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Copyright Notice

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Website: www.chardermedical.com E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. All rights reserved.

This user manual is protected by international copyright law. All content is licensed, and usage is subject to written authorization from Charder Electronic Co., Ltd. (hereinafter Charder) Charder is not liable for any damage caused by a failure to adhere to requirements stated in this manual. Charder reserves the right to correct misprints in the manual without prior notice, and modify the exterior of the device for quality purposes without customer consent.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

INDICE

I. Note di sicurezza.....	4
II. Specifiche e accessori.....	8
III. Lista delle parti	9
IV. Dichiarazione di conformità	16

I. Note di sicurezza

Informazioni generali

Grazie per aver scelto un dispositivo medico della Charder Electronic. Questo dispositivo è stato progettato e realizzato per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Qualora si verificassero problemi non elencati nel manuale delle istruzioni, si prega di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo, si prega di leggere attentamente il presente e di conservarlo per un utilizzo futuro. Il presente manuale, contiene istruzioni importanti sull'installazione, l'uso corretto e la manutenzione del dispositivo da voi acquistato.

Destinazione d'uso

Questo dispositivo ha lo scopo di misurare la forza nella mano del paziente da parte di professionisti.

Prima dell'uso

- Assicurarsi che sia installata la molla corretta.
- Assicurarsi che il display mostri zero. Il dispositivo è progettato per rilevare quando è stata raggiunta una forza stabile, l'indicatore suonerà per indicare che la lettura può essere presa.

Norme di sicurezza

Prima di azionare il dispositivo, si prega leggere attentamente il manuale delle istruzioni. Contiene informazioni importanti per l'installazione, l'uso ed il mantenimento del dispositivo.

- Le batterie devono essere tenute lontano dai bambini. Se ingerite, cercate immediatamente assistenza medica.
- Durata prevista: 5 anni.
- Rispettare sempre le normative appropriate quando si utilizzano componenti elettrici con requisiti di sicurezza elevati.
- Rispettare le temperature consentite per l'uso.

Inquinamento

- Tutte le batterie contengono composti tossici: le batterie devono essere smaltite tramite organismi competenti designati. Le batterie non devono essere incenerite.

Pulizia

- La superficie del dispositivo deve essere pulita con salviette imbevute di alcool.

- Non usare una quantità esagerata di acqua durante la pulizia del dispositivo, in quanto potrebbe causare danni all'elettronica interna.

Manutenzione

- Il dispositivo non richiede una manutenzione giornaliera, tuttavia si richiede un controllo regolare dell'accuratezza; la frequenza deve essere determinata in base al livello di utilizzo e allo stato del dispositivo. Se i risultati non sono precisi, contattate il distributore locale.

Garanzia/Responsabilità

GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

RIPARAZIONI

1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia.

Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso

un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

Smaltimento

Condizioni di smaltimento Generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea

2002/96/CE:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.


II. SPECIFICATION & ACCESSORIES

Model	SM-3461 (R)	
	With display bracket	
Dimension	800mm x 1150mm	
Material	Stainless Steel	
Accessories	SM-3461 (R)	
AM-8173	1	
AM-8173A with wiring duct	1	
SS-8311	4	
socket button head screw	10	
screw nut	12	
SS-8300B	1	
SS-8303 bracket	1	
M4*8 screw for display bracket	4	
bearing for bracket	2	
locking nut for bracket	1	
socket key	2	

III. PARTS LIST OF SM-3461(R)

SM-3461 (R)

NO.	Elemento	Drawing	Qty.
1.	Corrimano	SS-8300B SS-8300A	1
2.	Piastra di fissaggio	SS-8311	4
3.	Vite a brugola	M6-21 	10
4.	Asta	AM-8173	1
5.	Dado per vite a brugola	ø8-M6*33 	12
6.	Vite per il display	M4*8 	4
7.	Dado per vite della stampante (Già installata)	M5-0.8-JB	2
8.	Vite di plastica (già installata)	M5-0.8*8	2
9.	Asta con condotto di cablaggio	AM-8173A	1
10.	Tappo in gomma	SW-8068	2
11.	Dado di serraggio	M8*1.25*8 	1
12.	Cuscinetto	SF-1F-08075 	2
13.	Staffa	SS-8303	1
14.	Dotto di cablaggio	TC-2WE 100cm	1
	Chiave a brugola		2


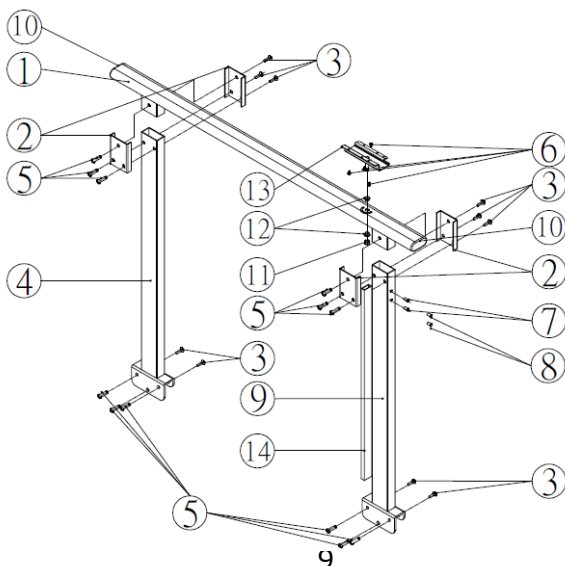


A. Istruzioni per l'assemblaggio

Step 1.


Fix no.2 (fixing plate) on the no.9 (pole with wiring duct) with no.3 (socket screw) and no.5 (screw nut).

Fix no.9 (pole with wiring duct) on platform by using no.3 and no.5.

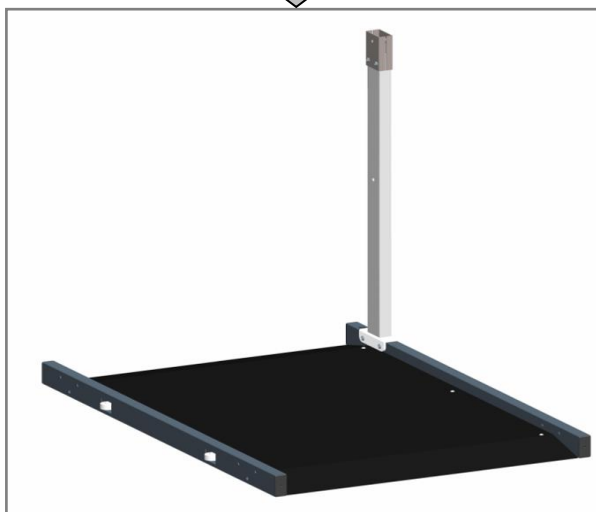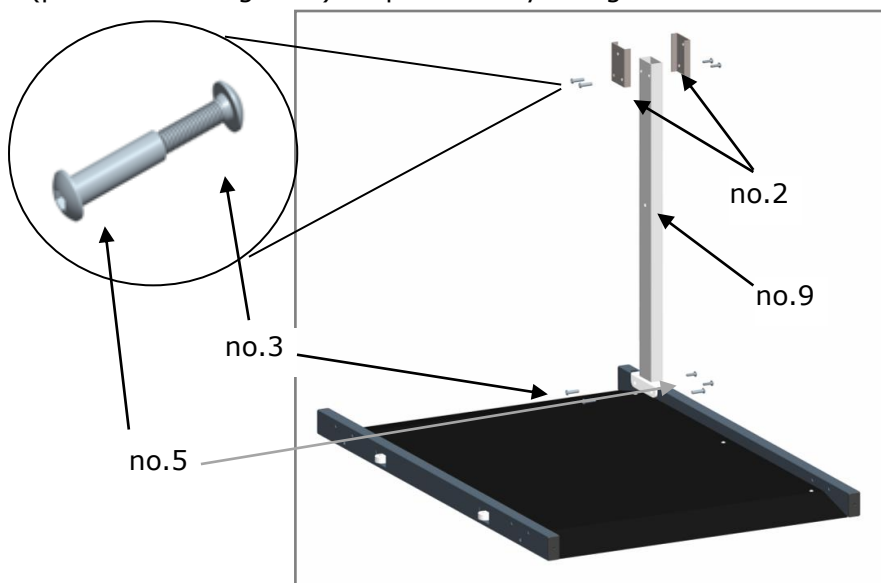



Step 2.

Fissare I supporti alla piattaforma come in step1.

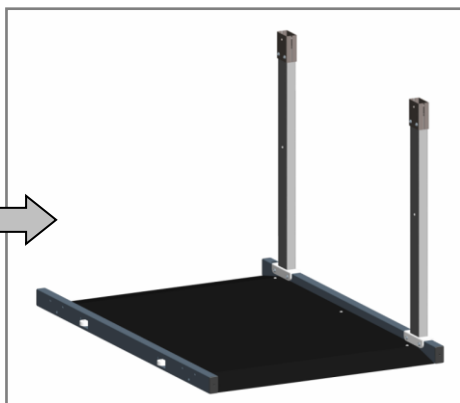


Step 3.

Della maniglia ai supporti.

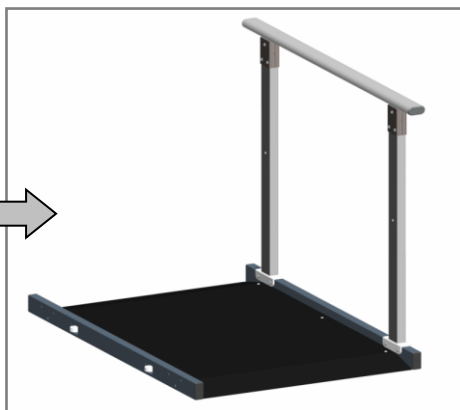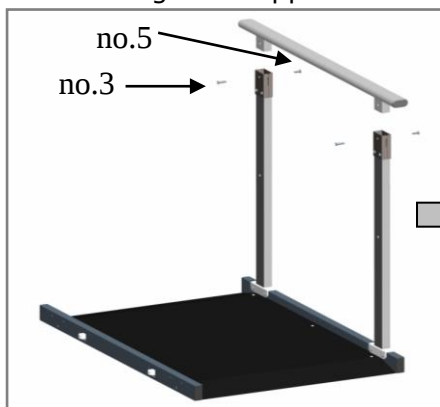

B. Assemblaggio display

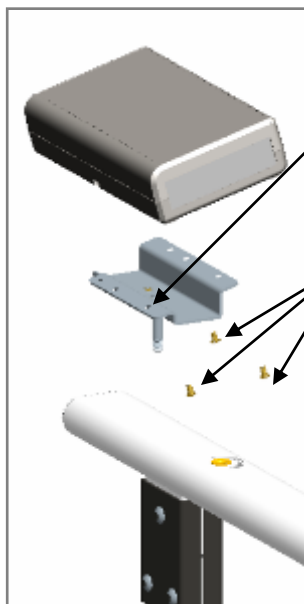


Step 1.
Posizionare la vite M4*8 nel
centro del supporto

Step 2.
Fissare il display sul support con
le altre tre viti M4*8



Vite M4*8

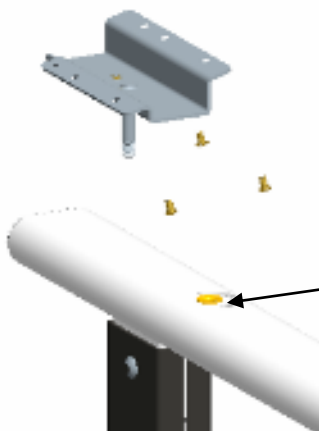

Step 3.
Posizionare I cuscinetti sulla maniglia.



Cuscinetto



Step 4.
Serrare il dado con le viti M4*8
Il display ora può essere ruotato
liberamente.

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

IV. Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità con gli standard europei armonizzati, seguendo le disposizioni delle seguenti direttive:

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE

Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE



Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan (R.O.C.)



Importato e distribuito da:

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

CD-IN-00437 REV001 08/2021