



MA\_CP100B-XX\_CP100R-XX\_CP103R-XX\_CP104-XX\_CP105-XX\_CP500B-XX\_CP500R-XX\_CP505-XX\_02\_A\_SK\_06-2022

## **INVALIDNÉ VOZÍKY ARDEA ONE**

---

### **NÁVOD**

SLOVENSKY

## OBSAH

<b>1. KÓDY</b> .....	<b>STR. 3</b>
<b>2. ÚVOD</b> .....	<b>STR. 3</b>
<b>3. URČENÉ POUŽITIE</b> .....	<b>STR. 3</b>
<b>4. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE</b> .....	<b>STR. 3</b>
<b>5. VŠEOBECNÉ VAROVANIA</b> .....	<b>STR. 4</b>
<b>6. POUŽITÉ SYMBOLY</b> .....	<b>STR. 4</b>
<b>7. VŠEOBECNÝ POPIS</b> .....	<b>STR. 5</b>
7.1 Pohľad na jednotlivé časti a ich zoznam .....	str. 5
<b>8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ</b> .....	<b>STR. 5</b>
8.1 Otvorenie .....	str. 5
8.2 Zloženie.....	str. 6
8.3 Inštalácia/demontáž laktových opierok .....	str. 6
8.4 Inštalácia/demontáž bočných alebo zdvíhateľných plošín .....	str. 6
8.5 Nastavenie bočných opierok na nohy .....	str. 7
8.6 Nastavenie zdvíhateľných opierok na nohy (VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO) .....	str. 7
8.7 Inštalácia/demontáž malých zadných kolies (len pre GO!).....	str. 7
8.8 Nastavenie brzd s malými zadnými kolesami (len pre GO!).....	str. 8
8.9 Inštalácia/demontáž veľkých zadných kolies (len pre START/START2 a START3) .....	str. 8
8.10 Nastavenie brzd s veľkými zadnými kolesami (len pre START/START2 a START3) .....	str. 8
<b>9. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM</b> .....	<b>STR. 9</b>
<b>10. VAROVANIA PRE POUŽITIE</b> .....	<b>STR. 9</b>
<b>11. SPÔSOB POUŽITIA</b> .....	<b>STR. 9</b>
11.1 Nasadenie na invalidný vozík.....	str. 9
11.2 Zosadenie z invalidného vozíka .....	str. 9
11.3 Schodíky a nerovnosti (rady pre ich najlepšie zvládnutie) .....	str. 9
11.4 Použitie laktových opierok .....	str. 10
11.5 Použitie kolies pre samostatný mechanický pohyb .....	str. 10
11.6 Použitie malých kolies .....	str. 10
11.7 Použitie malých kolies pre úzke prechody (súčasť sérieovej výbavy na modeloch s rýchlym odopínaním) .....	str. 10
11.8 Preprava na prepravných prostriedkoch.....	str. 10
<b>12. ÚDRŽBA</b> .....	<b>STR. 11</b>
<b>13. ČISTENIE A DEZINFEKCIA</b> .....	<b>STR. 11</b>
13.1 Čistenie potáhov a výplní.....	str. 11
13.2 Čistenie rámu a kovových častí .....	str. 11
13.3 Čistenie kolies a brzd .....	str. 11
13.4 Dezinfekcia .....	str. 11
<b>14. PODMIENKY LIKVIDÁCIE</b> .....	<b>STR. 11</b>
<b>15. NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO</b> .....	<b>STR. 11</b>
<b>16. TECHNICKÉ PARAMETRE</b> .....	<b>STR. 12</b>
16.1 Rozmery .....	str. 12
16.2 Technické parametre .....	str. 13
<b>17. ZÁRUKA</b> .....	<b>STR. 13</b>
17.1 Opravy.....	str. 13
17.2 Náhradné diely .....	str. 14
17.3 Klauzuly zbavenia zodpovednosti .....	str. 14

CE Zdravotnícka pomôcka triedy I  
NARIADENIE (EÚ) 2017/745 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  
z 5. apríla 2017 ohľadom zdravotníckych pomôcok

## 1. KÓDY

<b>CP100B-xx</b>	Séria <b>START</b> kolesá 60 cm - <b>Skladací, mechanický</b>
<b>CP100R-xx</b>	Séria <b>START</b> kolesá 60 cm - <b>Skladací, mechanický</b>
<b>CP103R-xx</b>	Séria <b>START2</b> kolesá 60 cm - <b>Skladací, mechanický</b>
<b>CP104-xx</b>	Séria <b>START3</b> kolesá 60 cm - <b>Skladací, mechanický, s dvojitým krížom a dvojitým otvorom</b>
<b>CP105-xx</b>	Séria <b>START3 GO!</b> kola 30 cm - <b>Skladací, mechanický, s dvojitým krížom a dvojitým otvorom</b>
<b>CP500B-xx</b>	Séria <b>GO!</b> kolesá 30 cm - <b>Skladací, transportný</b>
<b>CP500R-xx</b>	Séria <b>GO!</b> kolesá 30 cm - <b>Skladací, transportný</b>
<b>CP505-xx</b>	Séria <b>GO!2</b> kolesá 30 cm - <b>Skladací, transportný, s dvojitým krížom</b>

(R = červená; B = modrá; xx = Označuje rozmery dostupného sedu, napr. 40-43-45-48-50 cm, 38 a 46 cm len pre modrú farbu)

## 2. ÚVOD

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre invalidný vozík **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A., vyrobený na presun osôb s pohybovými ťažkosťami, doma aj mimo bytu, pri cestovaní alebo pri jednoduchých každodenných činnostiach. Tento návod na použitie obsahuje malé odporúčania na správne použitie vami vybratej pomôcky a cenné rady pre vašu bezpečnosť. Odporúča sa, aby ste si pozorne prečítali celý tento návod ešte pred použitím invalidného vozíka. V prípade pochybností sa, prosím, obráťte na predajcu, ktorý vám bude vedieť správne pomôcť a poradiť.

Poznámka: Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu žiadnej časti invalidného vozíka. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho a obráťte sa na predajcu ohľadne ďalších pokynov.

## 3. URČENÉ POUŽITIE

Tento invalidný vozík je určený na prepravu osôb s pohybovými ťažkosťami a môže sa používať svojpomocne (ak je vybavený veľkými zadnými kolesami) alebo s pomocou operátora. Vo všetkých prípadoch je potrebný zásah operátora z dôvodu rôznych nastavení.



### UPOZORNENIE!

- Je zakázané použitie nasledovnej pomôcky pre iné účely ako je určené v tomto návode.
- Firma Moretti S.p.A. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z nevhodného použitia pomôcky alebo z iného použitia ako je uvedené v tomto návode.
- Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na pomôcke a v nasledujúcom návode bez predošlého upozornenia, kvôli zlepšeniu jeho vlastností.

## 4. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Firma MORETTI SpA vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky vyrobené a uvedené na trh samotnou firmou MORETTI S.p.A., patriace do skupiny výrobkov INVALIDNÉ VOZÍKY ARDEA ONE sú v zhode s aplikovateľnými ustanoveniami nariadenia 2017/745 o ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH z 5. apríla 2017.

Pre tento účel firma MORETTI SpA ručí a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť nasledovne:

1. Predmetné prostriedky vyhovujú základným bezpečnostným a výkonnostným požiadavkám v súlade s prílohou I nariadenia 2017/745, ako sa uvádza v prílohe IV tohto nariadenia.
2. Predmetné prostriedky NIE SÚ MERACÍMI PRÍSTROJMI.

3. Predmetné prostriedky NIE SÚ URČENÉ PRE KLINICKÝ VÝSKUM.
4. S predmetnými prostriedkami sa bude obchodovať v NESTERILNOM balení.
5. Predmetné prostriedky sa považujú za pomôcky patriace do triedy I v zhode s ustanoveniami prílohy VIII vyššie uvedeného nariadenia.
6. Firma MORETTI SpA uchováva a poskytuje k nahliadnutiu kompetentným orgánom po dobu najmenej 10 rokov od dátumu výroby poslednej šarže technickú dokumentáciu, potvrdzujúcu zhodu s nariadením 2017/745.

**Poznámka:** Kompletné kódy výrobku, kód registrácie výrobcu (SRN), základný kód UDI-DI a prípadné odkazy na použité normy sú uvedené v EÚ vyhlásení o zhode, ktoré firma MORETTI SPA vydáva a sprístupňuje prostredníctvom svojich kanálov.

## 5. VŠEOBECNÉ VAROVANIA

- Pre správne použitie pomôcky si pozorne preštudujte nasledovný návod.
- Pre správne použitie pomôcky sa vždy poraďte s vaším lekárom alebo terapeutom.
- Zabalený výrobok uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek zdroja tepla, pretože obal je z kartónu.
- Životnosť pomôcky je určená opotrebovaním častí, ktoré nie je možné opraviť a/alebo vymeniť.
- Venujte veľkú pozornosť prítomnosti pohybujúcich sa častí, do ktorých by mohli končatiny uviaznuť a spôsobiť tak zranenie.
- Vždy venujte pozornosť prítomnosti detí.
- Pre správne zdvíhanie invalidného vozíka je potrebné ho zložiť podľa pokynov v tomto návode a následne ho uchopiť za rukoväť.
- Nedvíhajte invalidný vozík za odpojiteľné časti, pretože by sa počas dvíhania mohli oddeliť.
- Používateľ a/alebo pacient musí oznámiť každú vážnu nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, výrobcovi a kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom pacient žije.

## 6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód výrobku



Jednoznačná identifikácia pomôcky



Výrobná číslo



Označenie CE



Výrobca



Výrobná šarža



Ohľadom pokynov si prečítajte návod



Zdravotnícka pomôcka



Podmienky likvidácie




Max. nosnosť



## 7. VŠEOBECNÝ POPIS

### 7.1 Pohľad na jednotlivé časti a ich zoznam

Na základe modelu vami zvoleného invalidného vozíka ho tvoria nasledovné prvky:

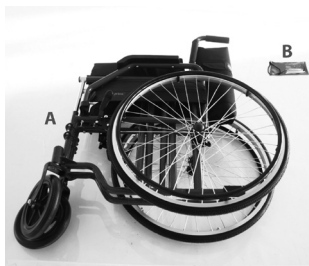

A - Základný rám invalidného vozíka    C - Bočné opierky na nohy  
B - Sada kľúčov pre montáž

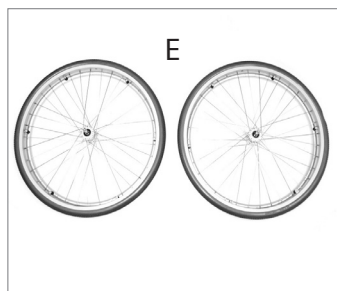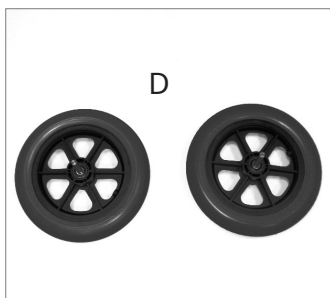


D - Malé zadné kolesá  
(priemer 30 cm) transportný model

E - Veľké zadné kolesá  
(priemer 60 cm) model pre  
samostatný mechanický pohyb

## 8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

### 8.1 Otvorenie

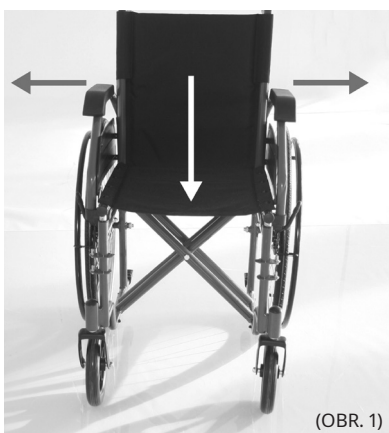


(OBR. 1)

Poznámka: vychádzajte z bezpečnostných varovaní uvedených v tomto návode.

- Uchopte rúčky rukovätí a potiahnite smerom von, pričom zatlačte sed smerom nadol; uistite sa, že je invalidný vozík úplne otvorený (OBR. 1)

### 8.2 Zloženie

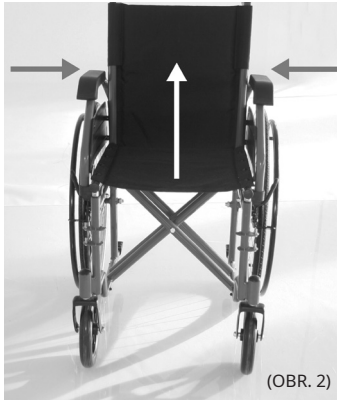

(OBR. 2)

- Rázne zdvihnite sed a zložte invalidný vozík opätovným priblížením dvoch rukovätí (OBR. 2)

### 8.3 Inštalácia/demontáž laktových opierok

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(OBR. 3)



(OBR. 4)

Obrázok pre ilustračné účely

- Zasuňte laktové opierky do zadného úchyty, potom ich preklopte dopredu a uchyťte ich tiež v prednom držiaku (OBR. 3)
- Pri demontáži stlačte prednú odopínaciu páčku, a potom preklopte laktové opierky dozadu a potiahnite zadnú odopínaciu páčku, kvôli ich vybratiu (OBR. 4)

### 8.4 Inštalácia/demontáž bočných alebo zdvíhateľných plošín



(OBR. 5)

- Pre inštaláciu bočných a zdvíhateľných opierok na nohy vyrovnajte otvory držiakov s príslušnými čapmi na ráme invalidného vozíka, a potom otočte opierku na nohy smerom dovnútra tak, aby sa správne uchytila poistná páčka na ráme invalidného vozíka (OBR. 5)
- Pre demontáž odpojte páčku opierky na nohy z rámu invalidného vozíka, pootočte ju smerom von a vyťahnite ju nahor

### 8.5 Nastavenie bočných opierok na nohy



- Pre nastavenie výšky opierok na nohy odistite ľavú poistnú páčku, ktorá sa nachádza v dolnej časti, potom stlačte odpružené tlačidlo, posuňte rúrku opierky na nohy až po opätovné zacvaknutie tlačidla v požadovanom otvore. Potom znovu zaistíte poistnú páčku. (OBR. 6)

### 8.6 Nastavenie zdvíhateľných opierok na nohy (VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO)



- Pre nastavenie výšky opierok na nohy odistíte ľavú poistnú páčku, ktorá sa nachádza v dolnej časti, potom stlačte odpružené tlačidlo, posuňte rúrku opierky na nohy až po opätovné zacvaknutie tlačidla v požadovanom otvore. Potom znovu zaistíte poistnú páčku. OBR. 7 (ozn. P)
- Pre nastavenie sklonu opierok na nohy použijete páčku zobrazenú na OBR. 7 (ozn. L), a po nastavení uvoľníte páčku kvôli definitívnemu zaisteniu opierok na nohy.

### 8.7 Inštalácia/demontáž malých zadných kolies (len pre GO!)

Zadné kolesá s priemerom 30 cm musia byť umiestnené do posledného otvoru v dolnej časti rámu



#### Kolesá s pevným čapom (len pre GO!)

- Vložte malé koleso a zaistite ho maticou z výbavy
- Pre demontáž odskrutkujte upevňovaciu maticu a vyberte koleso jeho potiahnutím smerom von

Obrázok je len ilustračný

### 8.8 Nastavenie brzd s malými zadnými kolesami (len pre GO!)



(OBR. 9) Obrázok je len ilustračný

- V prípade zadných kolies s priemerom 30 cm musí byť brzda umiestnená na časti rámu, ako je znázornené na (OBR. 9)

Poznámka: nastavte vzdialenosť saní od kolesa tak, aby brzda pri aktivácii vyvinula dostatočný tlak na bezpečné zablokovanie kolesa.

### 8.9 Inštalácia/demontáž veľkých zadných kolies (len pre START/START2 a START3)

Zadné kolesá s priemerom 60 cm musia byť umiestnené v stredovom otvore na ráme, a v hornom otvore medzi 2 prítomnými v prípade START3 (CP104-xx)



(OBR. 10)

#### V prípade kolies s rýchlym odpínaním (len pre START2 a START3)

- Odložte plastové krytky z otvoru a vložte kolesá zatlačením smerom k rámu, až po zacvaknutie automatického poistného zariadenia (OBR. 10)
- Pre demontáž stačí stlačiť tlačidlo uprostred disku kolesa, aby ste uvoľnili zaistenia a vytiahnuť koleso smerom von (OBR. 10)

#### V prípade kolies s pevným čapom (len pre START)

- Vložte veľké koleso a zaistite ho maticou z výbavy
- Pre demontáž odskrutkujte upevňovaciu maticu a vyberte koleso jeho potiahnutím smerom von

### 8.10 Nastavenie brzd s veľkými zadnými kolesami (len pre START/START2 a START3)



(OBR. 11)

- So zadnými kolesami s priemerom 60 cm, musí byť brzda umiestnená na vrúbkovanej časti rámu, ako je znázornené na (OBR. 11), je potrebné zaistiť sane brzdy prostredníctvom dvoch inbusových skrutiek na držiaku

Poznámky: Nastavte vzdialenosť saní od kolesa tak, aby brzda pri aktivácii vyvinula dostatočný tlak na bezpečné zablokovanie kolesa.



## 9. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy overte stav opotrebovania daných mechanických častí, aby ste zabezpečili úplne bezpečné použitie ohľadne osôb a majetku
- Overte správne zostavenie pomôcky s osobitnou pozornosťou na správne vloženie zadných kolies
- Overte, či je sed správne otvorený v koncovej polohe zablokovania (v opačnom prípade znovu silno zatlačte sed nadol, smerom k rámu)
- Overte správnu činnosť brzdy zadných kolies

## 10. VAROVANIA PRE POUŽITIE

- Invalidný vozík nesmie byť používaný ako sedadlo v motorových vozidlách
- Vždy sa uistite, že ovládanie brzdy je správne nastavené a funkčné
- Počas použitia invalidného vozíka sa odporúča dávať pozor na zachytenie prstov do niektorých častí, ako sú kolesá alebo brzdy
- Pamätajte, že teplota povrchov invalidného vozíka sa pri vystavení zdrojom tepla, ako slnečné žiarenie, môže zvýšiť

## 11. SPÔSOB POUŽITIA

**Poznámka:** Vychádzajte z všeobecných varovaní uvedených v tomto návode



### UPOZORNENIE!

- Nasadenie a zosadenie z invalidného vozíka predstavuje potenciálne nebezpečný úkon: vykonávajte ho len v prípade, ak ste fyzicky schopní ho vykonať a postupujte pritom opatrne
- Neopierajte sa o odnímateľné časti invalidného vozíka, ale uprednostnite rám sedadla

**NEZAŤAŽUJTE VLASTNOU VÁHOU OPIERKY NÔH POČAS NASADANIA ALEBO ZOSADANIA NA/Z INVALIDNÝ/ÉHO VOZÍK/A. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA!!!**

### 11.1 Nasadnutie na invalidný vozík

1. Čo najviac priblížte invalidný vozík, aby bol umiestnený vedľa vás
2. Zaisťte brzdy zadných kolies; pre maximálne uľahčenie nasadnutia na invalidný vozík sa odporúča odložiť laktóvu opierku z boku, odkiaľ nasadáte
3. Opríte sa o konštrukciu rámu a držte váhu tela predovšetkým na pažiach; potom pomaly klesnite smerom k sedu

### 11.2 Zosadnutie z invalidného vozíka

1. Priblížte sa čo najviac ku miestu vysadania
2. Zaisťte brzdy zadných kolies; pre maximálne uľahčenie vysadania z invalidného vozíka sa odporúča odložiť laktóvu opierku z boku, odkiaľ vysadáte
3. Položte paže na rám sedadla, na ktorý sa potrebujete presunúť, nadvihnite sa a pomaly sa posúvajte smerom k sedu

### 11.3 Schodíky a nerovnosti (rady pre ich najlepšie zvládnutie)



### UPOZORNENIE!

Tieto techniky sú platné len v prípade, ak ste skúsení používatelia invalidných vozíkov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa odporúča privolať na pomoc asistenta!

**VYSTÚPENIA NA PREKÁŽKU**

Prejdete k okraju chodníka alebo schodíka, ktorý chcete zdolať.

Navážte invalidný vozík na zadných kolesách tak, aby sa predné kolesá nadvihli len toľko, koľko je potrebné na opretie sa o prekážku, ktorú chcete prekonať. Nakloňte trup dopredu a energicky zatlačte dopredu držadlá na zadných kolesách. Tlačte, dokiaľ zadné kolesá nevystúpia na prekážku.

**ZOSTÚPENIE Z PREKÁŽKY**

Pri zostupovaní z nerovnosti vykonajte opačný postup. Umiestnite sa so zadnou časťou invalidného vozíka pred nerovnosť, ktorú je potrebné prekonať, energicky uchopte držadlá zadných kolies a potom pomaly zostúpte na schodík alebo prekážku; následne navážte invalidný vozík na zadných kolesách tak, aby sa predné kolesá mierne nadvihli a opatrne dokončíte zostup.

**UPOZORNENIE!**

Odporúča sa nepoužívať túto techniku pri nerovnosti väčšej ako 10 cm!!!

**11.4 Použitie laktových opierok**

Laktové opierky môžu byť len sklopné, len vyberateľné alebo sklopné a vyberateľné:

**Sklopte laktovú opierku** - táto funkcia je veľmi pohodlná pre nasadenie alebo zosadenie z invalidného vozíka. Na sklopenie laktovej opierky stačí stlačiť prednú odopínaciu páčku a otočiť ju smerom k zadnej časti.

**11.5 Použitie kolies pre samostatný mechanický pohyb**

Veľké zadné kolesá (60 cm) slúžia na vedenie invalidného vozíka svojpomocne. Pre tento účel uchopte držadlo na kolese a zatlačte ho v požadovanom smere.

**11.6 Použitie malých kolies**

Malé zadné kolesá (30 cm) sú určené na vedenie invalidného vozíka s pomocou operátora pomocou držiadiel zadných rúkoviek invalidného vozíka.

**11.7 Použitie malých kolies pre úzke prechody (súčasť sériovej výbavy na modeloch s rýchlym odopínaním)**

Tento typ kolies slúži na krátky presun invalidného vozíka kvôli prejazdu vo veľmi úzkom priechode (napríklad dvere výtahu). Ak chcete použiť tieto malé kolieska, je potrebné nadvihnúť invalidný vozík kvôli vybratiu zadných kolies, a potom zatlačiť invalidný vozík jeho uložením na malé kolieska, a potom znovu vložiť zadné kolesá.

**11.8 Preprava na prepravných prostriedkoch**

Invalidný vozík bol navrhnutý tak, aby mohol byť ľahko prepravovaný. Po demontáži opierok na nohy a laktových opierok môže byť znovu zatvorený a pohodlne umiestnený, napríklad do batožinového priestoru automobilu. Ak to nie je možné kvôli nedostatočnému priestoru, umiestnite invalidný vozík pred zadné sedadlo, aby bol stabilný a nemohol sa prevrátiť alebo pošmyknúť. Ak je to možné, zaistite invalidný vozík bezpečnostným pásom k automobilu.

## 12. ÚDRŽBA

Pomôcky rady **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. sú pri uvedení na trh dôkladne kontrolované a označené CE. Pre bezpečnosť pacienta a lekára sa odporúča nechať skontrolovať výrobcom alebo autorizovanou dielňou vhodnosť výrobku na použitie najmenej každé 2 roky. V prípade opravy musia byť použité výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pred použitím pomôcky vykonajte všetky overenia a kontroly odporúčané v odseku „**PRED KAŽDÝM POUŽITÍM**“ tohto návodu. Invalidné vozíky **ARDEA ONE** vyžadujú pár jednoduchých nižšie uvedených úkonov pravidelnej údržby:

brzdná kapacita	mesačne
čistenie sedu	podľa potreby

## 13. ČISTENIE A DEZINFEKCIA

### 13.1 Čistenie potáhov a výplní

Potahy a výplne sú vyrobené z nylonu. A môžu byť čistené vodou a neutrálnym mydlom.

### 13.2 Čistenie rámu a kovových častí

Aj pre rám a kovové časti je možné používať vodu a neutrálne mydlo, a potom ich osušiť mäkkou handrou, aby nedošlo k poškriabaniu laku rámu.

### 13.3 Čistenie kolies a brzd

Rovnakým spôsobom je možné čistiť aj kolesá, teda vodou a neutrálnym mydlom. Venujte zvýšenú pozornosť vysušeniu: môže byť nebezpečné používať invalidný vozík s mokrymi prednými kolesami.

### 13.4 Dezinfekcia

V prípade potreby dezinfikujte výrobok s použitím bežného dezinfekčného čistiaceho prostriedku.

Poznámka Jednoznačne zabráňte použitiu kyslých prípravkov, alkalických prípravkov alebo rozpúšťadiel ako napríklad acetón alebo riedidlo.

## 14. PODMIENKY LIKVIDÁCIE

V prípade likvidácie pomôcky nikdy nepoužívajte bežné systémy na likvidáciu pevného komunálneho odpadu. Odporúča sa pomôcku zlikvidovať v komunálnych zberných dvoroch, kvôli recyklácii použitých materiálov.










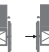





## 15. NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Ohľadom náhradných dielov a príslušenstva vychádzajte výhradne z hlavného katalógu firmy Moretti.

## 16. TECHNICKÉ PARAMETRE

## 16.1 Rozmery

## ROZMERY A HMOTNOSTI

Rozmery v cm															
CP100B-38								38		56					
CP100B-40								40		58					
CP100B-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43	60,5	26	17,5	60	20	- 120
CP100B-45								45		63					
CP100B-46								46		64					
CP100B-48								48		65					
CP100R-40								40		58					
CP100R-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43	61	26,5	17,5	60	20	- 120
CP100R-45								45		63					
CP100R-48								48		65					
CP103R-40								40		58					
CP103R-43								43		60,5					
CP103R-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	- 130
CP103R-48								48		66					
CP103R-50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43								43		60,5					
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	- 130
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43								43		60,5					
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	- 130
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					
CP500B-40								40		58					
CP500B-43								43		61					
CP500B-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	- 120
CP500B-46								46		64					
CP500B-48								48		65					
CP500R-40								40		58					
CP500R-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43	43	61	26,5	15	30	20	- 120
CP500R-45								45		63					
CP505-40								40		58					
CP505-43								43		61					
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	- 130
CP505-48								48		65					
CP505-50								50		67					

\*Rozmery sa môžu meniť o ±0,5 cm

## 16.2 Technické parametre

- Oceľový rám
- Max. nosnosť pre CP100-xx, CP500-xx: 120 kg
- Max. nosnosť pre CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Predné kolesá z PVC s priemerom 20 cm pre CP100-xx
- Predné kolesá z PU s priemerom 20 cm pre CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Zadné kolesá z PU s priemerom 60 cm pre CP100-xx, CP103R-xx, CP104-xx
- Zadné kolesá z PU s priemerom 30 cm pre CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Sed, chrbtová opierka a potáh výplne laktových opierok z nylonu
- Odolnosť pri zapnutí: Materiály použité na potáh a výplň boli testované metódami uvedenými v norme EN1021-1/2
- Referenčné normy: EN 12183
- Teplota prevádzkového prostredia: -20 až + 40 °C
- **Odporúčané uchovávanie:** Uchovávať na chladnom a suchom mieste a v každom prípade v dostatočnej vzdialenosti od priameho slnečného žiarenia. (odporúčaná teplota +10 až + 40 °C)

## 17. ZÁRUKA

Na všetky výrobky firmy Moretti sa vzťahuje záruka na chyby materiálu alebo výrobné chyby po dobu 2 (dvoch) rokov od dátumu zakúpenia výrobku, s výhradou výnimiek a obmedzení uvedených nižšie. Táto záruka nie je platná v prípade nevhodného použitia, zneužitia alebo úpravy výrobku a pri nedodržaní pokynov na použitie. Správne určené použitie výrobku je uvedené v návode na použitie. Firma Moretti nie je zodpovedná za vzniknuté škody, zranenia osôb alebo čokoľvek iné spôsobené alebo súvisiace s inštaláciou a/alebo použitím zariadenia, ktoré nie je dôsledne v zhode s pokynmi uvedenými v návode na inštaláciu, montáž a použitie. Firma Moretti neručí za výrobky Moretti z hľadiska poškodenia alebo chýb v nasledujúcich prípadoch: prírodné katastrofy, neautorizované úkony údržby alebo opravy, poškodenia vyplývajúce z problémov elektrického napájania (ak je súčasťou), použitie dielov alebo komponentov, ktoré neboli dodané firmou Moretti, nedodržanie základných pokynov na použitie, neautorizované úpravy, poškodenie pri preprave (iné ako originálna zásielky od firmy Moretti), alebo nevykonanie údržby uvedenej v návode. Záruka sa nevzťahuje na komponenty podliehajúce opotrebovaniu, ak bolo poškodenie spôsobené bežným použitím výrobku.

### 17.1 Opravy

**Záručná oprava:** Ak výrobok od firmy Moretti vykazuje chyby materiálu alebo výrobné chyby v záručnej dobe, firma Moretti vyhodnotí so zákazníkom, či sa na chybu vzťahuje záruka. Firma Moretti môže na základe vlastného nenapadnuteľného rozhodnutia vymeniť alebo opraviť diel v záruke u uvedeného predajcu výrobkov značky Moretti alebo vo svojom sídle. Náklady na prácu súvisiace s opravou výrobku môže znášať firma Moretti, ak sa určí, že oprava spadá do rozsahu záručných opráv. Oprava alebo výmena nepredstavuje predĺženie záručnej doby.

**Oprava výrobku v záruke:** Výrobok, na ktorý sa nevzťahuje záruka, môže byť vrátený kvôli oprave len po predchádzajúcom schválení od zákazníckeho servisu firmy Moretti. Náklady na prácu a prepravu súvisiace s opravou, na ktoré sa nevzťahuje záruka, budú plne hradené zákazníkom alebo predajcom. Na opravy výrobkov, na ktoré sa záruka nevzťahuje, sa poskytuje záruka 6 (šesť) mesiacov odo dňa prijatia opraveného výrobku.

**Bezchybné výrobky:** Zákazník bude informovaný, či po preskúmaní a otestovaní vráteného výrobku firma Moretti dospeje k záveru, že výrobok nie je chybný. Výrobok bude vrátený zákazníkovi a zákazník uhradí náklady na jeho vrátenie.

### 17.2 Náhradné diely

Na originálne náhradné diely od firmy Moretti sa vzťahuje záruka 6 (šest) mesiacov odo dňa prijatia náhradného dielu.

### 17.3 Klausuly zbavenia zodpovednosti

S výnimkou prípadu, keď je to špecificky uvedené v tejto záruke, a v zákonom stanovenom rozsahu, firma Moretti neponúka žiadne vyhlásenie, záruku alebo podmienku, vyjadrenú alebo implicitnú, vrátane prípadných vyhlásení, záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti pre špeciálny účel, neporušenie a nezasahovanie. Firma Moretti neručí, že použitie výrobku Moretti bude prebiehať nepretržite alebo bez chýb. Doba trvania prípadných implicitných záruk, ktoré by mohli byť nariadené zákonom, je obmedzená na záručnú dobu, v zákonom stanovenom rozsahu. Niektoré štáty neumožňujú obmedzenie trvania implicitnej záruky alebo vylúčenie či obmedzenia náhodných alebo priamych škôd vo vzťahu k výrobkom pre spotrebiteľa. V týchto štátoch alebo krajinách nemusia byť niektoré vylúčenia alebo obmedzenia tejto záruky aplikované na používateľa. Táto záruka podlieha zmenám bez predošlého upozornenia.



**ZÁRUČNÝ LIST**

Výrobok \_\_\_\_\_

Zakúpený dňa \_\_\_\_\_

Predajca \_\_\_\_\_

Ulica \_\_\_\_\_ Lokalita \_\_\_\_\_

Predané (komu) \_\_\_\_\_

Ulica \_\_\_\_\_ Lokalita \_\_\_\_\_

SLOVENSKY



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriago (Arezzo), tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com email: info@morettispa.com**

**VYROBENÉ V ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE**

**MORETTI S.P.A.**  
Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

tel. +39 055 96 21 11  
fax +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)