



IT

Carrozzina elettrica pieghevole
Moretti Mobility 870
MANUALE DI ISTRUZIONI

SCANSIONA IL CODICE QR
PER ALTRE LINGUE



INDICE

1. CODICE.....	PAG. 3
2. INTRODUZIONE.....	PAG. 3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG. 3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE.....	PAG. 3
5. AVVERTENZE GENERALI.....	PAG. 4
6. VITA UTILE DEL DISPOSITIVO.....	PAG. 4
7. NORME DI SICUREZZA DURANTE L'USO.....	PAG. 4
8. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG. 4
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	PAG. 5
9.1 Precauzioni generali.....	pag. 5
9.2 Modifiche.....	pag. 6
9.3 Prima di ogni utilizzo.....	pag. 6
9.4 Limitazioni di peso.....	pag. 6
10. VISTA GENERALE DELLE PARTI.....	PAG. 7
11. MESSA IN FUNZIONE.....	PAG. 7
11.1 Installazione del controller e dei cavi di collegamento.....	pag. 7
11.2 Installazione e funzionamento delle batterie.....	pag. 7
11.3 Accensione e prima guida.....	pag. 8
12. FUNZIONAMENTO.....	PAG. 8
12.1 Stato ON/OFF.....	pag. 9
12.2 Indicatore di stato della batteria.....	pag. 9
12.3 Chiusura e movimentazione della carrozzina elettrica.....	pag. 9
12.4 Utilizzo della carrozzina elettrica.....	pag. 10
12.5 Controlli prima dell'uso.....	pag. 10
12.6 Istruzioni di utilizzo.....	pag. 10
12.7 Raccomandazioni per un uso sicuro.....	pag. 10
12.8 Altre informazioni per l'uso.....	pag. 11
12.9 Ruota libera - folle.....	pag. 11
12.10 Freni elettromagnetici.....	pag. 12
12.11 Regolazione elettrica dello schienale.....	pag. 12
12.12 Poggiatesta regolabile.....	pag. 12
12.13 Poggiatesta regolabile.....	pag. 12
13. BATTERIA E RICARICA.....	PAG. 12
13.1 Indicazioni per la ricarica e la salute delle batterie.....	pag. 13
14. MANUTENZIONE.....	PAG. 14
15. DEFINIZIONI.....	PAG. 14
15.1 Manutenzione ORDINARIA.....	pag. 14
15.2 Manutenzione STRAORDINARIA.....	pag. 14
15.3 Manutenzione PREVENTIVA.....	pag. 14
16. TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE.....	PAG. 14
16.1 ORDINARIA - Frequenza settimanale.....	pag. 14
16.2 STRAORDINARIA - Secondo necessità.....	pag. 15
16.3 PREVENTIVA.....	pag. 15
17. PULIZIA, DISINFEZIONE E ASCIUGATURA: DEFINIZIONI E ISTRUZIONI.....	PAG. 15
17.1 Pulizia.....	pag. 15
17.2 Disinfezione.....	pag. 15
17.3 Asciugatura.....	pag. 15
18. PRODOTTI CHIMICI.....	PAG. 16
19. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA.....	PAG. 16
20. PULIZIA.....	PAG. 16
20.1 Pulizia della carrozzina elettrica.....	pag. 16
20.2 Disinfezione della carrozzina elettrica.....	pag. 17
20.3 Asciugatura.....	pag. 17
21. RIUTILIZZO.....	PAG. 18
21.1 Riutilizzo.....	pag. 18
21.2 Ricondizionamento per il riutilizzo.....	pag. 18
21.3 Vita utile del dispositivo.....	pag. 18
22. RIASSEGNAZIONE DEL DISPOSITIVO.....	PAG. 18
22.1 Valutazione clinica.....	pag. 18
22.2 Verifica tecnica.....	pag. 18
22.3 Pulizia e disinfezione.....	pag. 18
23. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	PAG. 19
23.1 Autodiagnosi.....	pag. 20
24. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	PAG. 21
25. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (EMI).....	PAG. 22
25.1 Compatibilità elettromagnetica.....	pag. 22
26. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO.....	PAG. 26
26.1 Condizioni di smaltimento generali.....	pag. 26
26.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del dispositivo ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE.....	pag. 26
26.3 Trattamento delle batterie esauste — Regolamento (UE) 2023/1542.....	pag. 26
27. GARANZIA.....	PAG. 26
27.1 Garanzia delle batterie ricaricabili.....	pag. 26
27.2 Riparazioni.....	pag. 26
28. RICAMBI.....	PAG. 27
29. CLAUSOLE ESONERATIVE.....	PAG. 27

CE Dispositivo Medico di Classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai Dispositivi Medici

1. CODICE

CM870 Carrozzina elettrica pieghevole Mobility 870

2. INTRODUZIONE

La ringraziamo per aver scelto un dispositivo Moretti S.p.A. realizzato nel rispetto dei più elevati standard qualitativi, al fine di garantire sicurezza, affidabilità strutturale, comfort ergonomico e durata nel tempo, sia in ambito domiciliare sia in ambito sanitario.

Il presente manuale ha lo scopo di fornire:

- istruzioni tecniche per il corretto utilizzo del dispositivo;
- indicazioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione;
- avvertenze di sicurezza per l'utilizzatore e per l'operatore.

Leggere attentamente tutte le sezioni del presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.

In caso di dubbi o necessità di chiarimenti, contattare il rivenditore autorizzato o il servizio di assistenza tecnica Moretti S.p.A.

3. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo è destinato a supportare la mobilità personale di persone con ridotte capacità motorie, in ambito domestico e sanitario, su superfici idonee e compatibili con le caratteristiche tecniche indicate nel presente manuale. La carrozzina è azionata da un sistema di trazione elettrica comandato dall'utilizzatore tramite controller/joystick. L'utilizzo deve avvenire solo da parte di persone in condizioni psicofisiche idonee o, se necessario, con il supporto di un assistente.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del presente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo da persone in condizioni psicofisiche idonee a controllarlo in sicurezza. Se necessario, l'utilizzo deve avvenire con il supporto di un assistente.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al presente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facenti parte della famiglia "**CARROZZINE ELETTRICHE**" sono conformi alle disposizioni applicabili del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. A tal scopo la Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi del dispositivo, il codice di registrazione del fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti alle norme applicabili utilizzate sono riportati nella Dichiarazione UE di conformità che Moretti S.p.A. emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI

Consultazione del manuale

Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, con particolare riferimento alle sezioni di sicurezza e manutenzione.

Consulenza sanitaria

L'utilizzo del dispositivo deve avvenire, quando necessario, previa valutazione di personale medico o riabilitativo qualificato.

Conservazione dell'imballaggio

Conservare l'imballaggio originale lontano da fonti di calore o fiamme libere, poiché realizzato in materiale infiammabile.

Limiti di carico

Non superare il carico massimo ammesso indicato dal fabbricante. Il superamento di tale limite può compromettere la stabilità e l'integrità strutturale della carrozzina.

Sicurezza dei minori

Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e non consentirne l'utilizzo improprio.

Segnalazione di incidenti

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato tempestivamente al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. VITA UTILE DEL DISPOSITIVO

La vita utile prevista del dispositivo è di massimo 10 anni dalla data di fabbricazione riportata in etichetta, a condizione che il dispositivo sia utilizzato, mantenuto e conservato secondo le istruzioni del presente manuale.

7. NORME DI SICUREZZA DURANTE L'USO

- Indossare sempre la cintura di sicurezza e mantenere i piedi appoggiati sulla pedana durante l'utilizzo;
- Non utilizzare la carrozzina sotto l'effetto di alcol o di sostanze che possono alterare i riflessi;
- Non utilizzare dispositivi di comunicazione radio portatili in prossimità del joystick, dei cavi o della centralina durante il funzionamento, salvo diversa indicazione del fabbricante;
- Prima di iniziare il movimento, assicurarsi che il percorso sia libero da ostacoli;
- Evitare curve strette e frenate improvvise;
- Non utilizzare la carrozzina nel traffico stradale. Utilizzare solo percorsi pedonali o aree sicure;
- Non superare ostacoli o cordoli di altezza superiore a quella indicata nelle caratteristiche tecniche del presente manuale;
- Durante la guida, mantenere sempre mani e gambe all'interno della carrozzina;
- Non utilizzare la carrozzina su superfici scivolose, ghiacciate o innevate.

ATTENZIONE!



Il trasporto in auto deve avvenire esclusivamente con la carrozzina vuota, spenta, piegata e riposta in modo sicuro nel bagagliaio o in un vano idoneo, per evitare movimenti durante il trasporto. La carrozzina non è predisposta per essere utilizzata all'interno di veicoli in movimento.

8. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

REF

Codice dispositivo

UDI

Identificativo univoco del dispositivo

	Numero di serie
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Dispositivo Medico
	Peso massimo supportato
	Condizioni di smaltimento
	Attenzione
	Data di produzione
	Smaltimento del dispositivo secondo la Direttiva 2012/19/UE
IPX4	Protezione da spruzzi d'acqua
	Parte applicata di tipo BF

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

9.1 Precauzioni generali

ATTENZIONE!



- Non utilizzare la carrozzina su strade aperte al traffico. Gli altri veicoli potrebbero non rilevare facilmente la presenza della carrozzina e dell'utilizzatore.
- Utilizzare sempre percorsi pedonali o aree sicure.
- Rispettare le regole per i pedoni.
- Prima di muoversi, assicurarsi che il percorso sia libero.
- Procedere sempre con prudenza.

- Prima di salire o scendere, assicurarsi che la carrozzina sia spenta e non in carica;
- Prima dell'uso, verificare che le ruote siano in modalità di marcia (non in folle);
- Non spegnere la carrozzina mentre è in movimento;
- Utilizzare la carrozzina solo dopo aver letto e compreso il manuale; in caso di dubbi, contattare il rivenditore o personale qualificato;
- Se necessario, utilizzare la carrozzina con il supporto di un assistente, ad esempio un familiare o un operatore.

Uso corretto e sicurezza

- Non sollevare o spostare la carrozzina afferrando parti non strutturali (braccioli, schienale, joystick, ecc.).
- Non utilizzare la carrozzina oltre i limiti di peso, le modalità d'uso e le condizioni ambientali indicati.
- Non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di veicoli in movimento. Il dispositivo non è destinato al trasporto dell'utilizzatore su veicoli.
- Durante la guida, tenere mani, piedi e indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Non rimuovere i dispositivi antiribaltamento.

Sicurezza elettrica

- Non manomettere l'impianto elettrico.
- Non utilizzare caricabatterie o accessori non autorizzati.
- Evitare il contatto con parti elettriche danneggiate.

Condizioni di utilizzo

- Consultare il medico prima dell'uso se si assumono farmaci o si hanno limitazioni che possono influire sulla guida.
- Verificare sempre che le ruote e i sistemi di blocco siano correttamente posizionati, soprattutto dopo il trasporto.

Guida e ambiente

- Non affrontare pendenze od ostacoli superiori ai limiti indicati nel presente manuale.
- Affrontare rampe e dislivelli con cautela e a bassa velocità.
- Evitare scalini, cordoli e ostacoli non compatibili con il transito sicuro di carrozzine elettriche;
- Ridurre la velocità in curva e negli spazi ristretti.
- Evitare superfici bagnate, ghiacciate, innevate o irregolari.

Trasporto e sollevamento

- Utilizzare ascensori o montascale solo se idonei al trasporto di carrozzine elettriche;
- Seguire sempre le istruzioni del dispositivo di sollevamento.

9.2 Modifiche

- La carrozzina è progettata per garantire un utilizzo sicuro e conforme alla destinazione d'uso prevista.
- Non modificare, aggiungere, rimuovere o disattivare parti o funzioni della carrozzina;
- Qualsiasi modifica non autorizzata può causare malfunzionamenti, ridurre la sicurezza e provocare lesioni.
- Eventuali regolazioni o modifiche ai parametri di controllo devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico autorizzato.

9.3 Prima di ogni utilizzo

Prima di ogni utilizzo verificare che:

- 1) Tutti i collegamenti elettrici siano correttamente inseriti e privi di segni di usura, ossidazione o corrosione.
- 2) I cavi siano integri, correttamente fissati e non schiacciati.
- 3) I freni funzionino correttamente.
- 4) Le batterie siano correttamente inserite e bloccate.
- 5) Le leve dei motori siano in posizione DRIVE.
- 6) Il livello di carica delle batterie sia sufficiente per l'utilizzo previsto.
- 7) Ruote, braccioli, pedana, schienale, poggiatesta e ruotini antiribaltamento siano integri e correttamente fissati.
- 8) Il percorso sia libero da ostacoli e compatibile con l'utilizzo della carrozzina.

9.4 Limitazioni di peso

- 1) Verificare la portata massima consentita nella tabella delle caratteristiche tecniche o sull'etichetta del dispositivo.
- 2) Non superare il limite di peso: un carico eccessivo può compromettere la stabilità e il corretto funzionamento della carrozzina.
- 3) Non trasportare altre persone sulla carrozzina. Ciò può causare perdita di equilibrio, ribaltamento o caduta.

Il mancato rispetto dei limiti di peso può causare danni al dispositivo, compromettere la sicurezza dell'utilizzatore e far decadere la garanzia.

10. VISTA GENERALE DELLE PARTI



CM870


- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Struttura principale | 9. Ruota posteriore |
| 2. Controller | 10. Centralina elettronica |
| 3. Barra di fissaggio del controller | 11. Batterie |
| 4. Pedana poggiatesta | 12. Joystick wireless |
| 5. Motore | 13. Poggiatesta |
| 6. Seduta imbottita | 14. Ruotini antiribaltamento |
| 7. Schienale ripiegabile elettricamente | 15. Poggia polpacci ripiegabile |
| 8. Ruota anteriore | 16. Borsa portaoggetti |

11. MESSA IN FUNZIONE

Prima di iniziare, disimballare la carrozzina con attenzione. Posizionarla a terra, in posizione chiusa, assicurandosi che tutte e quattro le ruote siano appoggiate correttamente. Successivamente, aprire la carrozzina allontanando delicatamente lo schienale dalla seduta fino alla completa apertura.

11.1 Installazione del controller e dei cavi di collegamento

- Il controller della carrozzina elettrica può essere installato sia sul lato destro che su quello sinistro.
- Scegliere il lato più adatto alla mano con cui l'utilizzatore intende comandare il joystick.
- Inserire la barra di sostegno nell'apposita guida situata sotto il bracciolo del lato selezionato.
- Verificare che il controller sia correttamente collegato alla centralina.
- Inserire il cavo negli appositi supporti in plastica sotto il bracciolo (vedi Fig.1).

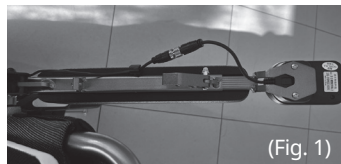

(Fig. 1)

11.2 Installazione e funzionamento delle batterie

Per rimuovere la batteria:

- Inserire le dita nell'apposito incavo;
- Sollevare la maniglia presente sulla batteria;
- Estrarre la batteria dall'alloggiamento.

Per installare la batteria:



(Fig. 2)

- Posizionarla seguendo le apposite guide;
- Premere con decisione fino a sentire uno scatto di blocco, che indica il corretto blocco in posizione (vedi Fig. 2);
- Verificare che la batteria sia correttamente bloccata prima dell'utilizzo.

11.3 Accensione e prima guida

Per effettuare la prima accensione:

- Portare le leve dei motori in posizione DRIVE;
- Accendere la carrozzina premendo il pulsante ON del controller;
- Impostare la velocità al livello minimo.

Per iniziare la guida:

- Utilizzare la carrozzina in uno spazio ampio e privo di ostacoli;
- Aumentare gradualmente la velocità solo dopo aver acquisito sufficiente dimestichezza con i comandi.

ATTENZIONE!



- Prima di accendere la carrozzina, verificare sempre l'ambiente circostante e selezionare una velocità adeguata;
- Per gli ambienti interni si consiglia di selezionare la velocità più lenta;
- Per l'uso all'aperto si consiglia di selezionare una velocità controllabile in sicurezza.

12. FUNZIONAMENTO

La carrozzina elettrica è progettata per essere semplice da utilizzare. Si consiglia comunque di leggere attentamente le seguenti istruzioni per familiarizzare con il dispositivo e utilizzarlo in modo sicuro. Per garantire praticità e sicurezza, la carrozzina è dotata di braccioli sollevabili.

Per sollevare il bracciolo:

- Premere la leva situata sotto il bracciolo per sbloccare il meccanismo;
- Sollevare il bracciolo (vedi Fig. 3).

Per abbassare il bracciolo:

- Riportarlo completamente verso il basso;
- Assicurarsi che il bracciolo sia correttamente bloccato, verificando l'avvenuto aggancio.



(Fig. 3)



ATTENZIONE!

Prestare attenzione a non inserire dita o indumenti nel meccanismo di apertura/chiusura.

Il controller è dotato di un display multifunzione che può fornire diversi tipi di informazioni:



- Tasto ON/OFF;
- Joystick di comando;
- Barra del livello di carica;
- Clacson;
- Tasto aumento velocità;
- Tasto diminuzione velocità;
- Barra del livello di velocità.

Il joystick controlla sia la direzione sia la velocità della carrozzina.

Per utilizzare il joystick:

- Spingerlo delicatamente nella direzione in cui si desidera muoversi;
- Maggiore è l'inclinazione, maggiore sarà la velocità.

Per fermarsi:

- Rilasciare il joystick riportandolo in posizione centrale;
- La carrozzina rallenterà fino ad arrestarsi, attivando automaticamente i freni elettromagnetici.

12.1 Stato ON/OFF

Quando la carrozzina è accesa, il LED del controller è illuminato. Se il LED è spento, il controller risulta disattivato.

NOTA:

- Dopo aver premuto il pulsante ON/OFF, attendere due secondi prima di usare il joystick. Questa è una funzione di sicurezza che evita partenze improvvise;
- Un utilizzo delicato del joystick consente movimenti più fluidi e controllati;
- Un utilizzo brusco può causare cambi di direzione improvvisi e velocità elevate;
- In caso di emergenza, rilasciare il joystick: la carrozzina si arresterà automaticamente.

12.2 Indicatore di stato della batteria

La carrozzina è dotata di un indicatore di carica composto da 5 LED (1 rosso, 2 gialli, 2 verdi), che mostra il livello approssimativo della batteria.

- Verde, giallo e rosso accesi: batterie completamente cariche;
- Giallo e rosso accesi: si consiglia di ricaricare le batterie al più presto;
- Solo rosso acceso: batterie quasi scariche; ricaricare immediatamente;

Una carica insufficiente può causare una riduzione delle prestazioni della carrozzina.

12.3 Chiusura e movimentazione della carrozzina elettrica

La carrozzina elettrica può essere ripiegata per facilitare il trasporto e la conservazione:

ATTENZIONE!



- Non utilizzare la carrozzina come sedile per il trasporto dell'utilizzatore all'interno di veicoli in movimento. Il dispositivo non è destinato all'uso con sistemi di ancoraggio per il trasporto dell'utilizzatore.
- Non posizionare la carrozzina ripiegata sul sedile anteriore accanto al conducente.

Per chiudere la carrozzina:

- Sollevare la pedana poggiapiedi;
- Afferrare le maniglie dello schienale al centro;
- Spingere con decisione fino ad avvicinare lo schienale alla seduta.

Per trasportarla:

- Utilizzare le maniglie dello schienale.
- Inclinare la carrozzina e movimentarla utilizzando le ruote posteriori, senza afferrare parti non strutturali.

Per riaprire la carrozzina:

- Posizionarla inclinata in avanti finché tutte e quattro le ruote toccano terra.
- Allargare lo schienale fino alla completa apertura.

12.4 Utilizzo della carrozzina elettrica

Prima di trasferirsi sulla carrozzina elettrica, assicurarsi che il dispositivo si trovi su una superficie piana e priva di ostacoli. Sebbene la carrozzina sia in grado di superare pendenze, è consigliabile fare pratica inizialmente su terreno piano.

12.5 Controlli prima dell'uso

- Verificare il funzionamento del clacson.
- Controllare lo stato delle ruote.
- Verificare il livello di carica delle batterie.
- Assicurarsi che le leve sui motori siano in modalità DRIVE.
- Impostare una velocità bassa per i primi utilizzi.

12.6 Istruzioni di utilizzo

Sedersi sulla carrozzina e premere il pulsante ON/OFF sul controller.

- 1) Verificare che il livello di carica della batteria sia sufficiente per l'utilizzo previsto.
- 2) Posizionare l'avambraccio sul bracciolo e la mano sul controller.
- 3) Attendere 2 secondi prima di utilizzare il joystick (funzione di sicurezza).
- 4) Utilizzare il joystick per controllare i movimenti:

IN AVANTI → la carrozzina avanza.

INDIETRO → la carrozzina arretra.

SINISTRA → svolta a sinistra.

DESTRA → svolta a destra.

IN POSIZIONE CENTRALE → la carrozzina si ferma automaticamente.

Il joystick regola anche la velocità: maggiore è lo spostamento, maggiore sarà la velocità.

- 5) Muovere il joystick con delicatezza applicando una pressione stabile e controllata.
- 6) In caso di emergenza, rilasciare il joystick: la carrozzina si arresterà automaticamente.
- 7) Non impostare mai una velocità superiore alle proprie capacità di controllo.
- 8) Fare pratica di guida in un luogo privo di ostacoli:
 - iniziare a bassa velocità;
 - provare movimenti avanti/indietro e curve;
 - aumentare gradualmente la velocità.
- 9) Il numero di LED accesi indica il livello di velocità impostato.
- 10) Se restano accesi solo due LED della batteria, ricaricare al più presto.
- 11) Al termine dell'utilizzo, spegnere sempre il controller premendo ON/OFF.

12.7 Raccomandazioni per un uso sicuro

- Prima di cambiare direzione (avanti/indietro) riportare il joystick in posizione centrale e attendere l'arresto completo.
- Utilizzare la carrozzina solo in aree sicure, prive di ostacoli e idonee al transito di carrozzine elettriche.
- In salita o discesa, assicurarsi che la pendenza non superi il limite consentito e che il terreno non sia scivoloso.
- Ridurre la velocità durante manovre, pendenze o su superfici irregolari.

- Non utilizzare mai gli appoggiagambe per sollevare la carrozzina.
- Se non si riesce a controllare il joystick con precisione, interrompere l'uso e rivolgersi a personale qualificato.

12.8 Altre informazioni per l'uso

Guidare in salita

In presenza di pendenze entro il limite massimo consentito, potrebbe essere necessario aumentare la velocità per mantenere una guida stabile.

Come procedere:

- Premere il pulsante di aumento velocità per aumentarla.
- Affrontare la salita in modo graduale e controllato.



ATTENZIONE!

Procedere sempre con la massima cautela sulle pendenze consentite e non superare mai il limite massimo indicato nelle caratteristiche tecniche. Evitare movimenti bruschi durante la salita.

Guidare in discesa

Per affrontare le discese in sicurezza è importante mantenere una velocità controllata.

Come procedere:

- Premere il pulsante di diminuzione di velocità per ridurla.
- Mantenere una guida stabile e lineare.

La carrozzina è dotata di un sistema automatico di frenata che impedisce accelerazioni incontrollate in discesa.



ATTENZIONE!

Evitare cambi di direzione bruschi. Non fermarsi su pendenze superiori al limite di sicurezza.

Superamento degli ostacoli

La carrozzina può superare piccoli ostacoli, ma è importante affrontarli correttamente.

Come procedere:

- Avvicinarsi agli ostacoli lentamente e frontalmente.
- Evitare di affrontarli di lato.



ATTENZIONE!

Non superare ostacoli superiori a 30 mm. Il sistema antiribaltamento può entrare in contatto con il suolo durante il superamento di piccoli ostacoli: procedere con particolare attenzione.

12.9 Ruota libera – folle

I freni elettromagnetici si attivano automaticamente quando le leve sui motori sono in modalità DRIVE. La carrozzina è dotata di una funzione a ruota libera, che si ottiene portando le leve dei motori in modalità FOLLE.



ATTENZIONE!

In modalità ruota libera, i freni elettromagnetici sono disattivati. Utilizzare questa funzione solo quando necessario e in condizioni di sicurezza.

Prima dell'utilizzo, verificare sempre che le leve dei motori siano riportate in posizione DRIVE.



ATTENZIONE!

- Non utilizzare mai la modalità ruota libera in discesa o durante la guida della carrozzina.
- Ricordare sempre di riportare le leve dei motori in modalità DRIVE prima di accendere la carrozzina.

12.10 Freni elettromagnetici

La carrozzina elettrica è dotata di freni (detti anche freni di sicurezza a disco magnetico). Funzionamento:

- I freni si attivano automaticamente quando la carrozzina è accesa ma ferma, anche su superfici in pendenza.
- I freni restano attivi anche quando la carrozzina è spenta, purché l'interruttore del motore sia in posizione di DRIVE.

Questa funzione garantisce maggiore sicurezza, evitando movimenti involontari della carrozzina.

NOTA: Per assicurare il corretto funzionamento dei freni, fare riferimento alla sezione manutenzione e verificare regolarmente il loro stato.

12.11 Regolazione elettrica dello schienale

Lo schienale può essere reclinato elettricamente tramite il controller. Per regolare lo schienale, tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto centrale del controller, identificato dall'icona con tre linee orizzontali, fino al segnale acustico. Successivamente, utilizzare i tasti freccia per sollevare o abbassare lo schienale. Per tornare alla modalità di guida, premere nuovamente il tasto con le tre linee orizzontali.



ATTENZIONE!

Effettuare la regolazione dello schienale solo con la carrozzina ferma, su superficie piana e stabile. Non regolare lo schienale durante la marcia. Una posizione molto reclinata può modificare la stabilità della carrozzina: procedere sempre con cautela.

12.12 Poggiapolpacci estraibile

Il poggiapolpacci si trova sotto la seduta e può essere estratto al bisogno. Si consiglia di utilizzarlo quando lo schienale è reclinato. Per estrarlo, afferrare la barra posta sotto la seduta e far scorrere la struttura sulle guide. Successivamente, ruotare la parte imbottita nella posizione di utilizzo.

12.13 Poggiatesta regolabile

Il poggiatesta viene fornito già montato sulla carrozzina. La regolazione viene effettuata tramite sistema a cremagliera. Il sistema consente la regolazione in altezza fino alla posizione massima; raggiunta tale posizione, il poggiatesta può essere riportato alla posizione minima. Per rimuoverlo o sostituirlo, svitare le due viti di fissaggio alla struttura in alluminio.

13. BATTERIA E RICARICA

La carrozzina elettrica viene fornita con due batterie a litio. È possibile caricarle in due modalità:

Ricarica tramite controller:

- Collegare il caricabatterie direttamente al controller.
- Assicurarsi che la carrozzina sia spenta.
- Tempo di ricarica: circa 6 ore per entrambe le batterie.

Ricarica singola delle batterie:

- Collegare il caricabatterie direttamente alla porta dedicata su ciascuna batteria.
- Tempo di ricarica: circa 3 ore per batteria.

Indicatore di ricarica:

- Luce rossa: batteria in carica.
- Luce verde: ricarica completata.



ATTENZIONE!

1. Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze.
2. Utilizzare il caricabatterie in una zona ben ventilata.
3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione e dal dispositivo.

NOTA: Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con la carrozzina o autorizzato dal fabbricante. L'uso di caricabatterie diversi da quello fornito o autorizzato dal fabbricante è vietato, poiché può compromettere la sicurezza del dispositivo e delle batterie.

- Il caricabatterie è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Proteggerlo dall'umidità.
- Per mantenere prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire entrambe le batterie contemporaneamente quando risultano esaurite.
- In caso di inutilizzo prolungato della carrozzina, ricaricare le batterie almeno una volta al mese per evitarne il deterioramento.
- È vietato adottare procedure di ricarica non autorizzate.

13.1 Indicazioni per la ricarica e la salute delle batterie

- Spegnerne sempre la carrozzina durante la carica.
- Non lasciare bambini senza sorveglianza vicino alla carrozzina mentre è in carica.
- Non tentare di aprire l'alloggiamento della batteria.
- Il LED rosso indica che le batterie è in carica; il LED verde indica che la ricarica è completata.
- Quando le batterie è completamente carica, scollegare il cavo dalla presa di alimentazione e rimuovere il connettore di ricarica.
- Se la carrozzina non viene utilizzata per oltre 2 mesi, effettuare una ricarica completa prima dell'uso.
- La carrozzina è dotata di un sistema di protezione da sovracorrenti che interrompe l'alimentazione in caso di assorbimento anomalo, spegnendo il sistema e contribuendo a evitare danni ai motori e alle batterie.
- Le batterie al litio hanno una durata media di circa 500 cicli di ricarica.
- Controllare regolarmente l'indicatore delle batterie, soprattutto in caso di utilizzo frequente.
- Se danneggiata, non maneggiare le batterie senza guanti e occhiali protettivi.
- Se le batterie deve essere smaltita, individuare il centro autorizzato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e contattarlo per ricevere istruzioni.

Prima di riporre la carrozzina per un periodo prolungato, adottare i seguenti accorgimenti per la manutenzione delle batterie:

- a. caricare completamente le batterie prima di riporla;
- b. rimuovere le batterie dalla carrozzina;
- c. conservare le batterie in un luogo asciutto, a temperatura ambiente;
- d. evitare temperature estreme e il congelamento;
- e. durante i lunghi periodi di non utilizzo, caricare le batterie ogni mese per evitare il loro danneggiamento.



ATTENZIONE!

Non caricare la batteria se è congelata. Lasciarla scongelare per alcune ore prima della ricarica.



ATTENZIONE!

Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione del caricabatterie appena la luce diventa verde.



ATTENZIONE!

Non caricare entrambe le batterie per più di 6 ore consecutive tramite il controller e non più di 3 ore nel caso di ricarica della singola batteria.

14. MANUTENZIONE

I dispositivi Moretti sono sottoposti a rigorosi controlli prima dell'immissione in commercio e sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), come attestato dalla marcatura CE.

Per garantire nel tempo sicurezza, prestazioni e corretta funzionalità del dispositivo, è fondamentale eseguire regolarmente tutte le operazioni di manutenzione seguendo le istruzioni fornite in questo manuale. L'utilizzatore è responsabile dei controlli e della manutenzione ordinaria indicati nel presente manuale. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato. Una manutenzione non corretta o non eseguita può compromettere la sicurezza del dispositivo, la sicurezza dell'utilizzatore e degli assistenti, oltre a invalidare la garanzia. Una manutenzione regolare, che includa pulizia e controlli periodici, consente di preservarne l'efficienza e prolungarne la durata nel tempo. Eventuali lubrificazioni devono essere eseguite solo sui punti indicati e con prodotti idonei, evitando freni, motori, batterie, connettori e componenti elettrici. Prima di ogni utilizzo, eseguire sempre i controlli indicati nel paragrafo "Prima di ogni utilizzo".

Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale con adeguate competenze tecniche. In caso contrario, si raccomanda di rivolgersi al rivenditore autorizzato o a un centro specializzato. Per mantenere nel tempo l'idoneità all'uso, si consiglia di far controllare il dispositivo almeno ogni 2 anni da personale con adeguate competenze tecniche o da un centro specializzato. In caso di riparazione, utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali.

AVVERTENZE!

- Non eseguire interventi di manutenzione mentre il dispositivo è in uso.
- In caso di dubbi o necessità di assistenza, contattare il rivenditore o un centro specializzato.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o malfunzionamenti.

15. DEFINIZIONI

15.1 Manutenzione ORDINARIA

Insieme delle operazioni periodiche e di routine finalizzate a mantenere il dispositivo in buone condizioni di funzionamento, sicurezza ed efficienza, senza richiedere interventi tecnici complessi.

15.2 Manutenzione STRAORDINARIA

Insieme degli interventi non programmati necessari per ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo a seguito di guasti, danni o usura significativa. Deve essere eseguita da personale qualificato.

15.3 Manutenzione PREVENTIVA

Insieme delle attività programmate eseguite a intervalli regolari con lo scopo di prevenire guasti, ridurre l'usura e garantire nel tempo sicurezza e prestazioni del dispositivo.

16. TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE

16.1 ORDINARIA - Frequenza settimanale

Include:

- Verificare che tutte le viti siano ben salde;
- Verificare visivamente che i collegamenti del controller siano integri, correttamente inseriti e privi di segni di corrosione;
- Assicurarci che tutte le parti siano ben fissate tra loro;
- Verificare il funzionamento dei freni;
- Verificare la funzionalità delle ruote e la capacità sterzante;
- Lubrificare, se necessario, solo i componenti mobili indicati dal fabbricante, utilizzando prodotti idonei. Non lubrificare freni, ruote motrici, motori, batterie, connettori o componenti elettrici.

16.2 STRAORDINARIA - Secondo necessità

Include:

- Controllare eventuali cavi esposti o danneggiati;
- Controllare che le ruote, sia anteriori che posteriori, ruotino senza oscillazioni;
- Ispezionare il battistrada degli pneumatici o delle ruote, se applicabile. Se lo spessore del battistrada è inferiore a 1 mm, far sostituire lo pneumatico o la ruota presso un rivenditore autorizzato;
- Controllare e tenere puliti i cuscinetti delle ruote.

Si raccomanda di non effettuare interventi straordinari autonomamente e di utilizzare esclusivamente ricambi originali.

16.3 PREVENTIVA

Si consiglia di far controllare il dispositivo, da personale qualificato o da un centro specializzato, per verificarne l'idoneità all'uso:

- Almeno una volta ogni due anni.
- Ad ogni riassegnazione a un nuovo utilizzatore.
- Dopo un periodo prolungato di inattività (superiore a 4 mesi).

17. PULIZIA, DISINFEZIONE E ASCIUGATURA: DEFINIZIONI E ISTRUZIONI

17.1 Pulizia

Rimozione dei contaminanti nella misura necessaria a consentire il successivo trattamento o l'utilizzo previsto del dispositivo, eliminando lo sporco visibile e riducendo significativamente la presenza di microrganismi sulla superficie.

Per ottenere un buon risultato, è importante combinare:

- Un'azione meccanica (es. strofinare con un panno).
- L'uso di detergenti adeguati.
- Acqua a temperatura appropriata.
- Un tempo di azione sufficiente.

Una pulizia corretta aiuta a mantenere il dispositivo igienico e sicuro.

17.2 Disinfezione

La disinfezione è il processo volto a ridurre il numero di microrganismi viventi, eliminando quelli potenzialmente dannosi, come batteri e virus. Deve essere effettuata dopo la pulizia. Utilizzare solo prodotti disinfettanti autorizzati, riconoscibili dalla presenza in etichetta del numero di registrazione del Ministero della Salute o di un'autorità competente dell'Unione Europea.

NOTA: la disinfezione è efficace solo se eseguita su superfici già pulite.

17.3 Asciugatura

L'asciugatura è il processo mediante il quale si elimina l'umidità residua dalle superfici del dispositivo medico dopo le operazioni di pulizia e/o disinfezione, al fine di prevenire la proliferazione microbica, la degradazione dei materiali e di garantire il corretto e sicuro riutilizzo del dispositivo. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia o la disinfezione è fondamentale. L'umidità residua può favorire la proliferazione di microrganismi e, nel tempo, danneggiare i materiali.

Una corretta asciugatura aiuta a prevenire la formazione di ruggine e a mantenere in buono stato tutti i componenti del dispositivo.

18. PRODOTTI CHIMICI

Sono disponibili prodotti specifici con azione virucida, germicida e fungicida, indicati per l'uso su dispositivi medici. Alcuni prodotti permettono di effettuare pulizia e disinfezione in un'unica operazione, garantendo un'efficace azione anche a freddo.

Secondo la norma **ISO 17664** il dispositivo oggetto del presente manuale è definito come:

- **Dispositivo non critico**

Sono dispositivi medici che entrano in contatto con la pelle integra dell'utilizzatore/paziente o che possono essere contaminati durante l'uso. I dispositivi che non entrano in contatto diretto col paziente possono essere trattati con disinfettanti di basso livello (Low Level Disinfection, LLD). Quelli che entrano in diretto contatto col paziente devono essere trattati con disinfettanti di livello intermedio (Middle Level Disinfection, MLD).

Infine, quelli che entrano in contatto con sangue o altri materiali potenzialmente infetti devono essere trattati con HLD. Tali dispositivi richiedono una pulizia seguita da disinfezione di livello adeguato: LLD, MLD o HLD, in base al rischio.

AVVERTENZA!

Nella scelta del prodotto da utilizzare, prestare particolare attenzione alla modalità d'uso del dispositivo in modo da scegliere un prodotto adeguato.

19. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- Verificare sempre che i prodotti utilizzati siano compatibili con i materiali del dispositivo (superfici verniciate, cromate e componenti plastici). Prodotti non idonei contenenti cloro, solventi aggressivi e sostanze abrasive potrebbero rovinare i materiali o i componenti del dispositivo.
- Rispettare le dosi e i tempi di azione indicati sull'etichetta del prodotto utilizzato.
- Effettuare una prova su una piccola area prima dell'uso.
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti e mascherina, quando richiesto.
- Eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione senza l'utilizzatore a bordo.
- Non utilizzare aria compressa, poiché può diffondere microrganismi nell'ambiente.

20. PULIZIA

20.1 Pulizia della carrozzina elettrica

- Pulire regolarmente la carrozzina elettrica e, quando necessario, dopo ogni utilizzo, per garantire adeguate condizioni igieniche e il corretto mantenimento del dispositivo.
- Non lavare con getti d'acqua, idropulitrici o immersione.
- Non candeggiare.
- Prima della pulizia, spegnere la carrozzina elettrica e scollegare eventuali caricabatterie o accessori elettrici.
- Pulire telaio, braccioli, pedane, ruote e superfici esterne con un panno morbido leggermente inumidito, utilizzando acqua tiepida e detergente neutro privo di cloro.
- Per seduta, schienale, imbottiture, cinghie e rivestimenti, utilizzare un panno morbido, evitando di impregnare eccessivamente i materiali.
- In caso di sporco più persistente, rimuoverlo manualmente con un panno o una spazzola morbida.
- Evitare il contatto diretto di acqua o detersivi con joystick, centralina, display, connettori, prese di ricarica, batterie, motori e componenti elettrici.
- Non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, solventi, prodotti contenenti cloro o detersivi corrosivi.
- Risciacquare le superfici trattate con un panno pulito leggermente inumidito, per rimuovere eventuali residui di detergente.

- Verificare che non rimangano residui o umidità nelle zone di comando, nei collegamenti elettrici e nei sistemi di chiusura o regolazione.

20.2 Disinfezione della carrozzina elettrica

Effettuare la disinfezione della carrozzina elettrica dopo la pulizia, utilizzando prodotti compatibili con i materiali del dispositivo.

- Utilizzare disinfettanti compatibili con superfici metalliche, plastiche, tessuti, imbottiture e rivestimenti della carrozzina.
- Applicare il prodotto con un panno morbido leggermente inumidito. Se il disinfettante è in formato spray, applicarlo sul panno e non direttamente sulla carrozzina.
- Non applicare direttamente il disinfettante su joystick, centralina, display, prese di ricarica, batterie, motori, connettori e componenti elettrici.
- Rispettare i tempi di contatto indicati dal produttore del disinfettante.
- Evitare un'eccessiva impregnazione di seduta, schienale, imbottiture, cinghie e rivestimenti.
- Al termine della disinfezione, rimuovere eventuali residui con un panno pulito, se previsto dalle istruzioni del prodotto utilizzato.
- Verificare che le parti trattate siano integre e prive di residui prima del successivo utilizzo.

20.3 Asciugatura

- Lasciare asciugare completamente la carrozzina elettrica prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare asciugatori ad aria calda, fonti di calore diretto, aria calda ad alta temperatura o esposizione prolungata al sole.
- Asciugare le superfici con un panno morbido e asciutto.
- Assicurarci all'aria in ambiente ventilato.
- Assicurarsi che seduta, schienale, imbottiture, cinghie, braccioli e pedane siano completamente asciutti.
- Verificare che joystick, connettori, prese di ricarica, batterie, motori e componenti elettrici non presentino umidità residua.
- Non utilizzare né ricaricare il dispositivo se è umido, danneggiato o non correttamente pulito e disinfettato, quando previsto.

Una corretta asciugatura previene la proliferazione microbica e preserva le caratteristiche dei materiali e dei componenti del dispositivo.

AVVERTENZE!

- Effettuare sempre prima la pulizia e successivamente la disinfezione.
- Prima di eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione, spegnere la carrozzina elettrica e scollegare il caricabatterie, se collegato.
- Non utilizzare prodotti contenenti cloro, solventi aggressivi, sostanze abrasive o detergenti corrosivi.
- Non lavare la carrozzina elettrica con getti d'acqua, idropulitrici o immersione.
- Non spruzzare acqua, detergenti o disinfettanti direttamente su joystick, centralina, display, connettori, prese di ricarica, batterie, motori o altri componenti elettrici.
- Non stirare rivestimenti, imbottiture o cinghie.
- Non sterilizzare in autoclave.
- Non utilizzare fonti di calore diretto per accelerare l'asciugatura.
- Non utilizzare né ricaricare il dispositivo se è umido danneggiato o non correttamente sanificato.
- Verificare sempre l'integrità delle parti pulite e disinfettate prima dell'utilizzo.

- Eseguire le operazioni senza l'utilizzatore a bordo.
- In caso di dubbi sulla compatibilità dei prodotti utilizzati, consultare le indicazioni del fabbricante della carrozzina elettrica o del prodotto detergente/disinfettante.

21. RIUTILIZZO

21.1 Riutilizzo

Il dispositivo, i relativi accessori e i componenti sono idonei al riutilizzo, previo rispetto delle indicazioni riportate nel presente manuale.

21.2 Ricondizionamento per il riutilizzo

Prima del riutilizzo o del cambio di utilizzatore, è necessario seguire le istruzioni di manutenzione, pulizia e disinfezione.

21.3 Vita utile del dispositivo

Il dispositivo ha una vita utile prevista massima di 10 anni, a condizione che venga utilizzato e mantenuto in conformità alle istruzioni fornite nel presente manuale.

La durata può variare in funzione di:

- Frequenza d'uso;
- Modalità d'uso;
- Condizioni ambientali.

Il rispetto delle indicazioni di uso, manutenzione e conservazione può prolungare la vita utile del dispositivo e comunque non oltre la durata massima indicata.



ATTENZIONE! SICUREZZA E CONFORMITÀ

La marcatura CE e la responsabilità del fabbricante sono valide solo se:

- Il dispositivo non è stato modificato.
- Vengono utilizzati esclusivamente ricambi e accessori originali.

22. RIASSEGNAZIONE DEL DISPOSITIVO

22.1 Valutazione clinica

La valutazione deve essere effettuata da personale sanitario qualificato (medico o terapeuta), al fine di verificare che il dispositivo sia:

- Idoneo alle esigenze dimensionali del nuovo utilizzatore.
- Adeguato alle necessità funzionali e posturali.
- Completo di componenti adatti al nuovo utilizzatore.

22.2 Verifica tecnica

La verifica deve essere eseguita da personale qualificato e deve includere:

- Controllo dello stato di usura del dispositivo.
- Verifica dell'assenza di danni, deformazioni o malfunzionamenti.
- Controllo del corretto funzionamento di tutte le regolazioni e dei componenti.

La verifica deve inoltre accertare la presenza di:

- Etichetta identificativa leggibile.
- Manuale d'uso.
- Caricabatterie e accessori originali, se previsti.
- Stato delle batterie, dei caricabatterie, dei connettori e dei cavi di alimentazione.

22.3 Pulizia e disinfezione

Prima del riutilizzo, il dispositivo deve essere:

- Accuratamente pulito.
- Adeguatamente disinfettato.

Le operazioni devono essere eseguite secondo quanto indicato nel capitolo "Pulizia e disinfezione" del presente manuale.

23. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA: Se si verificano problemi tecnici, si consiglia di far controllare il dispositivo dal rivenditore autorizzato senza tentare interventi non autorizzati in autonomia.

I seguenti sintomi possono indicare un problema grave alla carrozzina.
Contattare il rivenditore autorizzato se si presenta uno qualsiasi dei seguenti casi:

1. Rumorosità anomala del motore;
2. Cinture di sicurezza danneggiate;
3. Connettori incrinati o rotti;
4. Usura irregolare su una o più ruote;
5. Movimento a scatti;
6. La carrozzina devia verso un lato;
7. Gruppi ruota piegati o rotti;
8. La carrozzina non si accende;
9. La carrozzina si accende, ma non si muove.

DESCRIZIONE PROBLEMA	IMMAGINE TIPO	DESCRIZIONE DISPLAY ACCESSO	SOLUZIONE
Motore sinistro			
Errore di sistema 1		Indicatore batteria: 1 LED Indicatore velocità: 1 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Errore della scheda elettronica PCB		Indicatore batteria: 1 LED Indicatore velocità: 1 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Errore di sistema 2		Indicatore batteria: 2 LED Indicatore velocità: 1 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Il motore non si muove		Indicatore batteria: 3 LED Indicatore velocità: 1 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Cortocircuito freno		Indicatore batteria: 4 LED Indicatore velocità: 1 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Motore destro			
Errore di sistema 1		Indicatore batteria: 1 LED Indicatore velocità: 2 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Cavi dei freni elettromagnetici disconnessi o rotti		Indicatore batteria: 2 LED Indicatore velocità: 2 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Il motore non si muove		Indicatore batteria: 3 LED Indicatore velocità: 2 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Errore di sistema 2		Indicatore batteria: 4 LED Indicatore velocità: 2 LED	Controllare che tutti i cavi siano connessi correttamente
Errore software		Indicatore batteria: 4 LED Indicatore velocità: 2 LED	Contattare il rivenditore autorizzato

Joystick			
Joystick devia durante il tragitto		Indicatore batteria: 1 LED Indicatore velocità: 3 LED	Rilasciare il joystick e verificare che torni liberamente in posizione centrale. Spegnere la carrozzina, attendere alcuni secondi e riaccenderla senza toccare il joystick. Se l'anomalia persiste, contattare il rivenditore autorizzato.
Joystick disconnesso		Indicatore batteria: 2 LED Indicatore velocità: 3 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Scheda PCB			
Errore di campionamento della scheda		Indicatore batteria: 1 LED Indicatore velocità: 4 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Rottura del cavo di trasmissione		Indicatore batteria: 2 LED Indicatore velocità: 4 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Cortocircuito della scheda PCB		Indicatore batteria: 3 LED Indicatore velocità: 4 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Segnale di connessione perso		Indicatore batteria: 4 LED Indicatore velocità: 4 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Errore di azionamento elettromagnetico		Indicatore batteria: 5 LED Indicatore velocità: 4 LED	Contattare il rivenditore autorizzato
Errore di tensione			
Tensione della batteria troppo bassa		Indicatore batteria: 1 LED Indicatore velocità: 0 LED	Batteria scarica, ricaricare
Tensione della batteria troppo alta		Indicatore batteria: 5 LED Indicatore velocità: 0 LED	La tensione della batteria è eccessiva; spegnere immediatamente la carrozzina e contattare il rivenditore autorizzato.

23.1 Autodiagnosi

- Le luci del controller fungono anche da strumento diagnostico, lampeggiando secondo schemi che indicano problemi specifici;
- Se la spia indica un guasto, spegnere e riaccendere la carrozzina. Se il guasto non viene eliminato dopo la riaccensione, la spia ripete il messaggio di errore;
- Per individuare i possibili problemi e le relative soluzioni, consultare la seguente tabella;
- Se la procedura descritta non risolve il problema, contattare il rivenditore autorizzato.

25. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (EMI)

Alcuni dispositivi elettronici presenti nell'ambiente (come telefoni cellulari, antenne radio o sistemi di sicurezza nei negozi) possono interferire con il funzionamento della carrozzina elettrica.

Le interferenze possono causare:

- Movimenti involontari della carrozzina;
- Perdita di controllo;
- Disattivazione o sblocco involontario dei freni;
- Malfunzionamenti della centralina elettronica.



ATTENZIONE!

Non utilizzare dispositivi di comunicazione (es. telefoni cellulari, radio portatili) in prossimità della carrozzina in funzione.

- a) Evitare la vicinanza a potenti antenne radio o televisive.
- b) Non modificare il dispositivo né installare componenti non autorizzati.
- c) In caso di movimento involontario o comportamento anomalo:
 - spegnere immediatamente la carrozzina (OFF), se possibile in condizioni di sicurezza;
 - contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

Segnalare sempre eventuali anomalie, indicando se erano presenti dispositivi elettronici nelle vicinanze.

25.1 Compatibilità elettromagnetica

Tabella 1

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE — EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE		
Il dispositivo è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso venga usato in tale ambiente.		
Prove di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico-guida
Emissioni RF IEC 60601	Gruppo 1	Il dispositivo utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza con apparecchi elettronici vicini.
Emissioni RF IEC 60601	Classe B	Il dispositivo è adatto per l'uso in tutti gli edifici, compresi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta edifici destinati ad usi domestici.
Emissioni armoniche IEC 60601	Applicabile	
Emissioni di fluttuazioni di tensione/flicker IEC 60601	Conforme	

Tabella 2

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE — IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA			
Il dispositivo è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso venga usato in tale ambiente.			
Prove di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico-guida
Scariche elettrostatiche (ESD) - ISO 7176 IEC 60601	± 8 kV a contatto ± 15 kV in aria	± 8 kV a contatto ± 15 kV in aria	Informazioni valide sia per l'uso del dispositivo che per la fase di ricarica della batteria. I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%.
Transitori/treni elettrici veloci ISO 7176 IEC 60601	± 2 kV per linee di alimentazione di potenza ± 1 kV per linee di ingresso/uscita	± 2 kV per linee di alimentazione di potenza ± 1 kV per linee di ingresso/uscita	La qualità della tensione di rete, per la ricarica della batteria, dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero
Sovratensioni ISO 7176 IEC 60601	1 kV modo differenziale ± 2 kV modo comune	1 kV modo differenziale ± 2 kV modo comune	La qualità della tensione di rete, per la ricarica della batteria, dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni della tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione. ISO 7176 IEC 60601	<5% UT (>95% caduta di tensione in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60% caduta di tensione in UT) per 5 cicli 70% UT (30% caduta di tensione in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% caduta di tensione in UT) per 5 s.	<5% UT (>95% caduta di tensione in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60% caduta di tensione in UT) per 5 cicli 70% UT (30% caduta di tensione in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% caduta di tensione in UT) per 5 s.	La qualità della tensione di rete per la ricarica della batteria dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Campo magnetico frequenza di rete (50/60 Hz) ISO 7176 IEC 60601	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete dovrebbero avere livelli caratteristici di una località tipica in ambiente commerciale o ospedaliero. (Valido sia per l'uso del dispositivo che per la fase di ricarica della batteria).
NOTA: UT è la tensione di rete in c.a. prima dell'applicazione del livello di prova.			

Tabella 3

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE — IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA			
Il dispositivo è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utilizzatore deve garantire che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente.			
Prove di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico-guida
RF condotta ISO 7176 IEC 60601	3 V eff. Da 150 kHz a 80 MHz	3 V eff.	Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte, compresi i cavi, eccetto quando rispettano le distanze di separazione raccomandate calcolate dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanze di separazione raccomandate: d= 1,2√P d= 1,2√P da 80 MHz a 800 MHz d= 2,3√P da 800 MHz a 1,0 GHz d= 0,2 √P da 26 MHz a 800 MHz d= 0,4 √P da 800 MHz a 2,5 GHz durante le operazioni di ricarica ove "P" è la potenza massima nominale d'uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il fabbricante del trasmettitore e "d" è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L'intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un'indagine elettromagnetica del sito, potrebbe essere minore del livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza. Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo: 
RF irradiata ISO 7176 IEC 60601	3 V/m Da 0,15 MHz a 80 MHz 20 V/m Da 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m 20 V/m	
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più alto. NOTA 2: Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.			
^a Le intensità di campo per trasmettitori fissi, come le stazioni di base per i radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi per radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori a RF fissi si dovrebbe considerare un'indagine elettromagnetica sul sito. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui si utilizza il dispositivo supera il livello di conformità applicabile alla RF di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale. Se si notano prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, come un diverso orientamento o posizione. ^b Le intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbero essere inferiori a 3 V/m.			

Tabella 4

DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE TRA APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI					
Il dispositivo è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l'utilizzatore può contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) ed il caricabatterie durante la fase di carica e l'intero dispositivo durante il suo funzionamento come raccomandato di seguito, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.					
Prove	Distanza di separazione in relazione alla frequenza del trasmettitore m				
Potenza nominale di uscita massima del trasmettitore W		Per la fase di ricarica della batteria	Per la fase di ricarica della batteria	Durante l'utilizzo	Durante l'utilizzo
	da 150 mHz a 80 MHz d= 1,2√P	da 80 MHz a 800 MHz d= 1,2√P	da 800 MHz a 2,5 GHz d= 2,3 √P	da 26 MHz a 800 MHz d= 0,2 √P	da 800 kHz a 2,5 GHz d= 0,4√P
0,01	0,12	0,12	0,23	0,02	0,04
0,1	0,38	0,38	0,73	0,06	0,13
1	1,2	1,2	2,3	0,2	0,4
10	3,8	3,8	7,3	0,63	1,26
100	12	12	23	2	4
Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non riportata, la distanza di separazione raccomandata d, in metri (m), può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la massima potenza nominale d'uscita del trasmettitore, in watt (W), secondo il fabbricante del trasmettitore. NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più alto. NOTA 2: Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone					

26. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

26.1 Condizioni di smaltimento generali



In caso di smaltimento del dispositivo, non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso i centri comunali di raccolta o le isole ecologiche per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

26.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del dispositivo ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE:

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il dispositivo consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche, sul dispositivo è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.



26.3 Trattamento delle batterie esauste — Regolamento (UE) 2023/1542

Il simbolo riportato sul dispositivo, sulle batterie o sulla documentazione indica che le batterie non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurarsi che le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per maggiori informazioni circa lo smaltimento delle batterie esauste o del dispositivo è possibile contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti, oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.

27. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti contro difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del dispositivo, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del dispositivo e mancata osservanza delle linee guida e delle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del dispositivo è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni, lesioni personali o altre conseguenze derivanti da installazione, montaggio o utilizzo non conformi alle istruzioni riportate nel presente manuale. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, modifiche non autorizzate, danni di spedizione diversi da quelli derivanti dalla spedizione originale effettuata da Moretti, oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia i componenti soggetti a usura, se il danno è imputabile al normale utilizzo del dispositivo.

27.1 Garanzia delle batterie ricaricabili

Le batterie originali e quelle di ricambio sono coperte da una garanzia di 90 (novanta) giorni in relazione alle prestazioni e di 6 (sei) mesi in relazione a difetti di costruzione o secondo quanto richiesto dalle norme di legge.

27.2 Riparazioni

- Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un dispositivo Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del dispositivo è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del dispositivo possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

- Riparazione di un dispositivo non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un dispositivo non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno di ricevimento del dispositivo riparato.

- Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un dispositivo restituito, Moretti conclude che il dispositivo non è difettoso. Il dispositivo sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

28. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno di ricevimento del ricambio.

29. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre alcuna dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione di diritti di terzi e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del dispositivo Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

Consulta il nostro sito per l'ultima versione disponibile del manuale d'uso.

Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - 52022 Cavriglia (AR) - Italy
www.morettispa.com - info@morettispa.com
Made in P.R.C.