



MA RP540_RP545x_RP551 01 A_DE_07-2026

SCANNEN SIE DEN QR-CODE
FÜR WEITERE SPRACHEN



DE Aluminium-Rollator
BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

1. CODES.....	SEITE. 3
2. EINFÜHRUNG.....	SEITE. 3
3. VERWENDUNGSZWECK.....	SEITE. 3
4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	SEITE. 3
5. WARNUNGEN.....	SEITE. 4
5.1 Allgemeine Warnhinweise.....	seite. 4
5.2 Warnhinweise zur Verwendung.....	seite. 4
5.3 Stabilitätswarnungen.....	seite. 4
5.4 Warnhinweise zur Montage.....	seite. 4
6. VERWENDETE SYMBOLE.....	SEITE. 5
7. VOR JEDER VERWENDUNG.....	SEITE. 5
8. MONTAGEANLEITUNG.....	SEITE. 5
8.1 Vor der Montage.....	seite. 5
8.2 Montage Modell RP540.....	seite. 5
8.2.1 Schließen des Rollators.....	seite. 6
8.2.2 Griffe montieren und justieren.....	seite. 6
8.2.3 Installation der Aufbewahrungstasche.....	seite. 6
8.2.4 Sitz.....	seite. 6
8.2.5 Fußstützen.....	seite. 6
8.3 Montage Modell RP545.....	seite. 6
8.3.1 Schließen des Rollators.....	seite. 7
8.3.2 Griffe montieren und justieren.....	seite. 7
8.3.3 Installation der Aufbewahrungstasche.....	seite. 7
8.3.4 Sitz.....	seite. 7
8.4 Montage Modell RP551.....	seite. 7
8.4.1 Schließen des Rollators.....	seite. 8
8.4.2 Griffe montieren und justieren.....	seite. 8
8.4.3 Installation der Rückenlehne.....	seite. 8
8.4.4 Installation der Aufbewahrungstasche.....	seite. 8
8.4.5 Sitz.....	seite. 8
9. MODALITÄTEN DER NUTZUNG.....	SEITE. 9
10. BREMSEN.....	SEITE. 9
10.1 Benutzung der Bremse.....	seite. 9
10.2 Bremssperre (Feststellbremse).....	seite. 9
11. WARTUNG.....	SEITE. 9
12. REINIGUNG.....	SEITE. 9
13. PFLEGE DER RÄDER.....	SEITE. 9
14. TECHNISCHE DATEN.....	SEITE. 10
15. ALLGEMEINE ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN.....	SEITE. 10
16. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR.....	SEITE. 10
17. GARANTIE.....	SEITE. 10
17.1 Reparaturen.....	seite. 11
17.2 Ersatzteile.....	seite. 11
17.3 Freistellungsklauseln.....	seite. 11

CE Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. April 2017
über Medizinprodukte der Klasse I

1. CODES

RP540	Rollator aus Aluminium 4 Räder mit Sitz und Fußstützen GAYA 2.0
RP545G	Rollator aus Aluminium, 4 Räder, abnehmbar, mit Sitz, OCEANO 2.0 Grau
RP545L	Rollator aus Aluminium, 4 Räder mit Sitz, OCEANO 2.0 Lime
RP545R	Rollator aus Aluminium, 4 Räder mit Sitz, OCEANO 2.0 Rosa
RP545B	Rollator aus Aluminium, 4 Räder mit Sitz, OCEANO 2.0 Blau
RP545A	Rollator aus Aluminium, 4 Räder, abnehmbar, mit Sitz, OCEANO 2.0 Orange
RP545V	Rollator aus Aluminium, 4 Räder, abnehmbar, mit Sitz, OCEANO 2.0 Grün
RP551	Rollator aus Aluminium, 4 Räder mit Armstütze SATURNO

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Krankenhausrollator aus der Linie MOPEDIA by Moretti S.p.a. entschieden haben.

Die MOPEDIA-Rollatoren von Moretti S.p.a. sind so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Benutzung erfüllen. Diese Anleitung enthält kleine Tipps für den richtigen Umgang mit dem von Ihnen gewählten Produkt und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie den von Ihnen erworbenen Rollator benutzen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen helfen und Sie richtig beraten kann.

3. VERWENDUNGSZWECK

Dieser Rollator ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gedacht und kann als Hilfsprodukt verwendet werden, um das Gehen zu erleichtern. Der Rollator bietet mehr Stabilität, Halt und Sicherheit beim Gehen. Auf jeden Fall kann er nicht von Personen mit sichtbar schwacher Hand- und/oder Armfunktion und Personen mit Gleichgewichtsproblemen verwendet werden. Der Rollator kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden. Wir empfehlen den Einsatz nur auf Flächen, auf denen alle Räder den Boden berühren. Er sollte nicht auf felsigem Gelände oder schiefen Ebenen benutzt werden, da der Rollator instabil sein kann. Das Gerät ist nicht für den Transport von Personen oder anderem Material bestimmt.

WARNUNG!



- Es ist verboten, das folgende Produkt für andere Zwecke als die in dieser Anleitung definierten Zwecke zu verwenden.
- Moretti SpA übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts oder durch eine andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Verwendung entstehen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen, um dessen Funktionen zu verbessern.

4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MORETTI S.p.A. erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von MORETTI S.p.A. hergestellten und in Verkehr gebrachten Produkte, die zur Familie ROLLATOR - MOPEDIA gehören, den geltenden Bestimmungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745 vom 5. April 2017 entsprechen. Zu diesem Zweck garantiert und erklärt MORETTI SpA unter seiner alleinigen Verantwortung das Folgende:

1. Die betreffenden Produkte erfüllen die in Anhang I der Verordnung 2017/745 festgelegten allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen, wie sie in Anhang IV der oben genannten Verordnung vorgeschrieben sind.
2. Bei den betroffenen Produkten HANDELT ES SICH NICHT UM MESSGERÄTE.
3. Die betroffenen Produkte SIND NICHT FÜR KLINISCHE PRÜFUNGEN VORGESEHEN.
4. Diese Produkte werden in NICHT-STERILE-Verpackungen vermarktet.

5. Die betroffenen Produkte sind gemäß den Bestimmungen von Anhang VIII der vorgenannten Verordnung der Klasse I zuzuordnen.
6. MORETTI SpA bewahrt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der Verordnung 2017/745 auf und stellt sie den zuständigen Behörden mindestens 10 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum der letzten Charge zur Verfügung.

Anmerkung: Die vollständigen Produktcodes, die einmalige Registrierungsnummer („SRN“ – Single Registration Number) des Herstellers, die Basis-UDI-DI und etwaige Verweise auf verwendete Normen finden sich in der EU-Konformitätserklärung, die MORETTI SPA ausstellt und über seine Kanäle zur Verfügung stellt.

5. WARNUNGEN

5.1 Allgemeine Warnhinweise

- Installieren oder verwenden Sie das Produkt NICHT, bevor Sie diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen nicht verstehen können, wenden Sie sich an einen Arzt, Händler oder Servicetechniker, bevor Sie versuchen, das Produkt zu installieren, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden;
- Der Rollator darf nur von Patienten benutzt werden, deren motorische Fähigkeiten eine risikolose Nutzung gewährleisten;
- Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, um die Eignung des Produkts, die richtige Einstellung und Benutzung des Rollators zu bestimmen;
- Ihr Arzt oder Therapeut sollte Ihnen dabei helfen, die Höhe Ihres Rollators so einzustellen, dass er maximalen Halt bietet, die Bremsen richtig betätigt werden und insgesamt richtig zusammengebaut ist;
- Rollatoren sind nicht für den selbstfahrenden Gebrauch bestimmt;
- Der Benutzer bzw. Patient ist verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer bzw. Patient ansässig ist, zu melden.

5.2 Warnhinweise zur Verwendung

1. Achten Sie immer darauf, dass das Bremsseil richtig befestigt ist.
2. Um ein übermäßiges freies Spiel des Kabels zu vermeiden, überprüfen Sie nach jeder Höhenverstellung stets die ordnungsgemäße Funktion der Bremse.
3. Die Nichtbeachtung dieser einfachen Warnhinweise kann zu Personenschäden führen.
4. Der Rollator darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund benutzt werden. Benutzen Sie den Rollator nicht zum Treppensteigen!
5. Stützen Sie sich immer auf beide Hanteln, um das Gleichgewicht zu halten.
6. Achten Sie besonders auf nasse, vereiste oder schneebedeckte Oberflächen.
7. Überlasten Sie den Rollator nicht.
8. Verwenden Sie den Rollator-Sitz (sofern vorhanden) nicht zum Transport von Gütern oder Personen; Der Sitz ist für den Sitz des Anwenders bei angezogener Feststellbremse vorgesehen;
9. Um die richtige Balance des Rollators und maximale Sicherheit zu gewährleisten, müssen während der gesamten Benutzung alle Räder stets Bodenkontakt haben.
10. Vor der Benutzung des Sitzes muss die Feststellbremse angezogen werden.

N.B Wenn Sie den Rollator im Stand benutzen, muss die Feststellbremse arretiert sein.

5.3 Stabilitätswarnungen

- Der Rollator unterstützt eine Person mit einem Gewicht von bis zu 136 kg, einschließlich der Last der Tasche.
- Die Tasche/der Korb hat ein Höchstgewicht von 5 kg. Nicht überladen, um Unwucht und Kippgefahr zu vermeiden.

5.4 Warnhinweise zur Montage

- Nach dem Zusammenbau oder Aufklappen des Rollators vergewissern Sie sich, dass die Sitzstütze auf beiden Seiten eingerastet ist und prüfen Sie, ob die Sicherheitsvorrichtung in der richtigen Position befestigt ist.
- Überprüfen Sie, ob beide Griffstützrohre richtig in die Struktur eingesetzt und mit den

Feststelldrehknöpfen gesichert wurden, die mit den entsprechenden Flügelmuttern und Drehknöpfen ohne Bewegung in der Hauptstütze verriegelt sind.

- Hängen Sie nichts an den Rahmen des Rollators, um eine Verformung der Rohre und Stabilitätsverlust zu vermeiden.

Anmerkung: Achten Sie beim Öffnen und Schließen auf die Gefahr des Einklemmens von Fingern und/oder Kleidung.

6. VERWENDETE SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Produktidentifikation



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Produktionscharge



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.



Medizinprodukt



Entsorgungsbedingungen



Beladefähigkeit

7. VOR JEDER VERWENDUNG

Prüfen Sie dies immer, bevor Sie das Produkt benutzen:

- Dass alle Teile des Rollators sicher verriegelt sind;
- Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind;
- Stellen Sie sicher, dass der Sitz richtig verriegelt ist (sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie den Sitz weiter nach unten zum Rahmen hin);
- Prüfen Sie, ob die Sitzverriegelungsvorrichtung richtig eingerastet ist;
- Prüfen Sie die korrekte Funktion der normalen Bremse und der Feststellbremse;

8. MONTAGEANLEITUNG

8.1 Vor der Montage

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie, ob es während des Transports beschädigt worden ist. Wenn der Rollator beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den nächsten Händler.

8.2 Montage Modell RP540

- Der Rollator wird mit separat verpackten Fußstützen geliefert.
- Beim ersten Zusammenbau des Rollators sind die Griffe mit den Knöpfen noch nicht verbunden. Setzen Sie daher die beiden Rohre auf die vertikalen Stützen.



- Drücken Sie den Rollatorsitz so lange, bis die Rahmenrohre in der verriegelten Position einrasten.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass der Rollator nicht dazu neigt, unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft zusammenzuklappen.
- Montieren Sie die Fußstützen.



WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Drehknöpfe gut in den Löchern sitzen. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass der Rollator nicht dazu neigt, unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft zusammenzuklappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremskabel nicht verdrehen, wenn Sie den Lenker und die Räder verbinden.

8.2.1 Schließen des Rollators

Heben Sie den Gurt am Sitz energisch an, um den Rollator zu schließen.

8.2.2 Griffe montieren und justieren

Setzen Sie die Griffe in die Struktur ein. Drücken Sie den Federknopf und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite und vergewissern Sie sich, dass beide Griffe sicher verriegelt sind und sich auf gleicher Höhe befinden. Der Rollator ist mit höhenverstellbaren Griffen ausgestattet, um allen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.



VORSICHT!

Stellen Sie die Höhe des Rollators so ein, dass die Handgelenke des Benutzers, der mit den Armen an der Seite steht, auf Höhe der Griffe sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arme bei der Benutzung des Rollators in einem Winkel von ca. 20° - 30° gebogen sind.

8.2.3 Installation der Aufbewahrungstasche

Um die Aufbewahrungstasche zu befestigen, hängen Sie die Laschen der Tasche an die Sitzhalterung.



WARNUNG!

Beladefähigkeit der Tasche 5 kg. Überladen Sie nicht, um Unwucht und Kippgefahr zu vermeiden.

8.2.4 Sitz

Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen. Drehen Sie die Rückenlehne, falls erforderlich. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss sicher befestigt ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.



WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Wenn Sie sich sitzen drücken Sie nicht nur auf einer Seite.

8.2.5 Fußstützen



Setzen Sie die Fußstützen in die entsprechenden Stifte ein. Wenn sie nicht verwendet werden, lagern Sie sie wie in der Abbildung gezeigt und sichern Sie sie mit Clips.

8.3 Montage Modell RP545

- Drehen Sie das Rad in die richtige Richtung, lösen Sie den Riemen, der die Hinterräder blockiert, und arretieren Sie die Hinter- und Vorderräder mit den dafür vorgesehenen Knöpfen.
- Beim ersten Zusammenbau des Rollators sind die Griffe mit den Knöpfen noch nicht verbunden. Setzen Sie daher die beiden Rohre auf die vertikalen Stützen.



- Drücken Sie den Rollatorsitz so lange, bis die Rahmenrohre in der verriegelten Position einrasten, und verriegeln Sie dann den Sicherheitsclip.



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Drehknöpfe gut in den Löchern sitzen. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass der Rollator nicht dazu neigt, unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft zusammenzuklappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremskabel nicht verdrehen, wenn Sie den Lenker und die Räder verbinden.

DE

8.3.1 Schließen des Rollators

Heben Sie den Gurt am Sitz energisch an, um den Rollator zu schließen.

8.3.2 Griffe montieren und justieren

Setzen Sie die Griffe in die Struktur ein. Drücken Sie den Federknopf und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite und vergewissern Sie sich, dass beide Griffe sicher verriegelt sind und sich auf gleicher Höhe befinden. Der Rollator ist mit höhenverstellbaren Griffen ausgestattet, um allen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.



VORSICHT!

Stellen Sie die Höhe des Rollators so ein, dass die Handgelenke des Benutzers, der mit den Armen an der Seite steht, auf Höhe der Griffe sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arme bei der Benutzung des Rollators in einem Winkel von ca. 20° - 30° gebogen sind.

8.3.3 Installation der Aufbewahrungstasche

Hängen Sie zum Anbringen der Aufbewahrungstasche die Schlaufen der Tasche an die Sitzhalterung und befestigen Sie die Klettbänder am Rahmen.



WARNUNG!

Beladekapazität der Tasche 5 kg. Nicht überladen, um Unwucht und Kippgefahr zu vermeiden

8.3.4 Sitz

Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss sicher befestigt ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.



WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Wenn Sie sich sitzen drücken Sie nicht nur auf einer Seite.



8.4 Montage Modell RP551

- Lösen Sie die Sicherheitsverriegelung, falls diese eingerastet ist.
- Beim ersten Zusammenbau des Rollators sind die Griffe mit den Knöpfen noch nicht verbunden. Setzen Sie daher die beiden Rohre auf die vertikalen Stützen.
Drücken Sie den Rollatorsitz so lange, bis die Rahmenrohre in der verriegelten Position einrasten, und verriegeln Sie dann den Sicherheitsclip.



- Drehen Sie die Radständer und verriegeln Sie sie mit dem Stift, wie in der Abbildung gezeigt.



WARNUNG!

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass der Rollator nicht dazu neigt, unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft zusammenzuklappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremskabel nicht verdrehen, wenn Sie den Lenker und die Räder verbinden.

8.4.1 Schließen des Rollators

Heben Sie den Sitz kräftig an, um den Rollator zu schließen.

8.4.2 Griffe montieren und justieren

Setzen Sie die Griffe in die Struktur ein und verriegeln Sie sie ordnungsgemäß. Der Rollator ist mit Griffen ausgestattet, deren Höhe sich mithilfe von Einstellrädern anpassen lässt, um allen Bedürfnissen des Benutzers gerecht zu werden.



VORSICHT!

Stellen Sie die Höhe des Rollators so ein, dass die Handgelenke des Benutzers, der mit den Armen an der Seite steht, auf Höhe der Griffe sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arme bei der Benutzung des Rollators in einem Winkel von ca. 20° - 30° gebogen sind

8.4.3 Installation der Rückenlehne

Setzen Sie die Rückenlehne in die entsprechenden Kunststoffführungen am Rollatorrahmen ein.

8.4.4 Installation der Aufbewahrungstasche

Hängen Sie zum Anbringen der Aufbewahrungstasche die Schlaufen der Tasche an die Sitzhalterung und befestigen Sie die Klettbinden am Rahmen.



WARNUNG!

Beladefähigkeit der Tasche 5 kg. Überladen Sie nicht den Korb, um Unwucht und Kippgefahr zu vermeiden.

8.4.5 Sitz

Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen.

Stellen Sie sicher, dass der Verschluss sicher befestigt ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.



WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Sitzen Sie nicht nur auf einer Seite schiebend.

9. MODALITÄTEN DER NUTZUNG

- Beginnen Sie mit dem Schieben, wenn Sie mit beiden Händen an den Griffen stehen;
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Rollator benutzen, um die Gefahr des Ausrutschens zu vermeiden;
- Gehen Sie aufrecht mit dem Blick nach vorne, nicht nach unten;

- Schieben Sie den Rollator nicht zu weit vom Körper weg, da dies zu Stürzen und unzureichender Belastung führen kann;
- Benutzen Sie den Rollator nicht zum Überwinden von Stufen, die höher als 20 mm sind;
- Bei der Verwendung im Freien sollten die Untergründe entsprechend den Vorschriften für die Beseitigung architektonischer Barrieren vorbereitet sein;
- Um kleine Hindernisse zu überwinden, können Sie den Rollator mit den hinteren Trittbrettern vorne anheben (Nur Modelle RP540 - RP545 - RP551)

10. BREMSEN

Das einwandfreie Funktionieren der Bremsen hängt von der Abnutzung und dem Schmutz ab, der sich auf den Rädern angesammelt hat. Überprüfen Sie den Zustand der Bremsen und Räder vor jeder Benutzung.

DE

10.1 Benutzung der Bremse

Zum Bremsen des Rollators ziehen Sie die Bremshebel mit den Fingern nach oben, bis der Rollator langsamer wird oder anhält. Um den Rollator weiter zu bewegen, lösen Sie die Bremsgriffe.

10.2 Bremssperre (Feststellbremse)

Drücken Sie mit der Handfläche auf die Bremshebel. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, sind die Räder blockiert. Heben Sie die Bremsgriffe an, um sie aus der Stopp-Position zu lösen.



WARNUNG!

Wenn der Anwender stillsteht, müssen die Bremsen blockiert sein.

11. WARTUNG

Die Produkte der Linie **MOPEDIA** by Moretti S.p.A. werden bei ihrer Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem CE-Zeichen versehen. Zur Sicherheit des Patienten und des Arztes wird empfohlen, die Eignung Ihres Rollators mindestens alle 2 Jahre durch den Hersteller oder ein autorisiertes Labor überprüfen zu lassen. Im Falle von Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

Die Lebensdauer des Produkts hängt von Verwendung, Wartung, Lagerung und Reinigung ab.

12. REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung der Teile nur ein feuchtes Tuch mit neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Metallbürsten oder scheuernde bzw. scharfe Gegenstände, da diese das Produkt beschädigen können.

13. PFLEGE DER RÄDER

1. Reinigen Sie die Räder mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch trocken.
2. Schmieren Sie die Räder regelmäßig ab.

14. TECHNISCHE DATEN

Serie GAYA 2.0										
Produktcode		RP540								
Sitzplatz		45x31 cm								
Struktur		Aluminium								
Abmessungen* und Gewichte										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg

Serie OCEANO 2.0 SATURNO										
Produktcode		RP545					RP551			
Sitzplatz		45x20 cm					44x24 cm			
Struktur		Aluminium								
Abmessungen* und Gewichte										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115÷130 Anti-Brachial-Stütze 100÷115	61	68	52	28	7,9	25		

*Die Maße sind in cm angegeben und können um ± 0,5 cm variieren.

15. ALLGEMEINE ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN

Entsorgen Sie das Produkt niemals über den normalen Hausmüll. Es wird empfohlen, das Produkt über die kommunalen Umweltinseln für das geplante Recycling der verwendeten Materialien zu entsorgen.

16. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör finden Sie im Gesamtkatalog von Moretti S.p.A.

17. GARANTIE

Alle Moretti-Produkte werden für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab dem Verkaufsdatum des Produkts gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisungen. Die korrekte Verwendung des Produkts ist in der Gebrauchsanweisung angegeben.

Moretti haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder andere Folgen, die durch die Installation und/oder den Gebrauch des Produkts entstehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchsanleitungen nicht genau befolgt werden.

Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Defekte unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, nicht autorisierte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung (falls zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte

Änderungen, Transportschäden (mit Ausnahme des Originalversands von Moretti) oder Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung angegebenen Wartungsarbeiten. Verschleißteile fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden auf den normalen Gebrauch des Produkts zurückzuführen ist.

17.1 Reparaturen

Reparatur im Rahmen der Garantie: Wenn ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler durch die Garantie abgedeckt ist. Moretti kann nach eigenem Ermessen den Artikel im Rahmen der Garantie ersetzen oder reparieren, entweder bei einem Moretti-Händler oder in den eigenen Räumlichkeiten. Die Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur des Produkts können von Moretti übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur in den Bereich der Garantie fällt. Durch die Reparatur oder den Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

Reparatur eines Produkts, das nicht durch die Garantie abgedeckt ist: Ein Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung durch den Moretti-Kundendienst zur Reparatur zurückgegeben werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, gehen vollständig zu Lasten des Kunden bzw. des Händlers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag, an dem das reparierte Produkt erhalten wurde.

Nicht mangelhafte Produkte: Der Kunde wird benachrichtigt, wenn Moretti nach der Untersuchung und Prüfung eines zurückgesandten Produkts zu dem Schluss kommt, dass das Produkt nicht defekt ist. Das Produkt wird an den Kunden zurückgeschickt und der Kunde ist für die Rücksendekosten verantwortlich.

17.2 Ersatzteile

Originalersatzteile von MORETTI haben eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag des Erhalts des Ersatzteils.

17.3 Freistellungsklauseln

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist und soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Moretti keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen, einschließlich jeglicher Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen hinsichtlich der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung des Gesetzes und Nichteinmischung. Moretti garantiert nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird. Die Dauer der stillschweigenden Garantien, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben können, ist auf die Garantiezeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beschränkt. In einigen Staaten oder Ländern sind Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Verbraucherprodukten nicht zulässig. In solchen Staaten oder Ländern gelten bestimmte Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne Vorankündigung geändert werden.



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com