



SKENIRAJTE QR KOD
ZA VIŠE JEZIKA



HR **Aluminijski rolator**
UPUTE ZA UPORABU



SADRŽAJ

1. ŠIFRE	STR. 3
2. UVOD	STR. 3
3. NAMJENA	STR. 3
4. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	STR. 3
5. UPOZORENJA	STR. 4
5.1 Opća upozorenja	str. 4
5.2 Upozorenja za uporabu	str. 4
5.3 Upozorenja o stabilnosti	str. 4
5.4 Upozorenja za sastavljanje	str. 4
6. KORIŠTENI SIMBOLI	STR. 5
7. PRIJE SVAKE UPORABE	STR. 5
8. UPUTE ZA SASTAVLJANJE	STR. 5
8.1 Prije sastavljanja	str. 5
8.2 Sastavljanje modela RP540	str. 5
8.2.1 Sklapanje rolatora	str. 6
8.2.2 Ugradnja ručki i podešavanje rukohvata	str. 6
8.2.3 Postavljanje torbe za odlaganje	str. 6
8.2.4 Sjedalo	str. 6
8.2.5 Oslonci za noge	str. 6
8.3 Sastavljanje modela RP545	str. 6
8.3.1 Sklapanje rolatora	str. 7
8.3.2 Ugradnja ručki i podešavanje rukohvata	str. 7
8.3.3 Postavljanje torbe za odlaganje	str. 7
8.3.4 Sjedalo	str. 7
8.4 Sastavljanje modela RP551	str. 7
8.4.1 Sklapanje rolatora	str. 8
8.4.2 Ugradnja ručki i podešavanje rukohvata	str. 8
8.4.3 Postavljanje lednog naslona	str. 8
8.4.4 Postavljanje torbe za odlaganje	str. 8
8.4.5 Sjedalo	str. 8
9. NAČIN UPORABE	STR. 9
10. KOČNICE	STR. 9
10.1 Uporaba kočnice	str. 9
10.2 Blokiranje kočnice (parkirna kočnica)	str. 9
11. ODRŽAVANJE	STR. 9
12. ČIŠĆENJE	STR. 9
13. ODRŽAVANJE KOTAČA	STR. 9
14. TEHNIČKE ZNAČAJKE	STR. 10
15. OPĆI UVJETI ZBRINJAVANJA	STR. 10
16. REZERVNI DIJELOVI/PRIBOR	STR. 10
17. JAMSTVO	STR. 10
17.1 Popravci	str. 11
17.2 Rezervni dijelovi	str. 11
17.3 Odricanje od odgovornosti	str. 11



Medicinski proizvod razreda I
UREDBA (EU) 2017/745 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima

1. ŠIFRE

RP540	Aluminijski rolator s 4 kotača, sjedalom i osloncima za noge GAYA 2.0
RP545G	Rastavljivi aluminijski rolator s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0 - sivi
RP545L	Aluminijski rolator s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0 - boja limete
RP545R	Aluminijski rolator s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0 - ružičasti
RP545B	Aluminijski rolator s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0 - plavi
RP545A	Rastavljivi aluminijski rolator s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0 - narančasti
RP545V	Rastavljivi aluminijski rolator s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0 - zeleni
RP551	Aluminijski rolator s 4 kotača i podlaktičnim osloncima SATURNO

2. UVOD

Hvala vam što ste odabrali rolator iz linije MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A.

Rolatori MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. projektirani su i proizvedeni kako bi zadovoljili sve vaše potrebe za praktičnom, pravilnom i sigurnom uporabom. Ove upute sadrže korisne preporuke za pravilnu uporabu odabranog proizvoda i važne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe kupljenog rolatora preporučuje se pažljivo pročitati ove upute u cijelosti. U slučaju nedoumice obratite se prodavatelju, koji će vam pružiti odgovarajuću pomoć i savjet.

3. NAMJENA

Ovaj rolator namijenjen je osobama smanjene pokretljivosti i može se koristiti kao pomagalo za lakše hodanje. Rolator pruža veću stabilnost, potporu i sigurnost tijekom hodanja. Ne smiju ga koristiti osobe sa znatno oslabljenom funkcijom šake i/ili ruke ni osobe s poremećajima ravnoteže. Rolator se može koristiti i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Koristite ga samo na površinama na kojima su svi kotači u dodiru s tlom. Ne smije se koristiti na kamenitom terenu ili na kosim površinama jer rolator može postati nestabilan. Proizvod nije namijenjen prijevozu osoba ni materijala.

HR

UPOZORENJE!



- Zabranjena je uporaba ovog proizvoda u svrhe koje nisu navedene u ovim uputama.
- Moretti S.p.A. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom proizvoda ili uporabom koja nije u skladu s ovim uputama.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene proizvoda i ovih uputa bez prethodne obavijesti radi poboljšanja njihovih značajki.

4. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

MORETTI SpA izjavljuje pod isključivom odgovornošću da su proizvodi koje proizvodi i stavlja na tržište MORETTI SpA, a pripadaju skupini ROLATORI - MOPEDIA, sukladni primjenjivim odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017. U tu svrhu MORETTI SpA pod vlastitom isključivom odgovornošću jamči i izjavljuje sljedeće:

1. Predmetni proizvodi ispunjavaju opće zahtjeve sigurnosti i učinkovitosti iz Priloga I. Uredbi (EU) 2017/745, kako je propisano Prilogom IV. navedene Uredbe.
2. Predmetni proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Predmetni proizvodi NISU NAMIJENJENI KLINIČKIM ISPITIVANJIMA.
4. Predmetni proizvodi stavljaju se na tržište u NESTERILNOM pakiranju.
5. Predmetni proizvodi pripadaju razredu I u skladu s Prilogom VIII. navedene Uredbe.

6. MORETTI SpA čuva i stavlja nadležnim tijelima na raspolaganje tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom (EU) 2017/745 najmanje 10 godina od datuma proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpune šifre proizvoda, jedinstveni registracijski broj proizvođača (SRN), osnovni UDI-DI i eventualna upućivanja na primijenjene norme navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju MORETTI SPA izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. UPOZORENJA

5.1 Opća upozorenja

- NE sastavljajte niti koristite proizvod prije nego što pročitate i razumijete ove upute. Ako ne razumijete upozorenja, mjere opreza i upute, prije sastavljanja proizvoda obratite se zdravstvenom radniku, prodavatelju ili tehničkom osoblju kako biste izbjegli oštećenja i tjelesne ozljede;
- Rolator smiju koristiti samo pacijenti s odgovarajućim motoričkim sposobnostima koje omogućuju njegovu sigurnu uporabu;
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom radi utvrđivanja prikladnosti proizvoda te pravilnog podešavanja i uporabe rolatora;
- Liječnik ili terapeut treba pomoći pri podešavanju visine rolatora kako bi se osigurali najveća potpora, pravilno aktiviranje kočnica i pravilno sastavljanje;
- Rolatori nisu namijenjeni samostalnom pogonu;
- Korisnik i/ili pacijent moraju svaki ozbiljan štetni događaj povezan s proizvodom prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju poslovni nastan.

5.2 Upozorenja za uporabu

1. Uvijek provjerite je li sjajla kočnice pravilno pričvršćena.
2. Nakon svakog podešavanja visine provjerite rade li kočnice ispravno i je li sjajla bez prevelikog slobodnog hoda ili savijanja.
3. Nepoštivanje ovih jednostavnih upozorenja može dovesti do tjelesnih ozljeda.
4. Rolator se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Ne koristite rolator za penjanje stepenicama!
5. Uvijek se oslanjajte na oba rukohvata kako biste održali ravnotežu.
6. Obratite posebnu pozornost na mokre, zaleđene ili snježne površine.
7. Nemojte preoptereti rolator.
8. Sjedalo rolatora (ako postoji) ne koristite za prijevoz predmeta ili osoba; sjedalo je namijenjeno korisniku samo kada je parkirna kočnica aktivirana;
9. Tijekom uporabe svi kotači moraju uvijek biti u dodiru s tlom kako bi se osigurali pravilna ravnoteža rolatora i najveća sigurnost.
10. Parkirna kočnica mora biti aktivirana prije korištenja sjedala.

NAPOMENA: Kada rolator miruje, parkirna kočnica mora biti aktivirana.

5.3 Upozorenja o stabilnosti

- Rolator pruža potporu osobi mase do 136 kg, uključujući sadržaj torbe.
- Najveća dopuštena masa sadržaja torbe/košare iznosi 5 kg. Ne preopterećujte kako biste izbjegli neravnotežu i rizik od prevrtanja.

5.4 Upozorenja za sastavljanje

- Nakon sastavljanja ili rasklapanja rolatora provjerite je li nosač sjedala blokiran s obje strane i je li sigurnosni mehanizam pravilno pričvršćen.
- Provjerite jesu li obje potporne cijevi ručki pravilno umetnute u okvir i učvršćene zapornim kotačićima, krilnim maticama i ručicama tako da nema zazora.
- Ne vješajte predmete na okvir rolatora jer bi se cijevi mogle deformirati i stabilnost proizvoda smanjiti.

Slike su samo u ilustrativne svrhe

Napomena: Pazite da ne priključite prste i/ili odjeću tijekom otvaranja i zatvaranja.

6. KORIŠTENI SIMBOLI



Šifra proizvoda



Jedinstvena identifikacija proizvoda



Oznaka CE



Proizvođač



Broj serije



Pročitajte upute za uporabu



Medicinski proizvod



Uvjeti zbrinjavanja



Najveća nosivost

7. PRIJE SVAKE UPORABE

Prije uporabe proizvoda uvijek provjerite:

- Provjerite jesu li svi dijelovi rolatora sigurno blokirani;
- Provjerite jesu li svi vijci pravilno zategnuti;
- Provjerite je li sjedalo pravilno blokirano (ako nije, snažno ga pritisnite prema dolje, prema okviru);
- Provjerite je li mehanizam za blokiranje sjedala pravilno aktiviran;
- Provjerite rade li radna i parkirna kočnica ispravno;

HR

8. UPUTE ZA SASTAVLJANJE

8.1 Prije sastavljanja

Raspakirajte proizvod i provjerite je li tijekom prijevoza oštećen. U slučaju da je rolator oštećen, obratite se najbližem prodavatelju.

8.2 Sastavljanje modela RP540

- Rolator se isporučuje s osloncima za noge koji su zasebno zapakirani.
- Pri prvom sastavljanju rolatora ručke sa zapornim kotačićima nisu spojene; umetnite dvije cijevi u okomite nosače.



- Pritisnite sjedalo rolatora dok cijevi okvira ne dosegnu blokirani položaj.
- Prije uporabe uvijek provjerite da se rolator ne sklapa pod djelovanjem male bočne sile.
- Ugradite oslonce za noge.



UPOZORENJE! Provjerite jesu li zaporni kotačići pravilno umetnuti u otvore.

Prije uporabe uvijek provjerite da se rolator ne zatvara pod utjecajem male bočne sile. Pri spajanju rukohvata i kotača pazite da se sajle kočnica ne zapletu.

8.2.1 Sklapanje rolatora

Snažno povucite remen na sjedalu prema gore kako biste sklopili rolator.

8.2.2 Ugradnja ručki i podešavanje rukohvata

Umetnite ručke u okvir. Pritisnite opružni gumb i postavite željenu visinu. Ponovite za suprotnu stranu i provjerite jesu li obje ručke sigurno zaključane i na istoj visini. Rolator ima ručke podesive po visini kako bi se prilagodio potrebama korisnika.



UPOZORENJE!

Podesite visinu rolatora tako da zapešća korisnika koji stoji s rukama uz tijelo budu u visini rukohvata. Tako će pri uporabi rolatora ruke biti savijene pod kutom od približno 20° do 30°.

8.2.3 Postavljanje torbe za odlaganje

Za postavljanje torbe objesite njezine ušice na nosač sjedala.



UPOZORENJE!

Najveća nosivost torbe iznosi 5 kg. Ne preopterećujte kako biste izbjegli neravnotežu i rizik od prevrtanja.

HR

8.2.4 Sjedalo


Prije sjedanja postavite rolator na ravnu i čvrstu površinu te aktivirajte kočnice. Po potrebi zakrenite leđni naslon. Provjerite je li zaporni element pravilno učvršćen i je li rolator stabilan.



UPOZORENJE!

Sjednite tako da masu ravnomjerno rasporedite po cijelom sjedalu. Ne sjedajte oslanjajući se samo na jednu stranu.

8.2.5 Oslonci za noge

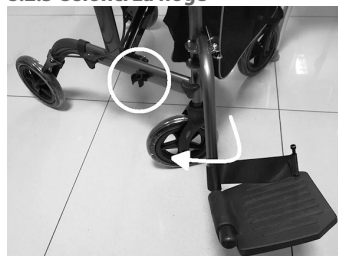

Umetnite oslonce za noge u odgovarajuće klinove. Ako se ne koriste, spremite ih kao što je prikazano na slici i pričvrstite ih kopčama.

8.3 Sastavljanje modela RP545

- Okrenite kotače u pravilan položaj, otpustite remen koji drži stražnje kotače i učvrstite prednje i stražnje kotače priloženim zapornim kotačićima.
- Prilikom prvog sastavljanja rolatora, ručke s gumbima neće biti spojene, stoga umetnite dvije cijevi na okomite nosače.



- Pritisnite sjedalo rolatora dok cijevi okvira ne dosegnu blokirani položaj, a zatim učvrstite sigurnosnu kopču.



UPOZORENJE!

Provjerite jesu li zaporni kotačići pravilno umetnuti u otvore. Prije uporabe uvijek provjerite da se rolator ne zatvara pod utjecajem male bočne sile. Pri spajanju rukohvata i kotača pazite da se sajle kočnica ne zapletu.

8.3.1 Sklapanje rolatora

Snažno povucite remen na sjedalu prema gore kako biste sklopili rolator.

8.3.2 Ugradnja ručki i podešavanje rukohvata

Umetnite ručke u okvir. Pritisnite opružni gumb i postavite željenu visinu. Ponovite za suprotnu stranu i provjerite jesu li obje ručke sigurno zaključane i na istoj visini. Rolator ima ručke podesive po visini kako bi se prilagodio potrebama korisnika.



UPOZORENJE!

Podesite visinu rolatora tako da zapešća korisnika koji stoji s rukama uz tijelo budu u visini rukohvata. Tako će pri uporabi rolatora ruke biti savijene pod kutom od približno 20° do 30°.

8.3.3 Postavljanje torbe za odlaganje

Za postavljanje torbe objesite njezine ušice na nosač sjedala i pričvrstite čičak-trake za okvir.



UPOZORENJE!

Najveća nosivost torbe iznosi 5 kg. Ne preopterećujte kako biste izbjegli neravnotežu i rizik od prevrtanja.

8.3.4 Sjedalo

Prije sjedanja postavite rolator na ravnu i čvrstu površinu te aktivirajte kočnice. Provjerite je li zaporni element pravilno učvršćen i je li rolator stabilan.



UPOZORENJE!


Sjednite tako da masu ravnomjerno rasporedite po cijelom sjedalu. Ne sjedajte oslanjajući se samo na jednu stranu.

8.4 Sastavljanje modela RP551

- Otpustite sigurnosnu blokadu ako je aktivirana.
- Pri prvom sastavljanju rolatora ručke sa zapornim kotačićima nisu spojene; umetnite dvije cijevi u okomite nosače.



- Pritisnite sjedalo rolatora dok cijevi okvira ne dosegnu blokirani položaj, a zatim učvrstite sigurnosnu kopču.

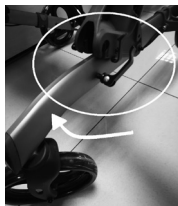

- Zakrenite nosače kotača i blokirajte ih klinom kao na slici.



UPOZORENJE!

Prije uporabe uvijek provjerite da se rolator ne zatvara pod utjecajem male bočne sile. Pri spajanju rukohvata i kotača pazite da se sajle kočnica ne zapletu.

8.4.1 Sklapanje rolatora

Snažno podignite sjedalo kako biste sklopili rolator.

8.4.2 Ugradnja ručki i podešavanje rukohvata

Umetnite ručke u okvir i pravilno ih blokirajte. Rolator ima ručke podesive po visini pomoću steznih kotačića kako bi se prilagodio potrebama korisnika.



UPOZORENJE!

Podesite visinu rolatora tako da zapešća korisnika koji stoji s rukama uz tijelo budu u visini rukohvata. Tako će pri uporabi rolatora ruke biti savijene pod kutom od približno 20° do 30°.

8.4.3 Postavljanje leđnog naslona

Umetnite leđni naslon u odgovarajuće plastične vodilice na okviru rolatora.

8.4.4 Postavljanje torbe za odlaganje

Za postavljanje torbe objesite njezine ušice na nosač sjedala i pričvrstite čičak-trake za okvir.



UPOZORENJE!

Najveća nosivost torbe iznosi 5 kg. Ne preopterećujte košaru kako biste izbjegli neravnotežu i rizik od prevrtanja.

8.4.5 Sjedalo

Prije sjedanja postavite rolator na ravnu i čvrstu površinu te aktivirajte kočnice. Provjerite je li zaporni element pravilno učvršćen i je li rolator stabilan.

**UPOZORENJE!**

Sjednite tako da masu ravnomjerno rasporedite po cijelom sjedalu. Ne sjedajte oslanjajući se samo na jednu stranu.

9. NAČIN UPORABE

- Počnite gurati rolator tek kada stojite uspravno i objema rukama držite rukohvate;
- Prije uporabe rolatora provjerite jesu li vam ruke suhe kako biste spriječili klizanje;
- Hodajte uspravno i gledajte prema naprijed, a ne prema dolje;
- Ne gurajte rolator predaleko od tijela jer to može uzrokovati pad i nepravilno opterećenje;
- Ne koristite rolator za svladavanje stuba viših od 20 mm;
- Pri uporabi na otvorenom koristite nogostupe uređene u skladu s propisima o uklanjanju arhitektonskih prepreka;
- Za svladavanje malih prepreka pritisnite stražnje poluge za naginjanje kako biste podigli prednji dio rolatora (samo modeli RP540, RP545 i RP551).

10. KOČNICE

Ispravan rad kočnica ovisi o istrošenosti i nakupljenoj prljavštini na kotačima. Prije svake uporabe provjerite stanje kočnica i kotača.

10.1 Uporaba kočnice

Za kočenje rolatora, prstima povucite ručice kočnice prema gore dok se rolator ne uspori ili zaustavi. Za nastavak kretanja otpustite ručice kočnica.

10.2 Blokiranje kočnice (parkirna kočnica)

Dlanom pritisnite ručice kočnica prema dolje. Kada začujete „klik“, kotači su blokirani. Podignite ručice kočnica kako biste otpustili parkirnu kočnicu.

HR

**UPOZORENJE!**

Kada korisnik miruje, kočnice moraju biti blokirane.

11. ODRŽAVANJE

Proizvodi iz linije **MOPEDIA** tvrtke Moretti S.p.A. pažljivo se pregledavaju i označavaju oznakom CE prije stavljanja na tržište. Radi sigurnosti korisnika i zdravstvenog osoblja preporučuje se da proizvođač ili ovlašteni laboratorij najmanje svake 2 godine provjeri prikladnost rolatora za uporabu. U slučaju popravaka, smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i pribor.

Vijek uporabe proizvoda ovisi o načinu uporabe, održavanju, skladištenju i čišćenju.

12. ČIŠĆENJE

Za čišćenje dijelova koristite samo vlažnu krpu s neutralnim deterdžentima. Ne koristite deterdžente koji sadrže otapala i metalne četke ili abrazivne ili oštre predmete, jer bi mogli oštetiti proizvod.

13. ODRŽAVANJE KOTAČA

1. Očistite kotače toplom vodom i neutralnim deterdžentom. Osušite čistom krpom.
2. Povremeno podmažite kotače.

14. TEHNIČKE ZNAČAJKE

Serija GAYA 2.0										
Šifra proizvoda	RP540									
Sjedalo	45x31 cm									
Okvir	Aluminij									
Dimenzije* i mase										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg
Serija OCEANO 2.0 SATURNO										
Šifra proizvoda	RP545					RP551				
Sjedalo	45x20 cm					44x24 cm				
Okvir	Aluminij									
Dimenzije* i mase										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115+130 Podlaktični oslonac 100+115	61	68	52	28	7,9	25		

* Mjere su izražene u cm i mogu odstupati za ± 0,5 cm.

15. OPĆI UVJETI ZBRINJAVANJA

Pri zbrinjavanju proizvoda ne odlažite ga u uobičajeni sustav prikupljanja krutog komunalnog otpada. Preporučuje se predati proizvod u općinsko reciklažno dvorište radi odgovarajuće reciklaže upotrijebljenih materijala.

16. REZERVNI DIJELOVI/PRIBOR

Za rezervne dijelove i pribor pogledajte glavni katalog tvrtke Moretti S.p.A.

17. JAMSTVO

Za sve proizvode Moretti vrijedi jamstvo za nedostatke u materijalu ili izradi u trajanju od 2 (dvije) godine od datuma prodaje proizvoda, uz iznimke i ograničenja navedena u nastavku. Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju nepravilne uporabe, zlouporabe ili preinake proizvoda te nepridržavanja uputa za uporabu. Pravilna namjena proizvoda navedena je u uputama za uporabu.

Moretti ne odgovara za nastalu štetu, tjelesne ozljede ni druge posljedice uzrokovane ugradnjom i/ili uporabom opreme koja nije strogo u skladu s uputama za ugradnju, sastavljanje i uporabu.

Jamstvo za proizvode Moretti ne obuhvaća oštećenja ili nedostatke nastale u sljedećim okolnostima: prirodne nepogode, neovlašteno održavanje ili popravci, oštećenja uzrokovana problemima s električnim napajanjem (ako je predviđeno), uporaba dijelova ili komponenti koje nije isporučio Moretti, nepridržavanje smjernica i uputa za uporabu, neovlaštene preinake, oštećenja tijekom prijevoza (osim izvorne otpreme tvrtke Moretti) ili neizvršavanje održavanja kako je navedeno u uputama. Ovo jamstvo ne obuhvaća potrošne dijelove ako je oštećenje posljedica uobičajene uporabe proizvoda.

17.1 Popravci

Popravak u jamstvenom roku: Ako se tijekom jamstvenog roka na proizvodu Moretti pojave nedostaci u materijalu ili izradi, Moretti će zajedno s kupcem utvrditi je li nedostatak obuhvaćen jamstvom. Moretti može prema vlastitoj procjeni zamijeniti ili popraviti proizvod obuhvaćen jamstvom kod određenog prodavatelja Moretti ili u vlastitom sjedištu. Moretti može snositi troškove rada povezane s popravkom proizvoda ako se utvrdi da je popravak obuhvaćen jamstvom. Popravkom ili zamjenom jamstvo se ne obnavlja niti produljuje.

Popravak proizvoda koji nije obuhvaćen jamstvom: Proizvod koji nije obuhvaćen jamstvom može se vratiti radi popravka samo nakon prethodnog odobrenja korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave povezane s popravkom koji nije obuhvaćen jamstvom u cijelosti snosi kupac ili prodavatelj. Za popravke proizvoda koji nisu obuhvaćeni jamstvom vrijedi jamstvo od 6 (šest) mjeseci od dana primitka popravljenog proizvoda.

Proizvodi bez nedostataka: Kupac će biti obaviješten ako Moretti nakon pregleda i ispitivanja vraćenog proizvoda utvrdi da proizvod nema nedostataka. Proizvod će biti vraćen kupcu, koji snosi troškove povratne dostave.

17.2 Rezervni dijelovi

Originalni MORETTI rezervni dijelovi imaju jamstvo od 6 (šest) mjeseci od dana primitka rezervnog dijela.

HR

17.3 Odricanje od odgovornosti

Osim onoga što je izričito navedeno u ovom jamstvu i u granicama dopuštenima zakonom, Moretti ne daje nikakve druge izričite ni prešutne izjave, jamstva ili uvjete, uključujući izjave, jamstva ili uvjete utrživosti, prikladnosti za određenu namjenu, nekršenja prava i neometanja. Moretti ne jamči da će uporaba proizvoda Moretti biti neprekidna ili bez pogrešaka. Trajanje eventualnih prešutnih jamstava propisanih zakonom ograničeno je na jamstveni rok, u granicama dopuštenima zakonom. Neke države ili zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja prešutnog jamstva niti isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete povezane s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama neka isključenja ili ograničenja ovog jamstva možda se ne primjenjuju na korisnika. Ovo jamstvo može se izmijeniti bez prethodne obavijesti.



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com