



Cadeiras de rodas Ardea One

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PAG.3
5. AVISOS GERAIS	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.5
7.1 Vista e lista das peças	pag. 5
8. MONTAGEM/DESMONTAGEM.....	PAG.5
8.1 Abertura	pag. 5
8.2 Fecho	pag. 6
8.3 Montagem/desmontagem dos apoios de braços.....	pag. 6
8.4 Montagem/desmontagem dos apoios de pés laterais ou elevatórios	pag. 6
8.5 Regulação dos apoios de pés laterais	pag. 7
8.6 Regulação dos apoios de pés elevatórios (OPCIONAL)	pag. 7
8.7 Montagem/desmontagem das rodas traseiras pequenas (apenas para mod. GO!)	pag. 7
8.8 Regulação dos travões com rodas traseiras pequenas (apenas para mod. GO!)	pag. 8
8.9 Montagem/desmontagem das rodas traseiras grandes (apenas para modelos START/START2 e START3).....	pag. 8
8.10 Regulação dos travões com rodas traseiras grandes (apenas para modelos START/START2 e START3).....	pag. 8
9. ANTES DA UTILIZAÇÃO	PAG.9
10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO	PAG.9
11. MODO DE UTILIZAÇÃO.....	PAG.9
11.1 Sentar-se na cadeira de rodas.....	pag. 9
11.2 Sair da cadeira de rodas.....	pag. 9
11.3 Degraus e desníveis (conselhos sobre a melhor forma de vencer estes obstáculos por si só).....	pag. 9
11.4 Utilização dos apoios de braços.....	pag. 10
11.5 Utilização das rodas de autopropulsão	pag. 10
11.6 Utilização das rodas pequenas	pag. 10
11.7 Utilização de rodas pequenas para passagens estreitas (de série nos modelos com desengate rápido)	pag. 10
11.8 Transporte em meios de transporte.....	pag. 10
12. MANUTENÇÃO	PAG.11
13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO.....	PAG.11
13.1 Limpeza dos revestimentos e estofos	pag. 11
13.2 Limpeza do quadro e das peças metálicas	pag. 11
13.3 Limpeza das rodas e dos travões.....	pag. 11
13.4 Desinfecção	pag. 11
14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.11
15. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS	PAG.11
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.12
16.1. Dimensões.....	pag. 12
16.2 Especificações técnicas.....	pag. 13
17. GARANTIA.....	PAG.13
17.1 Reparações	pag. 13
17.2 Peças de reposição.....	pag. 14
17.3 Cláusulas de exoneração	pag. 14

CE Dispositivo médico de classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

CP100B-xx	Série START com rodas de 60 cm - Dobrável de autopropulsão
CP100R-xx	Série START com rodas de 60 cm - Dobrável de autopropulsão
CP103R-xx	Série START2 com rodas de 60 cm - Dobrável de autopropulsão
CP103B-xx	Série START2 com rodas de 60 cm - Dobrável de autopropulsão
CP104-xx	Série START3 com rodas de 60 cm - Dobrável de autopropulsão, dupla cruzeta, duplo furo
CP105-xx	Série START3 GO! com rodas de 30 cm - Dobrável trânsito, dupla cruzeta, duplo furo
CP500B-xx	Série GO! com rodas de 30 cm - Dobrável trânsito
CP500R-xx	Série GO! com rodas de 30 cm - Dobrável trânsito
CP505-xx	Série GO!2 com rodas de 30 cm - Dobrável trânsito, dupla cruzeta

(R = vermelho; B = azul; xx = indica as medidas de assento disponíveis, por exemplo. 40-43-45-48-50 cm, 38 e 46 cm apenas para a cor azul)

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido uma cadeira de rodas **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A., concebida para a deslocação de pessoas com dificuldades de mobilidade, tanto dentro como fora de casa, em viagens ou durante simples atividades do dia a dia. Este manual de utilização contém pequenas sugestões para uma utilização correta do auxiliar escolhido por si e conselhos preciosos para a sua segurança. Antes de utilizar a cadeira de rodas, é aconselhável ler com atenção o presente manual na íntegra. Em caso de dúvidas, queira contactar o revendedor, que o saberá ajudar e aconselhar corretamente.

Nota: certifique-se de que nenhuma parte da cadeira de rodas sofreu danos durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter instruções.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Esta cadeira de rodas destina-se à mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção e pode ser utilizada por autopropulsão (se equipada com rodas traseiras grandes) ou mediante a ajuda de um operador.

De qualquer modo, é necessária a intervenção de um operador para efetuar os vários ajustes necessários.



ATENÇÃO!

- É proibido utilizar este dispositivo para fins diferentes dos definidos no manual.
- A Moretti S.p.A. não se responsabiliza por danos resultantes do uso indevido do dispositivo ou de uma utilização diferente da indicada no presente manual.
- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações no dispositivo e no seguinte manual sem aviso prévio, para melhorar as suas características.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela MORETTI S.p.A. e fazendo parte da família de CADEIRAS DE RODAS ARDEA ONE estão em conformidade com as disposições aplicáveis do regulamento 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo a DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em objeto satisfazem os requisitos gerais de segurança e desempenho do anexo

I do Regulamento 2017/745, conforme previsto no anexo IV do regulamento supracitado.

2. Os dispositivos em objeto NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em objeto NÃO SE DESTINAM A ESTUDOS CLÍNICOS.
4. Os dispositivos em objeto são comercializados em embalagens NÃO ESTÉREIS.
5. Os dispositivos em objeto devem ser considerados como pertencendo à classe I, em conformidade com as disposições do anexo VIII do regulamento supracitado.
6. A MORETTI SpA conserva e coloca à disposição das autoridades competentes, durante um prazo mínimo de 10 anos a partir da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento 2017/745.

PT

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI de base e eventuais referências às normas utilizadas são indicados na Declaração de Conformidade UE emitida pela MORETTI SPA e disponibilizada através dos canais apropriados.

5. AVISOS GERAIS

- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte o com atenção o seguinte manual.
- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte sempre o seu médico ou terapeuta.
- Mantenha o produto embalado afastado de qualquer fonte de calor, pois a embalagem é de cartão.
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste das peças que não podem ser reparadas e/ou substituídas.
- Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar entalamento dos membros e lesões pessoais.
- Preste sempre atenção à presença de crianças.
- Para levantar corretamente a cadeira de rodas, tem de a fechar de acordo com as instruções do presente manual e, em seguida, segurá-la pelas pegas.
- Não levante a cadeira de rodas segurando-a pelas peças amovíveis, pois podem soltar-se acidentalmente durante a elevação.
- O utilizador e/ou o paciente deve informar o fabricante e a autoridade competente do estado-membro onde se encontra sobre qualquer acidente grave que ocorra com o dispositivo.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

	Código do produto
	Identificador exclusivo do dispositivo
	Número de série
	Marca CE
	Fabricante
	Lote de produção
	Ler o manual de instruções
	Dispositivo médico
	Condições de eliminação
	Peso máx. suportado


7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 Vista e lista das peças


Consoante o modelo de cadeira de rodas que escolher, são estes os elementos que a compõem:




A - Quadro de base da cadeira de rodas
B - Jogo de chaves para a montagem

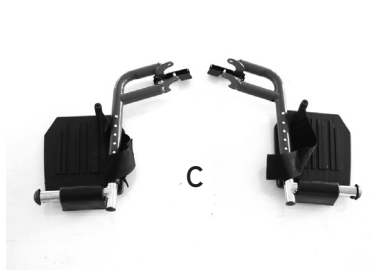

C - Apoios de pés laterais

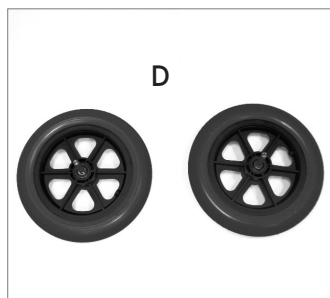


D - Rodas traseiras pequenas
(30 cm de diâmetro) modelo de trânsito

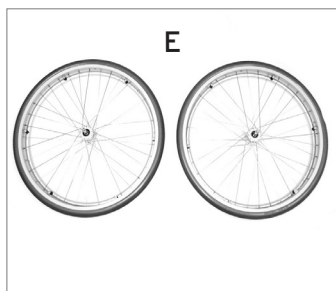

E - Rodas traseiras grandes
(60 cm de diâmetro) modelo de autopropulsão

8. MONTAGEM/DESMONTAGEM

8.1 Abertura

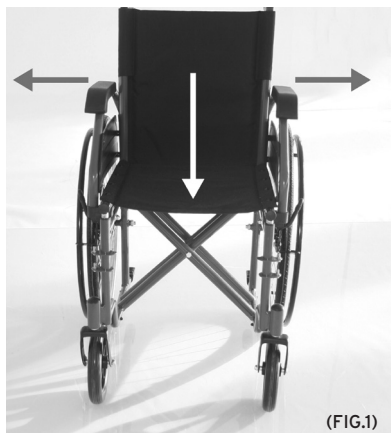


(FIG.1)

Nota: consulte os avisos sobre segurança do presente manual de instruções.

- Agarre nos tubos das pegas e puxe para fora, pressionando o assento para baixo e certificando-se de que a cadeira de rodas está completamente aberta (FIG.1).

8.2 Fecho

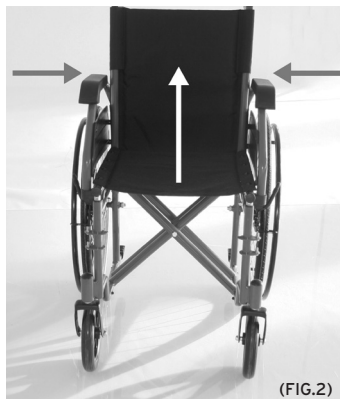

- Levante vigorosamente o assento e feche a cadeira de rodas, reaproximando as duas pegas de empurrar (FIG.2).

8.3 Montagem/desmontagem dos apoios de braços

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



Imagens para fins ilustrativos

- Introduza os apoios de braços no respetivo engate traseiro, dobre-os para a frente e encaixe-os também no suporte dianteiro (FIG.3).
- Para a desmontagem, carregue na patilha de desengate dianteira, rebata os apoios de braços para trás e puxe o manípulo de desengate traseiro para os extrair (FIG.4).


8.4 Montagem/desmontagem dos apoios de pés laterais ou elevatórios



- Para montar os apoios de pés laterais e elevatórios, alinhe os furos dos suportes com os respetivos pernos do quadro da cadeira de rodas e, em seguida, rode o apoio de pés para dentro, fazendo com que a patilha de bloqueio no quadro da cadeira de rodas encaixe corretamente (FIG.5).
- Para a desmontagem, solte a patilha do apoio de pés do quadro da cadeira de rodas, rode o apoio para fora e extraia-o, puxando para cima.

8.5 Regulação dos apoios de pés laterais


(FIG.6)

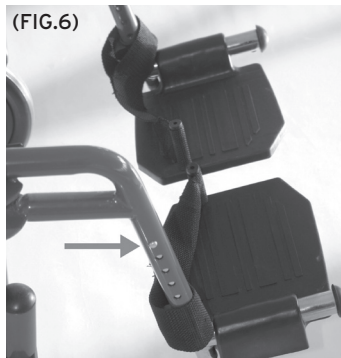

- Para regular o comprimento dos apoios de pés, desbloqueie a alavanca de segurança esquerda da parte inferior e, em seguida, prima o botão de mola e faça deslizar o tubo do apoio de pés até que o botão volte a encaixar no furo pretendido. Em seguida, bloqueie novamente a alavanca de segurança. (FIG.6)

PT

8.6 Regulação dos apoios de pés elevatórios (OPCIONAL)

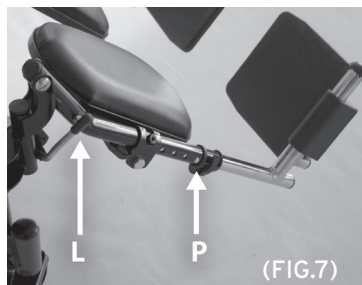

- Para regular o comprimento dos apoios de pés, desbloqueie a alavanca de segurança esquerda da parte inferior e, em seguida, prima o botão de mola e faça deslizar o tubo do apoio de pés até que o botão volte a encaixar no furo pretendido. Em seguida, bloqueie novamente a alavanca de segurança. FIG.7 (ref.P)
- Para regular a inclinação dos apoios de pés, acione a patilha realçada na FIG.7 (ref.L) e, após ter encontrado a posição certa, liberte-a para bloquear definitivamente os apoios de pés.

8.7 Montagem/desmontagem das rodas traseiras pequenas (apenas para mod. GO!)

As rodas traseiras com 30 cm de diâmetro devem ser posicionadas no último furo da parte inferior do quadro.



Rodas com perno fixo (apenas para mod. GO!)

- Introduza a roda pequena e bloqueie-a com a porca fornecida.
- Para a desmontagem, desaperte a porca de fixação e retire a roda, puxando-a para fora.

Imagem para fins ilustrativos

8.8 Regulação dos travões com rodas traseiras pequenas (apenas para mod. GO!)

PT



(FIG.9) Imagem para fins ilustrativos

- Com rodas traseiras com 30 cm de diâmetro, o travão deve ser colocado na parte do quadro conforme se pode ver na (fig.9).

Nota: regule a distância da corrediça em relação à roda para que, quando aplica o travão, possa exercer pressão suficiente para bloquear a roda com total segurança.

8.9 Montagem/desmontagem das rodas traseiras grandes (apenas para modelos START/START2 e START3)

As rodas traseiras com 60 cm de diâmetro devem ser colocadas no furo central do quadro e no furo superior entre os 2 presentes na START3 (CPI04-xx).



(FIG.10)

No caso de rodas com desengate rápido (apenas para modelos START2 e START3)

- Retire as tampas de plástico do furo e insira as rodas, pressionando em direção ao quadro até encaixar corretamente o dispositivo de bloqueio automático (FIG.10).
- Para a desmontagem, basta carregar no botão que se encontra no centro da jante da roda para libertar o bloqueio e extrair a roda (FIG.10).

No caso de rodas com perno fixo (apenas para mod. START)

- Introduza a roda grande e bloqueie-a com a porca fornecida.
- Para a desmontagem, desaperte a porca de fixação e retire a roda, puxando-a para fora.

8.10 Regulação dos travões com rodas traseiras grandes (apenas para modelos START/START2 e START3)



(FIG.11)

- Com as rodas traseiras com 60 cm de diâmetro, o travão deve ser posicionado na parte serrilhada do quadro, conforme ilustrado na (FIG.11), bloqueando a corrediça do travão através dos dois parafusos Allen do suporte.

Notas: regule a distância da corrediça em relação à roda para que, quando aplica o travão, possa exercer pressão suficiente para bloquear a roda com total segurança

9. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que as peças mecânicas não apresentam vestígios de desgaste, para garantir a utilização do dispositivo em total segurança para pessoas e objetos.
- Certifique-se da montagem correta do dispositivo, com particular atenção para a introdução correta das rodas traseiras.
- Verifique se o assento está completamente aberto, na posição final de bloqueio (caso contrário, prima com força o assento para baixo em direção ao quadro).
- Certifique-se do funcionamento correto do travão das rodas traseiras.

10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- A cadeira de rodas não pode ser utilizada como cadeira de veículos a motor.
- Certifique-se sempre de que o comando do travão está bem regulado e a funcionar corretamente.
- Quando se utiliza a cadeira de rodas, é necessário ter cuidado para não trilhar os dedos em certas peças, como as rodas ou os travões.
- De notar que a temperatura da superfície da cadeira de rodas pode aumentar quando exposta a fontes de calor externas, como a luz solar.

11. MODO DE UTILIZAÇÃO

Nota: consulte os avisos gerais do presente manual de instruções



ATENÇÃO!

- Transferir-se de e para a cadeira sem ajuda é uma operação potencialmente perigosa: faça-o apenas se fisicamente capaz e com muita cautela.
- Não se apoie nas partes amovíveis, de preferência, apoie-se na estrutura do assento.

AO SENTAR-SE OU SAIR DA CADEIRA DE RODAS, NUNCA COLOQUE O SEU PESO SOBRE OS APOIOS DOS PÉS, POIS EXISTE RISCO DE CAPOTAMENTO!

11.1 Sentar-se na cadeira de rodas

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais possível, de modo a ficar posicionada ao seu lado.
2. Bloqueie os travões da roda traseira. Para facilitar ao máximo a transferência para a cadeira de rodas, recomendamos que retire o apoio de braços do lado por onde pretende passar.
3. Apoie-se na estrutura do quadro fazendo força com os braços e sente-se lentamente no assento.

11.2 Sair da cadeira de rodas

1. Aproxime-se o máximo possível de outro assento.
2. Bloqueie os travões da roda traseira. Para facilitar ao máximo a saída da cadeira de rodas, recomendamos que retire o apoio de braços do lado por onde pretende passar.
3. Apoie os braços na estrutura do assento para o qual pretende transferir-se e, levantando-se, deixe-se escorregar lentamente para este.

11.3 Degraus e desníveis (conselhos sobre a melhor forma de vencer estes obstáculos por si só)



ATENÇÃO!

Estas técnicas são válidas apenas para utilizadores experientes de cadeiras de rodas. Em todos os outros casos, é recomendável solicitar ajuda a um assistente!

SUBIR

Coloque-se junto à berma do passeio ou ao degrau que pretende subir.

Equilibre a cadeira de rodas sobre as rodas traseiras de modo a elevar as rodas dianteiras o suficiente para as apoiar no obstáculo que pretende transpor. Incline o tronco para a frente e empurre com força para a frente o corrimão presente nas rodas traseiras. Continue a empurrar até que as rodas traseiras passem por cima do obstáculo.

PT

DESCER

Para descer o desnível, efetue o procedimento inverso. Posicione-se com a parte traseira da cadeira de rodas em frente do desnível que pretende transpor, segure firmemente no corrimão das rodas traseiras e desça lentamente o degrau ou obstáculo; em seguida, equilibre a cadeira de rodas sobre as rodas traseiras, de modo a elevar ligeiramente as rodas dianteiras e terminar a descida suavemente.

**ATENÇÃO!**

É recomendável não utilizar esta técnica se o desnível for superior a 10 cm!

11.4 Utilização dos apoios de braços

Os apoios de braços podem ser rebatíveis, amovíveis ou rebatíveis e amovíveis:

Rebater para trás o apoio de braços - Esta função é muito prática para entrar ou sair da cadeira de rodas. Para rebater o apoio de braço, basta premir a patilha de desengate dianteira e rodá-lo para trás.

11.5 Utilização das rodas de autopropulsão

As rodas traseiras grandes (60 cm) permitem conduzir a cadeira de rodas quando esta é autopropulsada. Para o efeito, segure no corrimão da roda e empurre-o na direção pretendida.

11.6 Utilização das rodas pequenas

As rodas traseiras pequenas (30 cm) permitem conduzir a cadeira de rodas assistida pelo operador, utilizando os punhos das pegas da cadeira de rodas.

11.7 Utilização de rodas pequenas para passagens estreitas (de série nos modelos com desengate rápido)

Este tipo de rodas só é utilizado para permitir a deslocação da cadeira de rodas durante um curto período de tempo, para passar por espaços particularmente estreitos (por exemplo, portas de elevadores). Para utilizar estes rodízios, é necessário levantar a cadeira de rodas para retirar as rodas traseiras, empurrar a cadeira de rodas de modo a que fique apoiada nos pequenos rodízios e voltar a montar as rodas traseiras.

11.8 Transporte em meios de transporte

A cadeira de rodas foi criada para poder ser transportada facilmente. Uma vez desmontados os apoios de pés e os apoios de braços, pode ser fechada e arrumada comodamente, por exemplo, na mala de um automóvel. Se a falta de espaço não o permitir, coloque a cadeira de rodas à frente do banco traseiro, para a manter estável e evitar que tombe ou escorregue. Se possível, fixe a cadeira de rodas com o cinto de segurança do veículo.

12. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. , no momento da colocação no mercado, são cuidadosamente controlados e identificados com a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, é recomendável solicitar a verificação da adequação ao uso do produto pelo fabricante ou por um laboratório autorizado, pelo menos todos os 2 anos. Em caso de reparação, devem ser utilizadas apenas peças de reposição e acessórios originais. Antes de utilizar o dispositivo, efetue todas as verificações e controlos sugeridos na secção “ANTES DA UTILIZAÇÃO” do presente manual de instruções. As cadeiras de rodas **ARDEA ONE** requerem apenas as intervenções elementares de manutenção periódica indicadas de seguida:

capacidade de travagem	mensal
limpeza do assento	conforme necessário

13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

13.1 Limpeza dos revestimentos e estofos

Os revestimentos e estofos são feitos de nylon. Podem ser limpos com água e sabão neutro.

13.2 Limpeza do quadro e das peças metálicas

Também se pode utilizar água e sabão neutro para limpar o quadro e as peças metálicas e, em seguida, secar com um pano macio para não riscar a pintura do quadro.

13.3 Limpeza das rodas e dos travões

As rodas também podem ser limpas com água e sabão neutro. Tenha muito cuidado ao secar: pode ser muito perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda molhadas.

13.4 Desinfecção

Se for necessário efetuar a desinfecção do produto, utilize um detergente desinfetante comum.

Nota: evite absolutamente a utilização de produtos ácidos, alcalinos ou solventes, como por exemplo, acetona ou diluente.

14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de eliminação de resíduos sólidos urbanos. É recomendável eliminar o dispositivo utilizando as ilhas ecológicas municipais comuns previstas para as operações de reciclagem de materiais usados.

15. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Para informações sobre peças de reposição e acessórios, consulte exclusivamente o catálogo geral da Moretti.

16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16.1. Dimensões

DIMENSÕES E PESOS

PT

Medidas em cm															
CP100B-38								38		56					
CP100x*-40								40		58					
CP100x*-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43		60,5	26	17,5	60	20	-
CP100x*-45								45		63					
CP100B*-46								46		64					
CP100x*-48								48		65					
CP103x*-40								40		58					
CP103x*-43								43		61					
CP103x*-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	-
CP103x*-48								48		66					
CP103x*50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43								43		60,5					
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43								43		60,5					
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					

Medidas em cm															
CP500x*-40								40		58					
CP500x*-43								43		61					
CP500x*-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-
CP500B-46								46		64					
CP500B-48								48		65					
CP505-40								40		58					
CP505-43								43		61					
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-
CP505-48								48		65					
CP505-50								50		67					

* O "X" indica a cor. As medidas podem variar em $\pm 0,5$ cm

16.2 Especificações técnicas

- Quadro de aço
- Carga máx. para CP100x-xx, CP500x-xx: 120 kg
- Carga máx. para CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Rodas dianteiras de PVC com 20 cm de diâmetro para CP100x-xx
- Rodas dianteiras de PU com 20 cm de diâmetro para CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx

- Rodas traseiras de PU com 60 cm de diâmetro para **CP100x-xx, CP103x-xx, CP104-xx**
- Rodas traseiras de PU com 30 cm de diâmetro para **CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx**
- Assento, costas e revestimento dos estofos dos apoios de braços de nylon
- Resistência à ignição: os materiais utilizados no revestimento e nos estofos foram submetidos a ensaios utilizando os métodos especificados na norma EN1021-1/2
- Normas de referência: EN 12183
- Temperatura ambiente de utilização: -20 °C/+40 °C
- Armazenamento recomendado: conservar em local fresco e seco e sempre afastada de fontes de calor diretas, como a luz solar. (Temperatura recomendada entre +10 °C/+40 °C)

PT

17. GARANTIA

Todos os produtos Moretti estão garantidos contra defeitos de material ou fabrico por um período de 2 (dois) anos a partir da data de venda do produto, salvo em caso de eventuais exclusões e limitações especificadas de seguida. Esta garantia não é válida em caso de uso indevido, abuso ou alteração do produto e por não observância das instruções de utilização. A finalidade correta do produto é indicada no manual de utilização. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou outros incidentes decorrentes da instalação e/ou utilização do aparelho de forma não totalmente conforme com as instruções contidas nos manuais de instalação, montagem e utilização. A Moretti não garante os produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes situações: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos decorrentes de problemas de alimentação elétrica (se prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das diretrizes e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (diferente do transporte original da Moretti) ou decorrentes da não execução da manutenção conforme indicado no manual. Não estão cobertos pela presente garantia os componentes sujeitos a desgaste se o dano for imputado a uma utilização normal do produto.

17.1 Reparações

Reparação ao abrigo da garantia: Se um produto Moretti apresentar defeitos de material ou fabrico durante o período de garantia, a Moretti deve avaliar com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode substituir ou reparar o artigo ao abrigo da garantia, junto de um revendedor Moretti designado ou na sua própria sede. Os custos da mão de obra relacionada com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti caso se determine que a reparação está abrangida pela garantia. A reparação ou substituição não implica uma renovação ou prorrogação da garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia: Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação após ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos da mão de obra e do transporte relacionados com uma reparação não coberta pela garantia serão suportados na totalidade pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações em produtos não cobertos pela garantia são garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia de receção do produto reparado.

Produtos sem defeito: O cliente será avisado se, depois de ter analisado e testado um produto devolvido, a Moretti concluir que o produto não apresenta qualquer defeito. O produto será devolvido ao cliente, que terá suportar os portes da devolução.

17.2 Peças de reposição

As peças de reposição originais da Moretti têm garantia de 6 (seis) meses a partir do dia de receção da peça.

17.3 Cláusulas de exoneração

Exceto conforme expressamente especificado na presente garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece nenhuma declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo

eventuais declarações, garantias ou condições de comerciabilidade, adequabilidade a um determinado fim, não violação e não interferência. A Moretti não garante que o funcionamento do produto Moretti seja ininterrupto ou sem erros. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, nos limites da legislação em vigor. Alguns estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação a produtos para consumidores. Nesses estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao utilizador. A presente garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



PT

CERTIFICADO DE GARANTIA**Produto** _____**Compra em data de** _____**Revendedor** _____**Rua** _____ **Localidade** _____**Venda em** _____**Rua** _____ **Localidade** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com