

moretti®

SCANAȚI CODUL QR
PENTRU MAI MULTE LIMBI



RO Scaune rulante Ardea One
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CUPRINS

1. CODURI.....	PAG.3
2. INTRODUCERE	PAG.3
3. UTILIZARE PREVĂZUTĂ	PAG.3
4. DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE	PAG.3
5. AVERTISMENTE GENERALE.....	PAG.4
6. SIMBOLURI UTILIZATE.....	PAG.4
7. DESCRIERE GENERALĂ	PAG.5
7.1 Vedere de ansamblu și lista componentelor	pag. 5
8. MONTARE/DEMONTARE.....	PAG.6
8.1 Deschidere	pag. 6
8.2 Închidere	pag. 6
8.3 Montarea/demontarea cotierelor	pag. 6
8.4 Montarea/demontarea suporturilor laterale sau elevabile pentru picioare.....	pag. 7
8.5 Reglarea suporturilor laterale pentru picioare.....	pag. 8
8.6 Reglarea suporturilor elevabile pentru picioare (OPȚIONAL)	pag. 8
8.7 Montarea/demontarea roților mici din spate (numai pentru NEXT, DUAL și SKINNY)	pag. 8
8.8 Reglarea frânelor la roțile spate mici (numai pentru NEXT, DUAL și SKINNY).....	pag. 9
8.9 Montarea/demontarea roților mari din spate (numai pentru NEXT GO, DUAL GO și SKINNY GO).....	pag. 9
8.10 Reglarea frânelor la roțile spate mari (numai pentru DUAL GO).....	pag. 9
9. ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE	PAG.10
10. AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA	PAG.10
11. MOD DE UTILIZARE	PAG.10
11.1 Așezarea în scaunul rulant	pag. 10
11.2 Ridicarea din scaunul rulant.....	pag. 10
11.3 Trepte și diferențe de nivel (sfaturi pentru a-i aborda cel mai bine pe cont propriu)	pag. 10
11.4 Utilizarea cotierelor	pag. 11
11.5 Utilizarea roților pentru autopropulsie.....	pag. 11
11.6 Utilizarea roților mici	pag. 11
11.7 Utilizarea roților mici pentru pasaje înguste (standard la modelele cu eliberare rapidă)	pag. 11
11.8 Transportul în vehicule	pag. 11
12. ÎNTREȚINERE	PAG.11
13.1 Curățarea tapițeriei și a căptușelii	pag. 12
13.2 Curățarea cadrului și a pieselor metalice	pag. 12
13.3 Curățarea roților și a frânelor	pag. 12
13.4 Dezinfecție	pag. 12
14. CONDIȚII DE ELIMINARE	PAG.12
15. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII	PAG.12
16. CARACTERISTICI TEHNICE	PAG.12
16.1 Dimensiuni.....	pag. 12
16.2 Specificații tehnice.....	pag. 13
17. GARANȚIE.....	PAG.14
17.1 Reparații.....	pag. 14
17.2 Piese de schimb	pag. 14
17.3 Clauze de exonerare de răspundere	pag. 14



Dispozitiv medical din clasa I
REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale

1. CODURI

CP101-XX	Seria START+ roți de 60 cm - autopropulsie
CP102B-xx	Seria START1 roți de 60 cm - autopropulsie
CP110x-xx	Seria NEXT roți de 60 cm - autopropulsie, cotieră rabatabilă
CP115x-xx	Seria NEXT GO! roți de 30 cm - tranzit, cotieră rabatabilă
CP200B-xx	Seria DUAL roți de 60 cm - autopropulsie
CP205B-xx	Seria DUAL GO! roți de 30 cm - tranzit
CP300-xx	Seria PLUS - ROȚI de 60 cm - autopropulsie - pentru persoane obeze
CP310-xx	Seria PLUS GO! roți de 30 cm - tranzit - pentru persoane obeze
CP520-xx	Seria GO UP! roți de 30 cm - tranzit
CP620-xx	Seria SKINNY roți de 50 cm - spații înguste
CP625-xx	Seria SKINNY GO! roți de 30 cm - tranzit - spații înguste
CP880-35	Seria KIDDY roți de 56 cm - autopropulsie

(x = indică faptul că modelul este disponibil în mai multe **culori**; xx = indică lățimile disponibile ale șezutului, de ex. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; pentru CP110, CP115, CP200B și CP205B, lățimea 45 nu este disponibilă)

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un scaun rulant ARDEA ONE by Moretti S.p.A., conceput pentru deplasarea persoanelor cu dificultăți motorii atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței, în călătorii sau în activitățile zilnice. Acest manual de utilizare conține câteva sugestii pentru utilizarea corectă a dispozitivului auxiliar ales și câteva sfaturi valoroase pentru siguranța dumneavoastră. Se recomandă citirea cu atenție a întregului manual înainte de utilizarea scaunului rulant. Dacă aveți vreo îndoială, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va putea ajuta și vă va oferi sfaturile potrivite.

Notă: Verificați ca nicio componentă a scaunului rulant să nu fi fost deteriorată în timpul transportului. Dacă se constată vreo deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.

3. UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Acest scaun rulant este destinat mobilității persoanelor cu dificultăți motorii și poate fi utilizat prin autopropulsie (dacă este prevăzut cu roți posterioare mari) sau cu ajutorul unui însoțitor.

În orice caz, însă, este necesară intervenția unui operator pentru diversele ajustări necesare.

ATENȚIE!



- Este interzisă utilizarea acestui dispozitiv în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul manual.
- Moretti S.p.A. nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau din utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica dispozitivul și prezentul manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestora.

4. DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE

MORETTI S.p.A. declară pe propria răspundere că produsele fabricate și introduse pe piață de MORETTI S.p.A., aparținând familiei de SCAUNE RULANTE MANUALE - ARDEA ONE, sunt conforme cu dispozițiile aplicabile ale Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale din 5 aprilie 2017.

În acest scop, MORETTI S.p.A. garantează și declară pe propria răspundere exclusivă cele ce urmează:

1. Dispozitivele în cauză îndeplinesc cerințele generale privind siguranța și performanța prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2017/745, în conformitate cu anexa IV la regulamentul menționat.
2. Dispozitivele în cauză NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURARE.
3. Dispozitivele în cauză NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚIILOR CLINICE.
4. Dispozitivele în cauză sunt comercializate în ambalaj NESTERIL.
5. Dispozitivele în cauză sunt considerate ca aparținând clasei I, în conformitate cu prevederile anexei VIII la regulamentul menționat anterior.
6. MORETTI S.p.A. păstrează și pune la dispoziția autorităților competente, timp de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului lot, documentația tehnică ce demonstrează conformitatea cu Regulamentul (UE) 2017/745.

NOTĂ: Codurile complete ale produselor, numărul unic de înregistrare al producătorului (SRN), codul UDI-DI de bază și eventualele referințe la standardele utilizate sunt indicate în Declarația UE de conformitate emisă de MORETTI S.p.A. și pusă la dispoziție prin canalele proprii.

5. AVERTISMENTE GENERALE

- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați cu atenție prezentul manual.
- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului, consultați întotdeauna medicul sau terapeutul.
- Păstrați produsul ambalat departe de orice sursă de căldură, deoarece ambalajul este fabricat din carton.
- Durata de viață utilă a dispozitivului este determinată de uzura pieselor nereparabile și/sau înlocuibile, fără a depăși în niciun caz 10 ani
- Acordați întotdeauna o atenție deosebită prezenței pieselor mobile care ar putea provoca imobilizarea membrelor și vătămări corporale
- Acordați întotdeauna atenție prezenței copiilor
- Pentru ridicarea corectă a scaunului rulant, pliați-l conform instrucțiunilor prezente în acest manual și apoi apucați-l de mânăre
- Nu ridicați scaunul rulant ținându-l de componente detașabile, deoarece acestea se pot desprinde accidental în timpul ridicării
- Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul către producător și către autoritatea competentă a statului membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.


6. SIMBOLURI UTILIZATE

	Cod produs		Lot de fabricație
	Dispozitiv medical		Identificator unic al dispozitivului
	Marcaj CE		Consultați manualul de instrucțiuni
	Producător		Condiții de eliminare
	Număr de serie		Greutate maximă admisă

7. DESCRIERE GENERALĂ

7.1 Vedere de ansamblu și lista componentelor


În funcție de modelul de scaun rulant ales, acestea sunt elementele care îl vor alcătui:

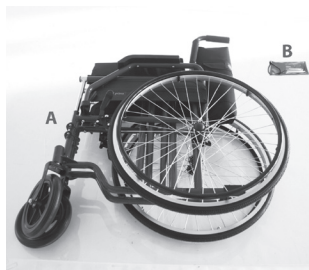


A - Cadru de bază pentru scaunul rulant

B


B - Set de chei de asamblare

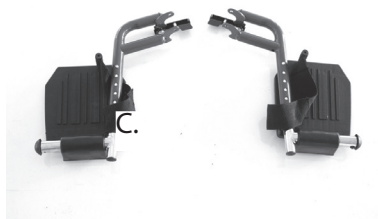


C - Trepte laterale

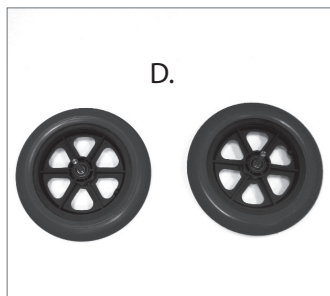


D - Roți spate mici
(diametru 30 cm) model de transport în comun

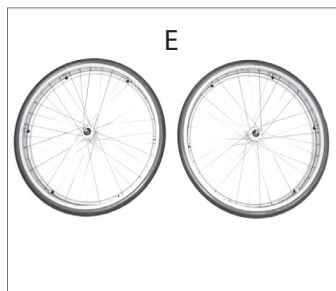

E - Roți spate mari
(diametru 60 cm) model cu autopropulsie

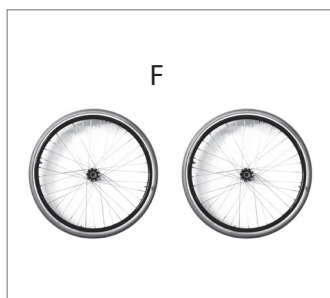

F - Roți spate cu diametru redus
(diametru 50 cm) model cu autopropulsie

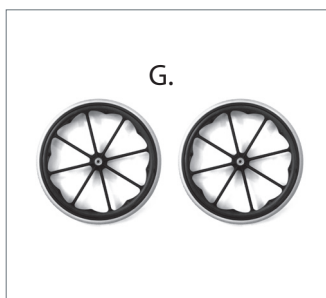

G. - Roți spate mari - Model pentru copii
(diametru 56 cm) model cu autopropulsie

8. MONTARE/DEMONTARE

8.1 Deschidere




(FIG. 1) Imagine doar cu scop ilustrativ

Notă: consultați avertismentele de siguranță din prezentul manual de instrucțiuni.

- Prindeți tuburile mânerelor și trageți-le spre exterior, apăsând simultan șezutul în jos; asigurați-vă că scaunul rulant este deschis complet (Fig. 1)

8.2 Închidere

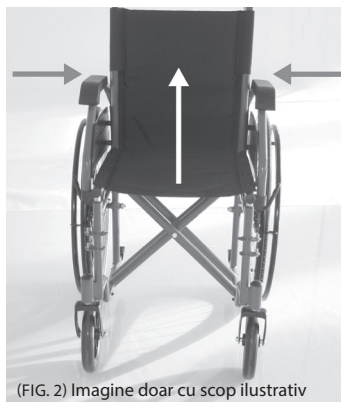

(FIG. 2) Imagine doar cu scop ilustrativ

- Ridicați ferm șezutul și pliați scaunul rulant apropiind cele două mâneri de împingere (FIG. 2)

8.3 Montarea/demontarea cotierelor

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



(FIG. 3) Imagine doar cu scop ilustrativ



(FIG. 4) Imagine doar cu scop ilustrativ

CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(FIG. 3A) Imagine doar cu scop ilustrativ



(FIG. 4A) Imagine doar cu scop ilustrativ

CP620-xx / CP625-xx

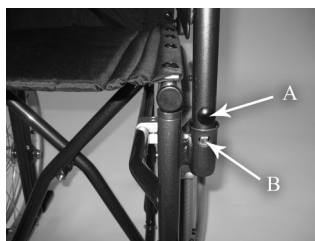

(FIG. 3B) Imagine doar cu scop ilustrativ

A - Dispozitiv de deblocare

B - Clemă de blocare

- Introduceți cotierele în suportul din spate, apoi rabatați-le înainte și agățați-le și în suportul frontal (FIG. 3, FIG. 3A)
- Introduceți tuburile în suporturile corespunzătoare până când clemă de blocare se fixează corect (Fig. 3B).
- Pentru a le scoate, apăsați maneta de eliberare din față, apoi rabatați cotierele înapoi și trageți de butonul de eliberare din spate pentru a le scoate (FIG. 4, FIG. 4A)
- Pentru demontare, apăsați dispozitivul de deblocare (A), apoi ridicați cotiera (Fig. 3B).

8.4 Montarea/demontarea suporturilor laterale sau elevabile pentru picioare



(FIG. 5) Imagine doar cu scop ilustrativ

- Pentru montarea suporturilor laterale sau elevabile pentru picioare, aliniați orificiile suporturilor cu pivoții corespunzători de pe cadrul scaunului rulant, apoi rotiți suportul spre interior până când maneta de blocare se fixează corect pe cadru (FIG. 5).
- Pentru demontare, eliberați maneta suportului pentru picioare de pe cadrul scaunului rulant, rotiți suportul spre exterior și extrageți-l în sus.


8.5 Reglarea suporturilor laterale pentru picioare



(FIG. 6) Imagine doar cu scop ilustrativ

- Pentru reglarea lungimii suporturilor pentru picioare, deblocați maneta de siguranță din stânga, aflată în partea inferioară, apăsați butonul cu arc și glisați tubul până când butonul se fixează din nou în orificiul dorit. Apoi blocați din nou maneta de siguranță. (FIG. 6)

8.6 Reglarea suporturilor elevabile pentru picioare (OPȚIONAL)

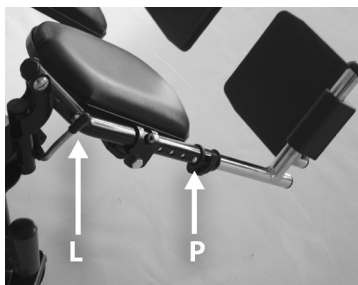


(FIG. 7) Imagine doar cu scop ilustrativ

- Pentru reglarea lungimii suporturilor pentru picioare, deblocați maneta de siguranță din stânga, aflată în partea inferioară, apăsați butonul cu arc și glisați tubul până când butonul se fixează din nou în orificiul dorit. Apoi blocați din nou maneta de siguranță. FIG.7 (ref. P)
- Pentru a regla înălțimea suporturilor pentru picioare, acționați maneta evidențiată în FIG.7 (ref. L), apoi, după ce ați găsit reglajul corect, eliberați maneta pentru a bloca definitiv suporturile pentru picioare.

8.7 Montarea/demontarea roților mici din spate (numai pentru NEXT, DUAL și SKINNY)

Roțile spate cu diametrul de 30 cm trebuie poziționate în ultima gaură din partea inferioară a cadrului.

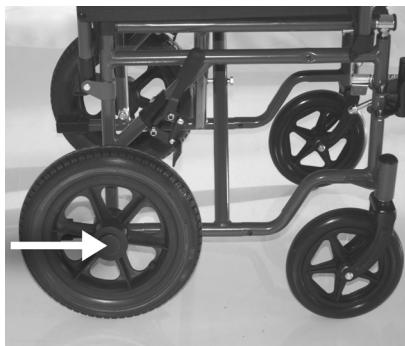

(FIG. 8) Imagine doar cu scop ilustrativ

În cazul roților cu eliberare rapidă


- Scoateți capacele din plastic de pe orificii și introduceți roțile, împingându-le spre cadru până când dispozitivul automat de blocare se fixează corect (Fig. 8).
- Pentru a demonta, apăsați pur și simplu butonul din centrul jantei roții pentru a elibera blocarea, trageți roata spre exterior (Fig. 8)

În cazul roților cu știft fix (numai pentru SKINNY)

- Introduceți roata mică și blocați-o cu piulița furnizată
- Pentru a demonta, deșurubați piulița de fixare și scoateți roata trăgând-o spre exterior

Imaginile sunt doar în scop ilustrativ

8.8 Reglarea frânelor la roțile spate mici (numai pentru NEXT, DUAL și SKINNY)

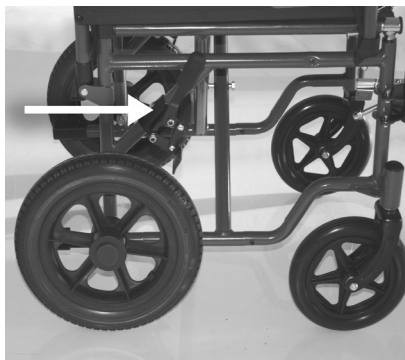

(FIG. 9) Imagine doar cu scop ilustrativ

- La roțile spate cu diametrul de 30 cm, frâna trebuie poziționată pe partea zimțată a cadrului, așa cum se vede în (Fig. 9), blocând glisiera de frână folosind cele două șuruburi Allen de pe suport

Notă: Reglați distanța dintre glisiera frânei și roată astfel încât, la acționarea frânei, aceasta să exercite o presiune suficientă pentru blocarea sigură a roții.

8.9 Montarea/demontarea roților mari din spate (numai pentru NEXT GO, DUAL GO și SKINNY GO)

Roțile din spate cu diametrul de 60 cm trebuie poziționate în orificiul central de pe cadru



În cazul roților cu eliberare rapidă

- Scoateți capacele din plastic de pe orificii și introduceți roțile, împingându-le spre cadru până când dispozitivul automat de blocare se fixează corect (FIG. 10).
- Pentru a demonta, apăsați pur și simplu butonul din centrul jantei roții pentru a elibera blocarea, trageți roata spre exterior (FIG. 10)

(FIG. 10) Imagine doar cu scop ilustrativ

În cazul roților cu șteift fix (numai pentru SKINNY GO)

- Introduceți roata mare și blocați-o cu piulița furnizată
- Pentru a scoate, deșurubați piulița de fixare, scoateți roata trăgând-o spre exterior

8.10 Reglarea frânelor la roțile spate mari (numai pentru DUAL GO)



(FIG. 11) Imagine doar cu scop ilustrativ

- La roțile spate cu diametrul de 60 cm, frâna trebuie poziționată pe partea zimțată a cadrului, așa cum se vede în (FIG. 11), blocând glisiera de frână folosind cele două șuruburi Allen de pe suport

Notă: Reglați distanța dintre glisiera frânei și roată astfel încât, la acționarea frânei, aceasta să exercite o presiune suficientă pentru blocarea sigură a roții.

9. ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice implicate pentru a vă asigura că dispozitivul este utilizat în deplină siguranță pentru persoane și bunuri
- Verificați dacă dispozitivul este asamblat corect, acordând o atenție deosebită introducerii corecte a roților din spate
- Verificați dacă șezutul este deschis complet și blocat în poziția finală (în caz contrar, apăsați-l ferm în jos, spre cadru)
- Verificați dacă frâna de la roțile din spate funcționează corect

10. AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

- Scaunul rulant nu poate fi utilizat ca scaun în autovehicule
- Asigurați-vă întotdeauna că frâna este reglată corect și funcționează
- Se recomandă să fiți atenți la prinderea degetelor în anumite componente, cum ar fi roțile sau frânele, atunci când utilizați scaunul rulant.
- Rețineți că temperatura suprafeței scaunului rulant poate crește atunci când acesta este expus la surse externe de căldură, cum ar fi lumina solară

11. MOD DE UTILIZARE

Notă: Consultați avertismentele generale din acest manual de instrucțiuni



ATENȚIE!

- Urcarea și coborârea din scaunul rulant de unul singur este o operațiune potențial periculoasă: faceți asta doar dacă sunteți capabili fizic și cu precauție
- Nu vă sprijiniți pe componentele detașabile; utilizați cadrul șezutului ca punct de sprijin

NU VĂ SPRIJINIȚI GREUTATEA PE SUPTURILE PENTRU PICIOARE ÎN TIMPUL AȘEZĂRII ÎN SAU RIDICĂRII DIN SCAUNUL RULANT. PERICOL DE RĂSTURNARE!

11.1 Așezarea în scaunul rulant

1. Mutați scaunul rulant cât mai aproape posibil, astfel încât să fie poziționat lângă dumneavoastră
2. Blocați frânele roților din spate; Pentru a facilita cât mai mult urcarea în scaunul rulant, vă recomandăm să îndepărtați cotiera de pe partea unde se efectuează aceste operațiuni.
3. Sprijiniți-vă de structura cadrului folosindu-vă brațele, apoi coborâți-vă încet spre scaun

11.2 Ridicarea din scaunul rulant

1. Aproiați-vă cât mai mult posibil de marginea unui scaun nou
2. Blocați frânele roților din spate; Pentru a facilita cât mai mult coborârea din scaunul rulant, vă recomandăm să îndepărtați cotiera de pe partea unde se efectuează aceste operațiuni.
3. Sprijiniți-vă brațele pe cadrul șezutului pe care urmează să vă transferați și, ridicându-vă, deplasați-vă lent către acesta.

11.3 Trepte și diferențe de nivel (sfaturi pentru a-i aborda cel mai bine pe cont propriu)



ATENȚIE!

Aceste tehnici sunt valabile doar pentru utilizatorii de scaune rulante experimentați.
În toate celelalte cazuri, se recomandă ajutorul unui asistent!

URCARE

Mută-te la marginea trotuarului sau la treapta pe care urmează să o depășești.

Echilibrați scaunul rulant pe roțile din spate astfel încât roțile din față să fie suficient de ridicate pentru a se sprijini pe obstacolul pe care doriți să îl depășiți. Înclinați trunchiul înainte și împingeți ferm înainte inelele de propulsie ale roților posterioare. Continuați să împingeți până când roțile din spate au depășit obstacolul.

COBORÂRE

Pentru coborârea unei diferențe de nivel, aplicați procedura în ordine inversă. Poziționați-vă cu spatele scaunului rulant în fața treptei sau obstacolului pe care doriți să îl depășiți, țineți ferm de inelele de propulsie ale roților posteriore și apoi coborâți încet treapta sau obstacolul; apoi echilibrați scaunul rulant pe roțile din spate astfel încât să ridicați ușor roțile din față și să finalizați ușor coborârea.



ATENȚIE!

Se recomandă să nu se folosească această tehnică dacă diferența de înălțime este mai mare de 10 cm!!!

11.4 Utilizarea cotierelor

Cotierele pot fi doar pliabile, doar detașabile sau pliabile și detașabile:

RABATAREA COTIEREI - Această funcție facilitează așezarea în și ridicarea din scaunul rulant. Pentru a plia cotiera, apăsați pur și simplu maneta de eliberare frontală și rotiți-o înapoi.

11.5 Utilizarea roților pentru autopropulsie

Roțile posteriore mari, cu diametrul de 50/60 cm, permit deplasarea scaunului rulant prin autopropulsie. În acest scop, apucați inelul de propulsie al roții și împingeți-l în direcția dorită.

11.6 Utilizarea roților mici

Roțile posteriore mici, cu diametrul de 30 cm, sunt destinate deplasării scaunului rulant de către un însoțitor, cu ajutorul mânelor de împingere din spate.

11.7 Utilizarea roților mici pentru pasaje înguste (standard la modelele cu eliberare rapidă)

Acest tip de roți este destinat exclusiv deplasărilor scurte ale scaunului rulant prin spații deosebit de înguste (de exemplu, ușile unui ascensor). Pentru a utiliza aceste roți, trebuie să ridicați scaunul rulant pentru a scoate roțile din spate, apoi să împingeți scaunul rulant astfel încât să se sprijine pe roțile mici din spate, apoi să introduceți la loc roțile din spate.

11.8 Transportul în vehicule

Scaunul rulant este conceput pentru a fi transportat cu ușurință. După ce suporturile pentru picioare și cotierele au fost îndepărtate, acesta poate fi pliat și așezat convenabil, de exemplu, în portbagajul unei mașini. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza spațiului limitat, așezați scaunul rulant în fața banchetei din spate, astfel încât să fie stabil și să nu se răstoarne sau să alunece. Dacă este posibil, fixați scaunul rulant cu centura de siguranță a vehiculului.

12. ÎNTREȚINERE

Dispozitivele din gama **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. sunt verificate cu atenție înainte de introducerea pe piață și sunt prevăzute cu marcat CE. Pentru siguranța pacientului și a personalului medical, se recomandă verificarea aptitudinii produsului pentru utilizare de către producător sau de către un laborator autorizat, cel puțin la fiecare 2 ani. În cazul reparațiilor trebuie utilizate exclusiv piese de schimb și accesorii originale. Înainte de a utiliza dispozitivul, efectuați toate verificările și controalele sugerate în paragraful „ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE” din acest manual de instrucțiuni. Scaunele **rulante ARDEA ONE** necesită numai operațiuni periodice simple de întreținere. Verificările care trebuie efectuate periodic sunt enumerate mai jos:

capacitate de frânare	lunar
curățarea șezutului	după cum este necesar

13. CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

13.1 Curățarea tapițeriei și a căptușelii

Căptușeala și umplutura sunt fabricate din nailon. Și pot fi curățate cu apă și săpun neutru.

13.2 Curățarea cadrului și a pieselor metalice

Cadrul și componentele metalice pot fi curățate cu apă și săpun neutru; ulterior, uscați-le cu o lavetă moale pentru a evita zgârierea stratului de vopsea.

13.3 Curățarea roților și a frânelor

În mod similar, roțile pot fi curățate și cu apă și săpun neutru. Acordați o atenție deosebită uscării: Ar putea fi foarte periculos să folosiți scaunul rulant cu roțile încă ude.

13.4 Dezinfecție

Dacă este necesară dezinfectarea produsului, utilizați un detergent dezinfectant obișnuit.

Notă: Nu utilizați în niciun caz produse acide, alcaline sau solvenți, precum acetona ori diluantul.

14. CONDIȚII DE ELIMINARE

La eliminarea dispozitivului, nu utilizați sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale solide. Se recomandă predarea dispozitivului la centrele municipale de colectare, în vederea reciclării materialelor din care este realizat.

15. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Pentru piese de schimb și accesorii, consultați exclusiv catalogul general Moretti.

16. CARACTERISTICI TEHNICE

16.1 Dimensiuni

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI														
Dimensiuni în cm														
CP101-38								38		56				
CP101-40								40		58				
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20
CP102-46								46		63,5				
CP102-48								48		65				
CP102B-38								38		56				
CP102B-40								40		58				
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42÷56	43	43	61	27	17,5	60	20
CP102B-45								45		63				
CP102B-46								46		63,5				
CP102B-48								48		65				
CP110x-40								40		58				
CP110x-43								43		61				
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41÷56	46	42	64	26	18,5	60	20
CP110x-48								48		66				
CP110x-50								50		68				
CP200B-38								38		56				
CP200B-40								40		58				
CP200B-43								43		61				
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	45	41	63	29	19,5	60	20
CP200B-46								46		64				
CP200B-48								48		66				
CP200B-50								50		68				

Imaginile sunt doar în scop ilustrativ

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

Dimensiuni în cm																
CP300-50								50		73						
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43÷57	55	41	78	32	26	60	20	-	200
CP300-60								60		83						
CP620-40								40		51						
CP620-43								43		54						
CP620-46	100	73	41	92	80	53	45÷57	46	37	57	26	16,5	50	18	-	110
CP620-48								48		60						
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100
Dimensiuni în cm																
CP115x-40								40		53						
CP115x-43								43		56						
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41÷56	46	43	58,5	25	16	30	20	-	150
CP115x-48								48		61						
CP115x-50								50		63						
CP205B-38								38		52						
CP205B-40								40		54						
CP205B-43								43		57						
CP205B-45	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	45	41	59	25	16,7	30	20	4	150
CP205B-46								46		59,5						
CP205B-48								48		62						
CP205B-50								50		64						
CP310-50								50		63						
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43÷57	55	39	68	30	21	32	20	-	200
CP520-40								40		55						
CP520-43								43		58						
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42÷56	45	42	60	26	17,5	30	20	-	150
CP520-46								46		60,5						
CP520-48								48		63						
CP625-40								40		51						
CP625-43	88	61	41	92	80	53	45÷57	43	37	54	26	16,5	30	18	-	110

*Dimensiunile pot varia cu $\pm 0,5$ cm

16.2 Specificații tehnice

- Cadru din oțel
- Greutate maximă admisă pentru CP101 și CP102B: 120 kg - Pentru CP110x, CP115x, CP200B, CP205B, CP520: 150 kg - Pentru CP300, CP310: 200 kg - Pentru CP620, CP625: 110 kg - Pentru CP880-35: 100 kg
- Roți față din PU cu diametrul de 20 cm
- Roți față din PU, model pentru copii, diametru 15 cm
- Roți mici spate din PU, diametru 30 cm
- Roți spate mari din PU, cu diametrul de 60 cm
- Roți spate mari din PU, pasaje înguste, diametru 50 cm
- Roți spate mari, model pentru copii, diametru 56 cm
- Înneliș din nailon
- Rezistență la aprindere: Materialele utilizate pentru căptușeală și umplutură au fost testate folosind metodele specificate în EN1021-1/2
- Standarde de referință: EN 12183
- Temperatura mediului de funcționare: -20 °C / +40 °C
- Depozitare recomandată: A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse directe de căldură, cum ar fi lumina soarelui. (Temperatură recomandată între +10 °C / +40 °C)

Imaginile sunt doar în scop ilustrativ

17. GARANȚIE

Toate produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de materiale sau de fabricație pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data vânzării produsului, cu excepția oricăror excluderi și limitări specificate mai jos. Această garanție nu se aplică în caz de utilizare necorespunzătoare, abuz sau modificare a produsului sau pentru nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Utilizarea prevăzută a produsului este indicată în manualul de utilizare. Moretti nu răspunde pentru daunele, vătămările corporale sau alte prejudicii cauzate de ori legate de instalarea și/sau utilizarea echipamentului fără respectarea strictă a instrucțiunilor din manualele de instalare, montare și utilizare. Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva deteriorării sau defectelor în următoarele condiții: calamități naturale; operațiuni de întreținere sau reparații neautorizate; daune cauzate de probleme ale alimentării cu energie electrică (dacă este prevăzută); utilizarea unor piese sau componente nefurnizate de Moretti; nerespectarea recomandărilor și a instrucțiunilor de utilizare; modificări neautorizate; daune survenite în timpul transportului (altul decât transportul inițial efectuat de Moretti); neefectuarea întreținerii conform indicațiilor din manual. Componentele care se uzează nu sunt acoperite de această garanție dacă deteriorarea se datorează utilizării normale a produsului.

17.1 Reparații

Reparații în garanție: În cazul în care un produs Moretti prezintă defecte de materiale sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti poate, la libera sa apreciere, să înlocuiască sau să repare produsul aflat în garanție la un distribuitor Moretti desemnat sau la sediul propriu. Costurile cu manoperă aferente reparației produsului pot fi suportate de Moretti dacă se constată că reparația este acoperită de garanție. Repararea sau înlocuirea produsului nu reinnoiește și nu prelungește garanția.

Repararea unui produs care nu este acoperit de garanție: Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparare numai după primirea în prealabil a autorizației din partea serviciului clienți Moretti. Costurile cu manopera și transportul aferente unei reparații neacoperite de garanție vor fi suportate integral de client sau de distribuitor. Reparațiile produselor neacoperite de garanție beneficiază de o garanție de 6 (șase) luni de la data primirii produsului reparat.

Produse fără defecte: Clientul va fi notificat dacă, după examinarea și testarea unui produs returnat, Moretti ajunge la concluzia că produsul nu este defect. Produsul va fi returnat clientului, iar costurile de transport aferente returnării vor fi suportate de acesta.

17.2 Piese de schimb

Piesele de schimb originale Moretti beneficiază de o garanție de 6 (șase) luni de la data primirii acestora.

17.3 Clauze de exonerare de răspundere

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezenta garanție și în limitele permise de lege, Moretti nu oferă nicio altă declarație, garanție sau condiție, expresă ori implicită, inclusiv privind calitatea comercială, adecvarea pentru un anumit scop, neîncălcarea drepturilor și lipsa interferențelor. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti va fi neîntreruptă sau fără erori. Durata oricăror garanții implicite care pot fi impuse prin lege este limitată la durata perioadei de garanție, în măsura permisă de lege. Unele state sau țări nu permit limitarea duratei unei garanții implicite ori excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte aferente produselor de consum. În astfel de state sau țări, este posibil ca unele excluderi sau limitări ale acestei garanții să nu vi se aplice. Prezenta garanție poate fi modificată fără notificare prealabilă.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

FABRICAT ÎN R.P.C.

RO

* Vă rugăm să consultați site-ul nostru web pentru cea mai recentă versiune disponibilă a manualului de utilizare

Imaginile sunt doar în scop ilustrativ



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com