

moretti®

SKENĒJIET QR KODU
VAIRĀK VALODĀM



LT Ardea One ratiņkrēsli
LIETOŠANAS INŠTRUKCIJA

SATURS

1. KODI.....	LPP.3
2. IEVADS	LPP.3
3. PAREDŽĒTAIS NOLŪKS	LPP.3
4. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	LPP.3
5. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI	LPP.4
6. IZMANTOTIE SIMBOLI	LPP.4
7. VISPĀRĪGS APRAKSTS	LPP.5
7.1 Detaļu pārskats un saraksts	lpp.5
8. MONTĀŽA/DEMONTĀŽA	LPP.6
8.1 Atvēršana	lpp.6
8.2 Salocīšana	lpp.6
8.3 Roku balstu uzstādīšana/noņemšana	lpp.6
8.4 Sānu vai paceļamo kāju balstu uzstādīšana/noņemšana	lpp.7
8.5 Sānu kāju balstu regulēšana	lpp.8
8.6 Paceļamo kāju balstu regulēšana (PAPILDAPRĪKOJUMS)	lpp.8
8.7 Mazo aizmugurējo riteņu uzstādīšana/noņemšana (tikai NEXT, DUAL un SKINNY modeļiem)	lpp.8
8.8 Bremžu regulēšana ar maziem aizmugurējiem riteņiem (tikai NEXT, DUAL un SKINNY modeļiem)	lpp.9
8.9 Lielo aizmugurējo riteņu uzstādīšana/noņemšana (tikai NEXT GO, DUAL GO un SKINNY GO modeļiem)	lpp.9
8.10 Bremžu regulēšana ar lieliem aizmugurējiem riteņiem (tikai DUAL GO modelim)	lpp.9
9. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES	LPP.10
10. BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU	LPP.10
11. LIETOŠANAS KĀRTĪBA	LPP.10
11.1 Iekāpšana ratīņkrēslā	lpp.10
11.2 Izkāpšana no ratīņkrēsla	lpp.10
11.3 Pakāpieni un augstuma starpības (padomi to patstāvīgai pārvarēšanai)	lpp.10
11.4 Roku balstu lietošana	lpp.11
11.5 Pašpiedziņas riteņu lietošana	lpp.11
11.6 Mazo riteņu lietošana	lpp.11
11.7 Mazo riteņu izmantošana šaurās ejās (standarta aprikojums modeļiem ar ātrās atbrīvošanas mehānismu)	lpp.11
11.8 Pārvadāšana transportlīdzekļos	lpp.11
12. APKOPE	LPP.11
12.1 Pārvalku un polsterējuma tīrīšana	lpp.12
12.2 Rāmja un metāla detaļu tīrīšana	lpp.12
12.3 Riteņu un bremžu tīrīšana	lpp.12
12.4 Dezinfekcija	lpp.12
14. LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI.....	LPP.12
15. REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI.....	LPP.12
16. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI.....	LPP.12
16.1 Izmēri	lpp.12
16.2 Tehniskās specifikācijas	lpp.13
17. GARANTĪJA	LPP.14
17.1 Remonts	lpp.14
17.2 Rezerves daļas	lpp.14
17.3 Atbildības ierobežojumi	lpp.14

CEI

klases medicīniskā ierīce
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745
(2017. gada 5. aprīlis) par medicīniskām ierīcēm

1. KODI

CP101-xx
CP102B-xx
CP110x-xx
CP115x-xx
CP200B-xx
CP205B-xx
CP300-xx
CP310-xx
CP520-xx
CP620-xx
CP625-xx
CP880-35

START+ sērija, 60 cm riteņi - **pašpiedziņas modelis**
START1 sērija, 60 cm riteņi - **pašpiedziņas modelis**
NEXT sērija, 60 cm riteņi - **pašpiedziņas modelis, pacejams roku balsts**
NEXT GO! sērija 30 cm riteņi - **pavadoņa vadāms modelis, pacejams roku balsts**
DUAL sērija, 60 cm riteņi - **pašpiedziņas modelis**
DUAL GO! SĒRIJA 30 cm riteņi - **pavadoņa vadāms modelis**
PLUS sērija, 60 cm riteņi - **pašpiedziņas modelis - personām ar aptaukošanos**
PLUS GO! sērija 30 cm riteņi - **pavadoņa vadāms modelis - personām ar aptaukošanos**
GO UP! sērija 30 cm riteņi - **pavadoņa vadāms modelis**
SKINNY sērija, 50 cm riteņi - **šaurām telpām**
SKINNY GO! sērija 30 cm riteņi - **pavadoņa vadāms modelis - šaurām telpām**
KIDDY sērija, 56 cm riteņi - **pašpiedziņas modelis**

(x = norāda, ka modelis ir pieejams vairākās krāsās; xx = norāda pieejamos sēdekļa platumus, piemēram, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 50, 55 un 60 cm; modeļiem CP110, CP115, CP200B un CP205B 45 cm sēdekļa platumus NAV pieejams)

2. IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties ARDEA ONE by Moretti S.p.A. ratiņkrēslu, kas izgatavots personu ar kustību traucējumiem pārvietošanai telpās un ārpus tām, ceļojumos un ikdienas darbībā. Šajā lietošanas instrukcijā sniegti īsi ieteikumi jūsu izvēlēta palīg līdzekļa pareizai lietošanai un vērtīgi padomi jūsu drošībai. Pirms ratiņkrēsla lietošanas ieteicams rūpīgi izlasīt visu šo rokasgrāmatu. Neskaidribu gadījumā sazinieties ar izplatītāju, kurš jums sniegs atbilstošu palīdzību un padomu.

Piezīme: Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāta neviena ratiņkrēsla detaļa. Ja ir bojājumi, nelietojiet izstrādājumu un sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu turpmākus norādījumus.

3. PAREDZĒTAIS NOLŪKS

Šis ratiņkrēsls ir paredzēts personu ar kustību traucējumiem mobilitātei, un to var lietot pašpiedziņas režīmā (ja tas aprīkots ar lieliem aizmugurējiem riteņiem) vai ar pavadoņa palīdzību.

Tomēr visos gadījumos dažādo nepieciešamo regulējumu veikšanai ir vajadzīga pavadoņa palīdzība.

UZMANĪBU!



- Šo ierīci aizliegts lietot nolūkiem, kas nav noteikti šajā rokasgrāmatā.
- Moretti S.p.A. neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ko izraisījuši ierīces nepareiza lietošana vai lietošana veidā, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītā.
- Lai uzlabotu ierīces raksturlielumus, ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas ierīcē un šajā rokasgrāmatā.

4. ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

MORETTI SpA uz savu vienīgo atbildību apliecina, ka MORETTI SpA ražotie un tirgū laistie MANUĀLO RATIŅKRĒSLU - ARDEA ONE saimes izstrādājumi atbilst 2017. gada 5. aprīļa Regulas (ES) 2017/745 par MEDICĪNISKĀM IERĪCĒM piemērojamajiem noteikumiem.

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

Šajā nolūkā MORETTI SpA uz savu vienīgo atbildību garantē un apliecina turpmāk minēto:

1. Attiecīgās ierīces atbilst Regulas (ES) 2017/745 I pielikumā noteiktajām vispārīgajām drošuma un veiktspējas prasībām, kā paredzēts minētās regulas IV pielikumā.
2. Attiecīgās ierīces NAV MĒRINSTRUMENTI.
3. Attiecīgās ierīces NAV PAREDZĒTAS KLĪNISKAJAI IZPĒTEI.
4. Attiecīgās ierīces tiek laistas tirgū NESTERILĀ iepakojumā.
5. Attiecīgās ierīces saskaņā ar minētās regulas VIII pielikumu ir klasificējamas kā I klases ierīces.
6. MORETTI SpA vismaz 10 gadus no pēdējās partijas izgatavošanas datuma glabā tehnisko dokumentāciju, kas apliecina atbilstību Regulai (ES) 2017/745, un nodrošina tās pieejamību kompetentajām iestādēm.

PIEZĪME: Pilnie izstrādājumu kodi, ražotāja reģistrācijas numurs (SRN), pamata UDI-DI kods un cita attiecīgā informācija, tostarp atsaucis uz izmantotajiem standartiem, ir sniegta ES atbilstības deklarācijā, ko MORETTI S.p.A. sagatavo un dara pieejamu savos kanālos.

5. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

- Lai ierīci lietotu pareizi, rūpīgi ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Lai ierīci lietotu pareizi, vienmēr konsultējieties ar ārstu vai terapeitu.
- Lepakoto izstrādājumu turiet prom no siltuma avotiem, jo iepakojums ir izgatavots no kartona.
- Ierīces kalpošanas laiku nosaka neremontējamu un/vai nenomaināmu detaļu nodilums, tomēr tas nepārsniedz 10 gadus.
- Vienmēr īpaši uzmanieties no kustīgām detaļām, kas var lespiest ekstremitātes un izraisīt miesas bojājumus.
- Vienmēr ievērojiet piesardzību bērnu klātbūtnē.
- Lai ratiņkrēslu pareizi paceltu, vispirms salociet to, ievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, un pēc tam satveriet aiz stumšanas rokturiem.
- Neceliet ratiņkrēslu, turot aiz noņemamām detaļām, kas var nejauši atvienoties Celšanas laikā.
- Lietotājam un/vai pacientam par jebkuru ar ierīci saistītu nopietnu incidentu jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients atrodas.

6. IZMANTOTIE SIMBOLI

	Izstrādājuma kods		Ražošanas partija
	Medicīniska ierīce		Ierīces unikālais identifikators
	CE marķējums		Skatīt lietošanas instrukciju
	Ražotājs		Likvidēšanas nosacījumi
	Sērijas numurs		Maksimālā slodze

7. VISPĀRĪGS APRAKSTS

7.1 Detaļu pārskats un saraksts

Atkarībā no izvēlētā ratiņkrēsla modeļa tā komplektācijā būs šādas detaļas:




A - Ratiņkrēsla pamatnes rāmis


B - Montāžas atslēgu komplekts




C - Sānu kāju balsti

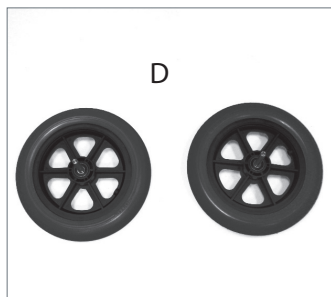


D - Mazie aizmugurējie riteņi
(diametrs 30 cm), pavadņa vadāms modelis

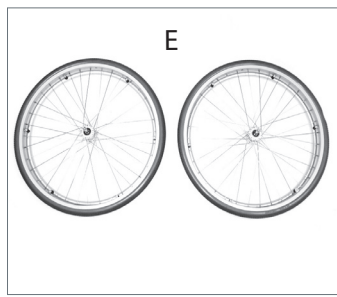

E - Lielie aizmugurējie riteņi
(diametrs 60 cm), pašpiedziņas modelis

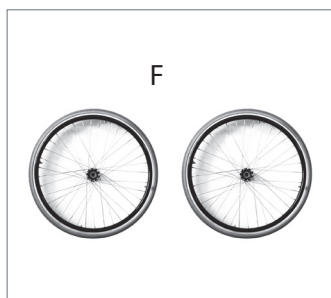

F - Samazināta diametra aizmugurējie riteņi
(diametrs 50 cm), pašpiedziņas modelis

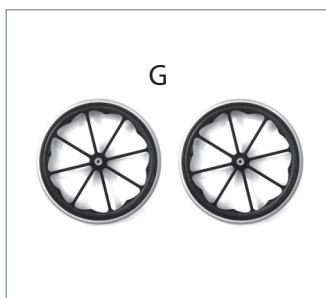

G - Lielie aizmugurējie riteņi - bērnu modelis
(diametrs 56 cm), pašpiedziņas modelis

8. MONTĀŽA/DEMONTĀŽA

8.1 Atvēršana



Piezīme: skatiet šīs lietošanas instrukcijas drošības brīdinājumus.

- Satveriet stumšanas rokturu caurules un velciet tās uz āru, vienlaikus spiežot sēdekli uz leju; pārliecinieties, ka ratiņkrēsls ir pilnībā atvērts (1. ATT.)

8.2 Salocīšana



- Stingri paceliet sēdekli un salociet ratiņkrēslu, satuvinot abus stumšanas rokturus (2. ATT.)

8.3 Roku balstu uzstādīšana/noņemšana

CP101-xx / CP102B-xx / CP110x-xx / CP115x-xx / CP520-xx / CP880-35



CP300-xx / CP310-xx / CP200B-xx / CP205B-xx




(3A. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem



(4A. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

CP620-xx / CP625-xx

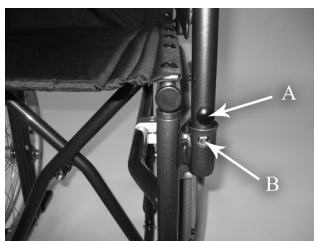

(3B. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

A - Atbloķēšanas mehānisms

B - Fiksācijas skava

- Levietojiet roku balstus aiz mugurējā stiprinājumā, pēc tam nolokiet tos uz priekšu un nostipriniet arī priekšējā balstā (3. ATT., 3A. ATT.)
- Levietojiet caurules attiecīgajos balstos, līdz fiksācijas skava pareizi nofiksējas (3B. att.)
- Lai roku balstus noņemtu, nospiediet priekšējo atbrīvošanas sviru, nolieciet roku balstus uz aiz muguri, pavelciet aiz mugurējo atbrīvošanas pogu un izņemiet tos (4. ATT., 4A. ATT.)
- Lai noņemtu roku balstu, nospiediet atbloķēšanas mehānismu (A) un paceliet balstu uz augšu (3B. att.)

8.4 Sānu vai pacejamo kāju balstu uzstādīšana/noņemšana



(5. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

- Lai uzstādītu sānu vai pacejamās kāju balstus, savietojiet balstu atveres ar attiecīgajām tapām uz ratiņkrēsla rāmja, pēc tam pagrieziet kāju balstu uz iekšu, līdz fiksācijas svira pareizi nofiksējas pie rāmja (5. ATT.)
- Lai noņemtu kāju balstu, atvienojiet tā fiksācijas sviru no ratiņkrēsla rāmja, pagrieziet balstu uz āru un izceliet to uz augšu.

8.5 Sānu kāju balstu regulēšana



(6. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

- Lai noregulētu kāju balstu garumu, atbloķējiet kreiso drošības sviru apakšdaļā, pēc tam nospiediet atsperes pogu un bīdiet kāju balsta cauruli, līdz poga atkal nofiksējas vajadzīgajā atverē. Pēc tam atkal nofiksējiet drošības sviru. (6. ATT.)

8.6 Pacejamo kāju balstu regulēšana (PAPILDAPRĪKOJUMS)




(7. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

- Lai noregulētu kāju balstu garumu, atbloķējiet kreiso drošības sviru apakšdaļā, pēc tam nospiediet atsperes pogu un bīdiet kāju balsta cauruli, līdz poga atkal nofiksējas vajadzīgajā atverē. Pēc tam atkal nofiksējiet drošības sviru. 7. ATT. (ats. P)
- Lai noregulētu kāju balstu augstumu, darbiniet 7. ATT norādīto sviru (ats. L); pēc vajadzīgā regulējuma iestatīšanas atļaidiet sviru, lai kāju balstus droši nofiksētu.

LT

8.7 Mazo aizmugurējo riteņu uzstādīšana/noņemšana (tikai NEXT, DUAL un SKINNY modeļiem) 30 cm diametra aizmugurējie riteņi jāievieto rāmja zemākajā atverē.

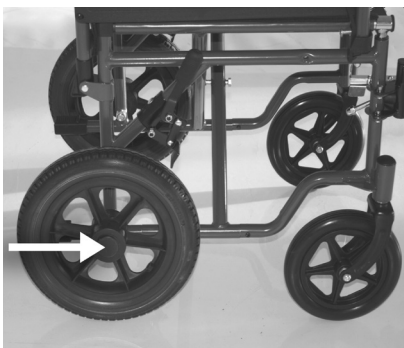

(8. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

Riteņiem ar ātrās atbrīvošanas mehānismu


- Noņemiet plastmasas aizbāžņus un ievietojiet riteņus, spiežot tos rāmja virzienā, līdz automātiskais fiksācijas mehānisms pareizi nofiksējas (8. att.)
- Lai riteņi noņemtu, nospiediet pogu riteņa diska centrā, atbrīvojiet fiksatoru un izvelciet riteņi uz āru (8. att.)

Riteņiem ar fiksētu asi (tikai SKINNY modelim)

- Levītojiet mazo riteņi un nostipriniet to ar komplektā iekļauto uzgriezni.
- Lai riteņi noņemtu, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni un izvelciet riteņi uz āru.

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

8.8 Bremžu regulēšana ar maziem aizmugurējiem riteņiem (tikai NEXT, DUAL un SKINNY modeļiem)

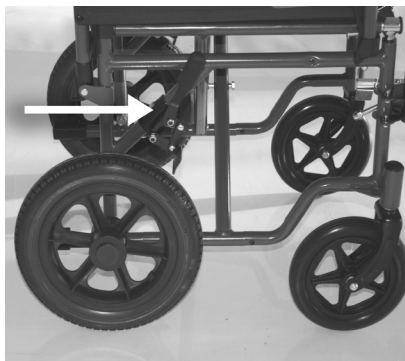

(9. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

- Ja aizmugurējo riteņu diametrs ir 30 cm, bremze jānovieto uz rāmja rievotās daļas, kā parādīts 9. att., un bremžu slīdnis jānostiprina pie balsta ar abām sešstūra ligzdas skrūvēm.

Piezīme: Noregulējiet bremžu slīdņa attālumu no riteņa tā, lai, aktivizējot bremzi, tas radītu pietiekamu spiedienu un droši bloķētu riteņi.

8.9 Lielo aizmugurējo riteņu uzstādīšana/noņemšana (tikai NEXT GO, DUAL GO un SKINNY GO modeļiem)

60 cm diametra aizmugurējie riteņi jāievieto rāmja centrālajā atverē.



Riteņiem ar ātrās atbrīvošanas mehānismu

- Noņemiet plastmasas aizbāžņus un ievietojiet riteņus, spiežot tos rāmja virzienā, līdz automātiskais fiksācijas mehānisms pareizi nofiksējas (10. ATT.)
- Lai riteņi noņemtu, nospiediet pogu riteņa diska centrā, atbrīvojiet fiksatoru un izvelciet riteņi uz āru (10. ATT.)

(10. ATT.) Attēls paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

Riteņiem ar fiksētu asi (tikai SKINNY GO modelim)

- Levietojiet lielo riteņi un nostipriniet to ar komplektā iekļauto uzgriezni.
- Lai riteņi noņemtu, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni un izvelciet riteņi uz āru.

8.10 Bremžu regulēšana ar lieliem aizmugurējiem riteņiem (tikai DUAL GO modelim)



- Ja aizmugurējo riteņu diametrs ir 60 cm, bremze jānovieto uz rāmja rievotās daļas, kā parādīts 11. ATT., un bremžu slīdnis jānostiprina pie balsta ar abām sešstūra ligzdas skrūvēm.

Piezīme: Noregulējiet bremžu slīdņa attālumu no riteņa tā, lai, aktivizējot bremzi, tas radītu pietiekamu spiedienu un droši bloķētu riteņi.

9. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES

- Vienmēr pārbaudiet mehānisko detaļu nodilumu, lai ierīces lietošana būtu pilnīgi droša cilvēkiem un mantai.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi samontēta, īpašu uzmanību pievēršot aizmugurējo riteņu pareizai ievietošanai.
- Pārbaudiet, vai sēdekļis ir pilnībā atvērts un nofiksēts galējā stāvoklī (ja nav, vēlreiz stingri piespiediet sēdekli uz leju rāmja virzienā).
- Pārbaudiet, vai aizmugurējo riteņu bremzes darbojas pareizi.

10. BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU

- Ratiņkrēslu nedrīkst izmantot kā sēdekli mehāniskajā transportlīdzeklī.
- Vienmēr pārliecinieties, ka bremžu mehānisms ir pareizi noregulēts un darbojas.
- Lietojot ratiņkrēslu, uzmanieties, lai pirksti netiktu iespiesti kustīgajās detaļās, piemēram, riteņos vai bremzēs.
- Ņemiet vērā, ka ārēju siltuma avotu, piemēram, saules gaismas, iedarbībā ratiņkrēsla virsmas temperatūra var paaugstināties.

11. LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Piezīme: Skatiet šīs lietošanas instrukcijas vispārīgos brīdinājumus.



UZMANĪBU!

- Patstāvīga iekāpšana ratiņkrēslā un izkāpšana no tā ir potenciāli bīstama darbība: dariet to tikai tad, ja jūsu fiziskās spējas to ļauj, un ievērojiet piesardzību.
- Neatbalstieties pret noņemamām detaļām; izmantojiet sēdekļa rāmi.

IEKĀPJOT RATIŅKRĒSLĀ VAI IZKĀPJOT NO TĀ, NEBALSTIET ĶERMEŅA SVARU UZ KĀJU BALSTIEM — APGĀŠANĀS RISKS!!!

11.1 Iekāpšana ratiņkrēslā

1. Piebīdiet ratiņkrēslu pēc iespējas tuvāk sev un novietojiet to sev blakus.
2. Nofiksējiet aizmugurējo riteņu bremzes; lai pēc iespējas atvieglotu iekāpšanu ratiņkrēslā, ieteicams noņemt roku balstu tajā pusē, kurā veic pārsēšanos.
3. Atbalstieties ar rokām pret rāmja konstrukciju un lēnām nolaidieties uz sēdekļa.

11.2 Izkāpšana no ratiņkrēsla

1. Novietojiet ratiņkrēslu pēc iespējas tuvāk sēdvietai, uz kuru jāpārsēžas.
2. Nofiksējiet aizmugurējo riteņu bremzes; lai pēc iespējas atvieglotu izkāpšanu no ratiņkrēsla, ieteicams noņemt roku balstu tajā pusē, kurā veic pārsēšanos.
3. Atbalstieties ar rokām uz tās sēdvietas rāmja, uz kuru jāpārsēžas, pacelieties un lēnām pārvietojieties uz to.

11.3 Pakāpieni un augstuma starpības (padomi to patstāvīgai pārvarēšanai)



UZMANĪBU!

Šie paņēmieni ir paredzēti tikai pieredzējušiem ratiņkrēslu lietotājiem. Visos pārējos gadījumos lūdziet pavadona palīdzību!

BRAUKŠANA AUGŠUP

Piebrauciet pie pārvaramās apmales vai pakāpiena.

Līdzsvarojiet ratiņkrēslu uz aizmugurējiem riteņiem, priekšējos riteņus paceļot tik augstu, lai tos varētu novietot uz pārvaramā šķēršļa. Nolieciet ķermeņa augšdaļu uz priekšu un spēcīgi grūdiet uz priekšu aizmugurējo riteņu piedziņas stīpas. Turpiniet grūst, līdz arī aizmugurējie riteņi ir uzbraukuši uz šķēršļa.

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

BRAUKŠANA LEJUP

Lai pārvarētu augstuma starpību lejup, veiciet darbības apgrieztā secībā. Novietojiet ratiņkrēsli aizmuguri pie pārvaramās augstuma starpības, stingri turiet aizmugurējo riteņu piedziņas stīpas un lēnām nobrauciet no pakāpiena vai šķēršļa; pēc tam līdzsvaroiet ratiņkrēsli uz aizmugurējiem riteņiem, nedaudz paceļiet priekšējos riteņus un uzmanīgi pabeidziet nobraukšanu.



UZMANĪBU!

Šo paņēmieni nav ieteicams izmantot, ja augstuma starpība pārsniedz 10 cm!!!

11.4 Roku balstu lietošana

Roku balsti var būt tikai nolokāmi, tikai noņemami vai gan nolokāmi, gan noņemami:

ROKU BALSTA NOLIEKŠANA - Šī funkcija ievērojami atvieglo iekāpšanu ratiņkrēslā un izkāpšanu no tā. Lai noliektu roku balstu, nospiediet priekšējo atbrīvošanas sviru un pagrieziet balstu uz aizmuguri.

11.5 Pašpiedziņas riteņu lietošana

Lielie 50/60 cm diametra aizmugurējie riteņi ir paredzēti ratiņkrēsla vadīšanai pašpiedziņas režīmā. Satveriet riteņa piedziņas stīpu un virziet to vajadzīgajā virzienā.

11.6 Mazo riteņu lietošana

Mazie 30 cm diametra aizmugurējie riteņi ir paredzēti, lai pavadonis vadītu ratiņkrēslu, turot tā aizmugurējos stumšanas rokturus.

11.7 Mazo riteņu izmantošana šaurās ejās (standarta aprīkojums modeļiem ar ātrās atbrīvošanas mehānismu)

Šie riteņi ir paredzēti tikai īslaicīgai ratiņkrēsla pārvietošanai īpaši šaurās vietās (piemēram, caur lifta durvīm). Lai lietotu šos mazos riteņus, paceliet ratiņkrēslu un noņemiet aizmugurējos riteņus, pēc tam pārvietojiet ratiņkrēslu, atbalstot tā aizmuguri uz mazajiem riteņiem, un beigās uzstādiet aizmugurējos riteņus atpakaļ.

11.8 Pārvadāšana transportlīdzekļos

Ratiņkrēsls ir konstruēts tā, lai to varētu viegli pārvadāt. Pēc kāju un roku balstu noņemšanas ratiņkrēslu var salocīt un ērti novietot, piemēram, automašīnas bagāžas nodalījumā. Ja vietas trūkuma dēļ tas nav iespējams, novietojiet ratiņkrēslu aizmugurējā sēdekļa priekšā tā, lai tas būtu stabils un nevarētu apgāzties vai slidēt. Ja iespējams, nostipriniet ratiņkrēslu ar transportlīdzekļa drošības jostu.

12. APKOPE

ARDEA ONE by Moretti S.p.A. sērijas ierīces pirms laišanas tirgū tiek rūpīgi pārbaudītas un marķētas ar CE marķējumu. Pacienta un ārsta drošības nolūkā ieteicams vismaz reizi 2 gados nodot izstrādājumu ražotājam vai pilnvarotai laboratorijai, lai pārbaudītu tā piemērotību lietošanai. Remonta gadījumā drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Pirms ierīces lietošanas veiciet visas pārbaudes, kas norādītas šīs lietošanas instrukcijas sadaļā "PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES". Ratiņkrēsliem ARDEA ONE nepieciešama tikai neliela un vienkārša periodiska apkope; turpmāk uzskaitītas regulāri veicamās pārbaudes:

Bremžu darbība	reizi mēnesī
Sēdekļa tīrīšana	pēc vajadzības

13. TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

13.1 Pārvalku un polsterējuma tīrīšana

Pārvalki un polsterējums ir izgatavoti no neilona. Tos var tīrīt ar ūdeni un neitrālām ziepēm.

13.2 Rāmja un metāla detaļu tīrīšana

Rāmi un metāla detaļas var tīrīt ar ūdeni un neitrālām ziepēm; pēc tam nosusiniet tās ar mīkstu drānu, lai nesaskrāpētu rāmja krāsojumu.

13.3 Riteņu un bremžu tīrīšana

Arī riteņus var tīrīt ar ūdeni un neitrālām ziepēm. Īpaši rūpīgi nosusiniet riteņus: Ratiņkrēsla lietošana, kamēr riteņi vēl ir mitri, var būt ļoti bīstama.

13.4 Dezinfekcija

Ja izstrādājums jādezinficē, izmantojiet parastu dezinficējošu tīrīšanas līdzekli.

Piezīme: Nekādā gadījumā nelietojiet skābus vai sārmainus līdzekļus vai šķīdinātājus, piemēram, acetonu vai atšķaidītāju.

14. LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI

Likvidējot ierīci, nekādā gadījumā neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīci ieteicams nodot pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumā, lai izmantotos materiālus varētu pārstrādāt.

15. REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI

Informāciju par rezerves daļām un piederumiem skatiet Moretti vispārējā katalogā.

16. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

16.1 Izmēri

IZMĒRI UN SVARS

Izmēri (cm)																	
CP101-38																	
CP101-40																	
CP101-43	113	83	43	90	74	49	42-56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120	
CP101-46								46		63,5							
CP101-48								48		65							
CP102B-38								38		56							
CP102B-40								40		58							
CP102B-43	113	83	43	90	74	49	42-56	43	43	61	27	17,5	60	20	-	120	
CP102B-45								45		63							
CP102B-46								46		63,5							
CP102B-48								48		65							
CP110x-40								40		58							
CP110x-43								43		61							
CP110x-46	105	81	43	90	73	49	41-56	46	42	64	26	18,5	60	20	-	150	
CP110x-48								48		66							
CP110x-50								50		68							
CP200B-38								38		56							
CP200B-40								40		58							
CP200B-43								43		61							
CP200B-45	113	81	42	90	72-80	49	41-56	45	41	63	29	19,5	60	20	4	150	
CP200B-46								46		64							
CP200B-48								48		66							
CP200B-50								50		68							

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

IZMĒRI UN SVARS

Izmēri (cm)																		
CP300-50																		
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43-57	55	41	78	32	26	60	20	-	200		
CP300-60								60		83								
CP620-40								40		51								
CP620-43								43		54								
CP620-46	100	73	41	92	80	53	45-57	46	37	57	26	16,5	50	18	-	110		
CP620-48								48		60								
CP880-35	94	74	36	86-99	62	42	37-42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100		
Izmēri (cm)																		
CP115x-40								40		53								
CP115x-43								43		56								
CP115x-46	98	75	41	92	76	50	41-56	46	43	58,5	25	16	30	20	-	150		
CP115x-48								48		61								
CP115x-50								50		63								
CP205B-38								38		52								
CP205B-40								40		54								
CP205B-43								43		57								
CP205B-45	104	76	42	90	71-80	49	41-55	45	41	59	25	16,7	30	20	4	150		
CP205B-46								46		59,5								
CP205B-48								48		62								
CP205B-50								50		64								
CP310-50								50		63								
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43-57	55	39	68	30	21	32	20	-	200		
CP520-40								40		55								
CP520-43								43		58								
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42-56	45	42	60	26	17,5	30	20	-	150		
CP520-46								46		60,5								
CP520-48								48		63								
CP625-40								40		51								
CP625-43	88	61	41	92	80	53	45-57	43	37	54	26	16,5	30	18	-	110		

*Izmēri var atšķirties par $\pm 0,5$ cm

16.2 Tehniskās specifikācijas

- Tērauda rāmis
- Maksimālā slodze CP101, CP102B modeļiem: **120 kg** - CP110x, CP115x, CP200B, CP205B, CP520 modeļiem: **150 kg** - CP300, CP310 modeļiem: **200 kg** - CP620, CP625 modeļiem: **110 kg** - CP880-35 modelim: **100 kg**
- Priekšējie PU riteņi, diametrs 20 cm
- Bērnu modeļa priekšējie PU riteņi, diametrs 15 cm
- Mazie aizmugurējie PU riteņi, diametrs 30 cm
- Lielie aizmugurējie PU riteņi, diametrs 60 cm
- Lielie aizmugurējie PU riteņi šaurām ejām, diametrs 50 cm
- Bērnu modeļa lielle aizmugurējie riteņi, diametrs 56 cm
- Neilona pārvalks
- Izturība pret aizdegšanos: Pārvalka un polsterējuma materiāli ir pārbaudīti, izmantojot standartā EN1021-1/2 noteiktās metodes.
- Atsauces standarti: EN 12183
- Darba vides temperatūra: $-20^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$
- Letiecāmie uzglabāšanas apstākļi: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, vienmēr prom no tiešiem siltuma avotiem, piemēram, saules gaismas. (ieteicamā temperatūra no $+10^{\circ}\text{C}$ līdz $+40^{\circ}\text{C}$)

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

17. GARANTĪJA

Visiem Moretti izstrādājumiem tiek nodrošināta 2 (divu) gadu garantija pret materiālu un ražošanas defektiem, skaitot no izstrādājuma pārdošanas datuma, izņemot turpmāk norādītos izņēmumus un ierobežojumus. Šī garantija nav spēkā, ja izstrādājums ir lietots nepareizi, ļaunprātīgi izmantots vai pārveidots vai ja nav ievērota lietošanas instrukcija. Izstrādājuma pareizais paredzētais nolūks ir norādīts lietošanas instrukcijā. Moretti neatbild par izrietošiem zaudējumiem, miesas bojājumiem vai jebkādu citu kaitējumu, ko izraisījis vai ar ko saistīta iekārtas uzstādīšana un/vai lietošana, ja uzstādīšana un/vai lietošana nav veikta, stingri ievērojot uzstādīšanas, montāžas un lietošanas rokasgrāmatās sniegtos norādījumus. Moretti garantija neattiecas uz Moretti izstrādājumu bojājumiem vai defektiem, kas radušies šādos apstākļos: dabas katastrofas; neatļauta apkošana vai remonts; elektroapgādes traucējumu radīti bojājumi (ja piemērojams); tādu detaļu vai komponentu izmantošana, ko nav piegādājis Moretti; vadlīniju un lietošanas instrukciju neievērošana; neatļautas izmaiņas; transportēšanas bojājumi (izņemot Moretti sākotnējo piegādi); rokasgrāmatā norādītās apkopes neveikšana. Šī garantija neattiecas uz dilstošām detaļām, ja bojājums radies izstrādājuma normālas lietošanas dēļ.

17.1 Remonts

Garantijas remonts: Ja garantijas laikā Moretti izstrādājumam atklājas materiālu vai ražošanas defekti, Moretti kopā ar klientu izvērtēs, vai uz attiecīgo defektu attiecas garantija. Moretti pēc saviem ieskatiem var nomainīt vai saremontēt izstrādājumu, uz kuru attiecas garantija, norādītā Moretti izplatītāja telpās vai savā uzņēmumā. Ja tiek konstatēts, ka remonts ietilpst garantijas darbības jomā, ar izstrādājuma remontu saistītās darba izmaksas var segt Moretti. Remonts vai maiņa neatjauno un nepagarina garantiju.

Izstrādājuma, uz kuru neattiecas garantija, remonts: Izstrādājumu, uz kuru neattiecas garantija, var atgriezt remontam tikai pēc iepriekšējas Moretti klientu apkalpošanas dienesta atļaujas saņemšanas. Ar ārpusgarantijas remontu saistītās darba un piegādes izmaksas pilnībā sedz klients vai izplatītājs. Ārpusgarantijas izstrādājumu remontam tiek nodrošināta 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no salabotā izstrādājuma saņemšanas dienas.

Izstrādājumi, kuriem nav konstatēti defekti: Klients tiks informēts, ja pēc atgrieztā izstrādājuma pārbaudes un testēšanas Moretti secinās, ka izstrādājumam nav defektu. Izstrādājums tiks atgriezts klientam, un ar atgriešanu saistītās piegādes izmaksas segs klients.

17.2 Rezerves daļas

Oriģinālajām Moretti rezerves daļām ir 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no rezerves daļas saņemšanas dienas.

17.3 Atbildības ierobežojumi

Izņemot šajā garantijā skaidri noteikto un tiesību aktos atļautajās robežās, Moretti nesniedz nekādus citus tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus, tostarp apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, piemērotību konkrētam nolūkam, tiesību nepārkāpšanu un neiejaukšanos. Moretti negarantē, ka Moretti izstrādājuma lietošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Tiesību aktos noteikto iespējamo netiešo garantiju ilgums tiesību aktos atļautajās robežās ir ierobežots līdz garantijas periodam. Dažos štatos vai valstīs nav atļauts ierobežot netiešas garantijas ilgumu vai izslēgt vai ierobežot nejaušus vai netiešus zaudējumus saistībā ar patēriņa precēm. Šādos štatos vai valstīs daži šīs garantijas izņēmumi vai ierobežojumi uz lietotāju var neattiekties. Šī garantija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriago (Arezzo) Tālrunis: +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-pasts: info@morettispa.com

RAŽOTS KTR

** Jaunāko pieejamo lietošanas instrukcijas versiju skatiet mūsu tīmekļa vietnē.*

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com