

MOPEDIA®

ES

MA P0400X-G_P0403x_P0405x_P0410x_P0425x_P0430x 01 A_ES_11 2025


SILLÓNES ELEVABLES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

ES

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES.....	PAG.4
6. SÍMBOLOS.....	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.5
7.1 Vista y lista de las partes.....	pag. 6
8. MONTAJE.....	PAG.6
8.1 Montaje para todos los modelos excepto PO403 (CHLOE).....	pag. 6
8.2 Montaje PO403-xx (modelo Chloee).....	pag.6
9. ADVERTENCIAS PARA EL USO.....	PAG.7
10. MODO DE USO.....	PAG.8
10.1 Roller System.....	pag. 9
11. MANTENIMIENTO.....	PAG.9
12. RESOLUCION DE PROBLEMAS.....	PAG.10
13. LIMPIEZA.....	PAG.10
14. CUIDADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.....	PAG.11
15. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN.....	PAG.11
15.1 Condiciones de eliminación generales.....	pag. 11
15.2 Advertencias para la eliminación correcta del producto según la directiva europea 2012/19/UE:.....	pag. 12
16. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	PAG.12
17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG.15
17.1 Medidas y pesos*.....	pag. 15
17.2 Especificaciones técnicas.....	pag. 16
17.3 Especificaciones técnicas generales.....	pag. 17
17.4 Características de los tejidos.....	pag. 17
18. ACCESORIOS.....	PAG.17
18.1 Instrucciones para la instalación del Roller System.....	pag. 18
19. GARANTÍA.....	PAG.19
20. REPARACION.....	PAG.19
20.1 Reparación en garantía.....	pag. 19
20.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía.....	pag. 20
20.3 Productos no defectuosos.....	pag. 20
21 REPUESTOS.....	PAG.20
22. CLÁUSULAS EXONERATIVAS.....	PAG.20

 Producto sanitario de clase I
 REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
 del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios

1. CÓDIGOS

PO400G-XL	Sillón Ninfea sin Roller System version XL - Tejido FRANCIA CORTA Gris
PO403G	Sillón Chloe sin Roller System - Tejido INCANTO Gris Perla
PO403R	Sillón Chloe sin Roller System - Tejido INCANTO Rosa antiguo
PO405G	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Gris
PO405S	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Arena
PO405T	Sillón Dafne con Roller System - Tejido INCANTO Tortola
PO410B	Sillón Agave con Roller System - Tejido LUX Azul
PO410S	Sillón Agave con Roller System - Tejido LUX Arena
PO425B	Sillón Myrtho Class con cuatro ruedas - Version cama - Tejido LUX Blu
PO425S	Sillón Myrtho Class con cuatro ruedas - Version cama - Tejido LUX Arena
PO430G	Sillón Clyzia Zero gravity - Tejido INCANTO Gris
PO430T	Sillón Clyzia Zero gravity - Tejido INCANTO Tortola

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un sillón elevable de la línea MOPEDIA fabricado por Moretti. Los Sillones elevables MOPEDIA fabricados por Moretti han sido diseñados y realizados para satisfacer todas tus exigencias, con un uso práctico, correcto y seguro. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se recomienda leer el manual completo detenidamente antes de utilizar el sillón. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

NOTA: Comprobar que ninguna de las partes del producto haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor para más instrucciones.

¡ATENCIÓN!



Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual. Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual. El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

3. FINALIDAD

Los sillones elevadores MOPEDIA están destinados a la sedestación y el reposo de pacientes en interiores.

4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI SpA y que forman parte de la familia de los SillónES ELEVABLES SANITARIOS son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.

6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

Nota: Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

5. ADVERTENCIAS GENERALES



¡ATENCIÓN!

Prestar siempre mucha atención a la presencia de partes móviles que podrían atrapar las manos y causar lesiones personales.

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el siguiente manual.
- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta.
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cartón.
- La vida útil del aparato viene determinada por el desgaste de las piezas no reparables y no supera los 10 años.
- Prestar mucha atención especialmente si hay niños presentes.
- El fabricante y el revendedor se eximen de toda responsabilidad en caso de daños a personas, animales o cosas derivados de intervenciones de personal no autorizado o del incumplimiento de las instrucciones de este manual.



¡ATENCIÓN!

Se recomienda prestar la máxima atención a las reglas de comportamiento y seguridad para evitar accidentes.

- No utilizar los Sillónes en ambientes húmedos.
- No fumar, no usar llamas libres, objetos incandescentes y equipos que originen chispas, no depositar materiales combustibles sobre el producto o cerca de él: **peligro de incendio**.
- Poner los Sillónes sobre pavimentos nivelados y resistentes.
- Utilizar accesorios y componentes originales.
- Desconectar inmediatamente el cable eléctrico de la red en caso de irregularidades de funcionamiento, y controlar eventuales dispersiones eléctricas.
- No utilizar prolongadores eléctricos ni conexiones móviles.
- No aptos para el uso por parte de varias personas simultáneamente.
- No tirar del cable de alimentación para desconectar la clavija de la toma.
- No desconectar ni conectar la clavija con las manos mojadas.
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

6. SÍMBOLOS



Código producto



Identificación unívoca de productos



Marcado CE


















Fabricante



Lote de producción




Leer el manual de instrucciones

-  Producto sanitario
-  Peso max soportado
-  Condiciones de eliminación
-  Atención
-  Fecha de producción
-  Eliminación del producto según la directiva CE/19/2012
- IP54** Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua
-  Parte aplicada de tipo B
-  Clase de aislamiento
-  Lavado 30°
-  No blanquear
-  Limpieza en seco
-  No secar en secadora
-  Lavar a mano
-  No planchar
-  Secado en una superficie plana a la sombra

7. DESCRIPCIÓN GENERAL

Sillóns elevables, pensados para el relax y el reposo de la persona. Respaldo y asiento con relleno de densidad diferenciada, estudiados expresamente para mantener una posición correcta. Estructura de acero pintado, tejidos en poliéster. Con dos motores independientes que permiten inclinar el respaldo y el reposapiés por separado, permitiendo la regulación en varias posiciones, para leer, mirar televisión, relajarse o digerir. Los Sillóns están dotados de la función levantapiés, gracias a un motor que permite levantar a la persona. Con este dispositivo de elevación, la persona sentada es acompañada hasta una posición casi erguida y ayudada a ponerse de pie. Las regulaciones de las posiciones del respaldo y del reposapiés se efectúan con un mando a distancia dotado de cuatro teclas, de uso fácil.

7.1 Vista y lista de las partes

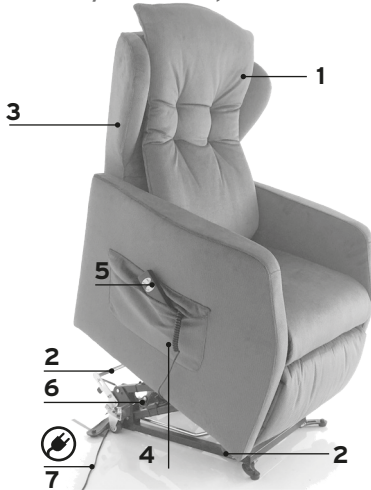

1. Sillón
2. Ruedas delanteras, pies o roller system
3. Respaldo reclinable
4. Bolsillo porta objetos
5. Mando a distancia
6. 2 motores independientes
7. Cable eléctrico

(Imagen con fines ilustrativos)

8. MONTAJE

8.1 Montaje para todos los modelos excepto PO403 (CHLOE)

Después de quitar el embalaje, asegurarse de la integridad de los componentes del sillón, comprobando que no haya partes con daños evidentes. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor. Para la conexión a la red de alimentación eléctrica, conectar a la toma eléctrica el cable con clavija del sillón. No apoyar objetos sobre el cable de alimentación ni pisarlo.

8.2 Montaje PO403-xx (modelo Chloe)

El sillón PO403 se envía con orejeras y respaldo para montar (ver fig. 1)

1. Retire la protección del soporte sobre el que se colocará el respaldo de la silla (Ver fig. 2)
2. Compruebe que el soporte sobre el que debe colocarse el respaldo en la parte trasera de la Sillón está orientado hacia el exterior (Fig 3)
3. Inserte el respaldo, haciendo coincidir las 2 juntas hasta completar la guía. (Ver fig. 4)
4. Para quitar las orejeras, basta con deslizarlas fuera del riel de apoyo. Para el respaldo, es necesario disponer de un destornillador para facilitar el desenganche del soporte de enclavamiento en la silla. (ver fig 5).



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

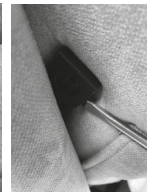


Fig. 5

Nota: Comprobar que la tensión de la toma de corriente sea del valor indicado en la etiqueta del motor.

Nota: Los trabajos eléctricos, incluso pequeños, deben ser realizados por personal profesionalmente

cualficado.

¡ATENCIÓN!



- Los daños derivados del incumplimiento de las disposiciones antedichas dejarán sin efecto la garantía y la responsabilidad del fabricante.
- Al accionar los mandos, observar el entorno e impedir la presencia de personas, animales o bienes debajo de las partes en movimiento.
- El sillón se debe montar sobre una superficie horizontal. Evitar superficies débiles o irregulares.
- Antes del uso, asegurarse de que los cables de alimentación eléctrica no interfieran con el desplazamiento de las secciones, no constituyan un obstáculo y no se crucen con cables de alimentación de otros aparatos y dispositivos.
- Antes del uso, asegurarse de que nadie vaya a introducir las manos o partes del cuerpo o cualquier objeto entre las secciones en movimiento, para evitar aplastamientos.

- Coloque el sillón en una zona amplia, lejos de fuentes de calor (chimeneas, estufas, lámparas halógenas, etc.).
- Asegúrese de que el movimiento del reposapiés y del respaldo no se vea obstaculizado de ninguna manera.
- El sillón debe estar a una distancia mínima de 60 cm de cualquier obstáculo (pared, mesa, etc.).
- El sillón se suministra ya montado y listo para su uso, excepto el modelo PO403x (CHLOE); el usuario sólo tiene que conectarlo a la red eléctrica.

9. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- Conecte el cable directamente a la toma de corriente, no lo sustituya y no utilice un alargador.
- No apoye objetos, no camine ni coloque el cable de alimentación cerca de superficies calientes o fuentes de calor.
- Tenga la precaución de introducir correctamente la toma de corriente en un enchufe simple y desconéctelo, sin tirar del cable, sino del enchufe cuando realice tareas de manipulación o mantenimiento.
- No manipule los cables con las manos o la ropa mojadas y asegúrese de que el voltaje utilizado se ajusta a lo indicado en la etiqueta.
- No dañe el enchufe y/o el cable de alimentación y no los utilice si están dañados.
- Antes de sentarse en la silla, asegúrese de que el mando a distancia y su cable no estorban.
- Cuando no lo utilice, deje el sillón y con el reposapiés cerrado.
- Asegúrese de colocar siempre el sillón sobre superficies completamente planas, tanto durante su uso como fuera de él, para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento.
- No se sienta nunca sobre el reposapiés y, en general, no se sienta violentamente sobre el sillón. Evite saltar o ponerse de pie sobre el aparato.
- Asegúrese de que la persona se sienta centrando su peso en el cojín acolchado, independientemente de que la sillón se reclina o no.
- Cuando desplace la sillón, asegúrese que no esté reclinada y que el reposapiés esté elevado al menos 5 cm.
- No permita que el aparato sea utilizado indebidamente por niños y asegúrese de que siempre haya una supervisión adecuada si ellos o personas dependientes lo utilizan.
- El sillón está destinada a personas con buena salud física y mental (sin consumo de alcohol o drogas, ni enfermedades mentales u otras que provoquen alucinaciones, desequilibrios o similares)
- Asegúrese de mantener las manos y los pies alejados de los puntos de sujeción, como los mecanismos de elevación del sillón y del reposapiés, entre los huecos del respaldo o del reposabrazos.



¡ATENCIÓN!

Peligro de aplastamiento de las manos

- No utilice el aparato si alguna de las cubiertas está rasgada, con la consiguiente fuga del equipo interno.

- No utilice teléfonos móviles ni ordenadores portátiles cerca del sillón.
- Tenga cuidado con las piezas pequeñas que puedan tragarse.
- Recomendamos el uso de accesorios originales.
- Es importante que el mando a distancia sólo se utilice con una persona sentada en el sillón.
- No utilizar en ambientes muy húmedos como baños o exteriores.
- No exponga el sillón a la luz solar directa (UV) durante un periodo de tiempo prolongado.
- La funda del producto no está diseñada para ser ignífuga.
- No fume sobre o alrededor del sillón.

10. MODO DE USO

Nota: Consultar las advertencias de seguridad en este manual de instrucciones



¡ATENCIÓN!

No apoyarse ni ejercer fuerza hacia abajo cuando el respaldo esté inclinado. Riesgo de vuelco y lesiones.



¡ATENCIÓN!

No utilice nunca el sillón cuando las ruedas o el sistema de rodillos estén desbloqueados y puedan girar libremente.




¡ATENCIÓN!

El sillón no está diseñado para desplazar personas. Desplazar y mover el sillón sólo cuando esté sin ninguna persona sentada.



¡ATENCIÓN!

El correcto funcionamiento del Sillón requiere que sólo se utilice con la persona sentada y en la posición correcta

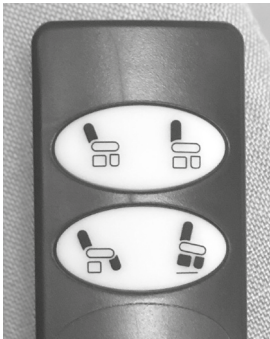

(Imagen con fines ilustrativos)



TECLA IZQ. ARRIBA: de la posición natural se pasa a la posición con respaldo bajo



TECLA IZQ. ABAJO: de la posición de pie se pasa a la posición natural; en cambio, partiendo de la posición natural, se extrae el piecero.



TECLA DCH. ARRIBA: de la posición con respaldo bajo se vuelve a la posición natural.



TECLA DCH. ABAJO: de la posición natural se pasa a la posición de pie; en cambio, partiendo de la posición con el piecero extraído, el piecero se retrae.

10.1 Roller System

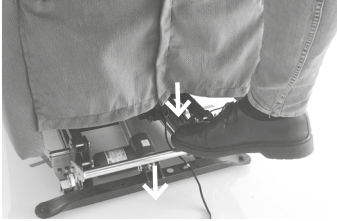


Fig.1

El Roller System viene instalado de serie en los Sillónes PO405X, PO410X. Para activar el Roller System empujar la barra con el pie (Fig.1) hacia abajo. Para desactivar el Roller System tirar de la barra con el pie hacia arriba.



¡ATENCIÓN!

No utilizar el Roller System con la persona sentada en el sillón. No subir escalones de más de 1 cm.

11. MANTENIMIENTO

Los productos de la línea MOPEDIA fabricados por Moretti que se de distribuyen y venden en los comercios han sido cuidadosamente controlados y provistos de marca CE. Para la seguridad del paciente y del médico se recomienda hacer controlar la idoneidad del producto al fabricante o a un laboratorio autorizado al menos cada 2 años. En caso de reparación, utilizar sólo repuestos y accesorios originales.

Es sumamente importante que el producto sea controlado al primer uso. En particular, comprobar:

- Los trabajos de ajuste o reparación sólo deben ser realizados por un técnico técnico cualificado.
- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza del sillón desconecte la alimentación eléctrica.
- Que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.
- Que las partes mecánicas del producto puedan moverse correctamente (respaldo, reposapiernas, brazos, ruedas, etc.).
- Compruebe que el armazón de la silla no emite chirridos o ruidos sospechosos. Si es necesario, lubrique los puntos de giro del armazón.
- Que los frenos de las ruedas funcionen correctamente *(si los hay).
- Las partes mecánicas (bisagras y pernos) deben ser controladas y lubricadas cada mes con una gota de aceite para favorecer el deslizamiento y la resistencia al desgaste.
- Verificar la integridad del cable de alimentación.
- Verificar periódicamente la eficiencia de los motores eléctricos.
- Asegurarse de que las partes electromecánicas estén libres y funcionen correctamente.
- Comprobar que las partes metálicas de movimiento del piecero no estén obstaculizadas por ningún objeto.

12. RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	RESOLUCIÓN
EL SILLON NO REALIZA LOS MOVIMIENTOS REQUERIDOS DEBIDO A PROBLEMAS MECÁNICOS	ESPACIO INSUFICIENTE AL ALCANCE DEL MOVIMIENTO DE LA SILLA	RETIRE LOS OBJETOS QUE OBSTRUYAN SU MOVIMIENTO O ALÉJELO DE LA PARED.
	OBJETO BLOQUEADO EN EL MECANISMO DE MANIPULACIÓN	INTENTE RETIRAR EL OBJETO SIN LESIONARSE, EN CASO DE QUE SE CONSIDERE UN COMPORTAMIENTO DE ALTO RIESGO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR
PROBLEMAS CON EL MANDO A DISTANCIA	PROBLEMAS CON EL MANDO A DISTANCIA CON "CLICS" AL PULSAR EL BOTÓN	EL PROBLEMA SE REFIERE A LA PARTE ELECTRÓNICA EL MANDO A DISTANCIA FUNCIONA NORMALMENTE
	PROBLEMAS CON EL MANDO A DISTANCIA SIN "CLIC" AL PULSAR EL BOTÓN	EL PROBLEMA SE REFIERE AL MANDO A DISTANCIA Y TENDRÁ QUE SER SUSTITUIDO
PROBLEMAS DE MANEJO DEBIDOS AL SISTEMA ELÉCTRICO	ENCHUFE ELÉCTRICO NO CONECTADO O MAL CONECTADO	CONECTE EL ENCHUFE A LA TOMA DE CORRIENTE
	CABLE O ENCHUFE DAÑADO	PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR
	COMPONENTES ELÉCTRICOS MAL CONECTADOS	COMPROBAR LAS CONEXIONES DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS

13. LIMPIEZA



¡ATENCIÓN!

Los Sillónes que son objeto del presente manual no son desenfundables.

Para la limpieza, desconectar la clavija de la toma de corriente. La limpieza se puede realizar con una aspiradora. En caso de suciedad persistente, utilizar detergentes limpiar regularmente los componentes mecánicos para limitar la acumulación de polvo en el cuadro con un cepillo suave.

Símbolos de lavado PO401x (Tejido FRANCIA CORTA 315gr/mq)



Lavado a 30°



No blanquear



Limpieza en seco








No secar en secadora




Símbolos de lavado PO410x; PO425x (Tejido LUX 467 gr/mq)



Lavar a mano

-  No blanquear
-  Non planchar
-  Secado en una superficie plana a la sombra
-  No secar en secadora
-  Limpieza en seco

Símbolos de lavado PO403x; PO405x; PO430x (Tejido INCANTO 400 gr/mq)

-  Lavado a 30°
-  No blanquear
-  No secar en secadora
-  Limpieza en seco



¡ATENCIÓN!

Sólo los tejidos INCANTO y LUX son hidrófugos.

13.1 Eliminación de las manchas más comunes

- Seque la mancha lo antes posible con papel secante antes de tratarla con una solución de agua tibia y jabón neutro. pruebe primero el producto en una pequeña porción para asegurarse de que no se ve afectada;
- Utilice un paño suave humedecido con la solución de agua y jabón y limpie suavemente hasta eliminarla por completo, aclare con agua pura y seque con un paño limpio;
- No utilice detergentes agresivos, quitamanchas o desengrasantes ya que pueden dañar el material.



¡ATENCIÓN!

No utilizar sustancias abrasivas, ácidos, alcohol, detergentes a base de cloro, desinfectantes o acetona, ya que estas sustancias provocan la abrasión de las partes de plástico y la oxidación de las superficies metálicas.

El fabricante no se hará responsable de daños causados por el uso de materiales que puedan deteriorar la superficie del producto o sustancias químicas corrosivas empleadas durante la limpieza.



¡ATENCIÓN!

Los productos esterilizantes son corrosivos. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto accidental, lavar la parte afectada con abundante agua caliente y consultar inmediatamente a un médico.

14. CUIDADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

- Comprobar que ningún cable del sillón esté cortado o dañado.
- En caso de daños (independientemente de la gravedad) contactar con el revendedor.
- Mantener los circuitos electrónicos lejos de la humedad y las altas temperaturas.

15. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

15.1 Condiciones de eliminación generales

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.



15.2 Advertencias para la eliminación correcta del producto según la directiva europea 2012/19/UE:

Al final de su vida útil, el producto no se deberá eliminar junto con los desechos urbanos. El producto se deberá entregar a los centros de recogida selectiva designados por los ayuntamientos o a los distribuidores que suministren este servicio. La eliminación selectiva del producto permite evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, así como recuperar los materiales que lo componen para obtener un importante ahorro de energías y recursos. Para destacar la obligación de eliminar por separado los aparatos electromédicos, en el producto se ha colocado el símbolo del contenedor tachado.

16. DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El producto SILLÓN ELEVABLE ha sido construido para el uso en el ambiente electromagnético especificado en las tablas a continuación. El usuario del producto SILLÓN ELEVABLE debe asegurarse de que se cumplan efectivamente las condiciones especificadas.

Tabla 1

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE		
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR EL USO EN DICHO AMBIENTE.		
PRUEBAS DE EMISIÓN	CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
EMISIONES RF CISPR 11	GRUPO 1	EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE UTILIZA ENERGÍA RF SÓLO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA. POR ESO SUS EMISIONES RF SON MUY BAJAS Y NO ORIGINAN INTERFERENCIAS EN LOS APARATOS ELECTRÓNICOS CERCANOS.
EMISIONES RF CISPR 11	CLASE B	EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ES ADECUADO PARA EL USO EN TODOS LOS EDIFICIOS, INCLUIDOS LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA Y AQUELLOS DIRECTAMENTE CONECTADOS A LA RED DE ALIMENTACIÓN PÚBLICA DE BAJA TENSIÓN QUE ALIMENTA LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA.
EMISIONES ARMÓNICAS EN 61000-3-2	CONFORME	
EMISIONES DE FLUCTUACIONES DE TENSIÓN/ FLICKER EN 61000-3-3	CONFORME	

Tabla 2

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE			
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE GARANTIZAR EL USO EN DICHO AMBIENTE.			
PRUEBAS DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV CONTACTO ± 8 KV AIRE	± 4 KV CONTACTO ± 8 KV AIRE	INFORMACIÓN VÁLIDA PARA EL USO DEL PRODUCTO. LA PAVIMENTACIÓN DEBE SER DE MADERA, CEMENTO O CERÁMICA. SI LA PAVIMENTACIÓN ESTÁ REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, LA HUMEDAD RELATIVA DEBE SER DE AL MENOS EL 30%.
BURST Y TRANSISTORES VELOCES EN61000-4-4	1KV - 5KHZ ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL, 2000V - 5KHZ ACOPLAMIENTO PARALELO	1KV - 5KHZ ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL, 2000V - 5KHZ ACOPLAMIENTO PARALELO	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
TENSIONES DE IMPULSO EN 61000-4-5	2KV ACOPLAMIENTO PARALELO; 1KV ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL	2KV ACOPLAMIENTO PARALELO; 1KV ACOPLAMIENTO INDIVIDUAL	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
BREVES AUSENCIAS DE TENSIÓN, BREVES INTERRUPCIONES Y VARIACIONES DE LA TENSIÓN EN LAS LÍNEAS DE ENTRADA DE LA ALIMENTACIÓN. EN 61000-4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
EMISIONES CONDUCCIDAS POR RADIOFRECUENCIA EN55011	0,15 ÷ 0,5 MHZ 79 DBµV 0,5 ÷ 30 MHZ 73 DBµV	0,15 ÷ 0,5 MHZ 79 DBµV 0,5 ÷ 30 MHZ 73 DBµV	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.
EMISIONES RADIADAS POR RADIOFRECUENCIA EN55011	CLASE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M) CLASE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	CLASE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M) CLASE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DE RED DEBERÍA SER LA DE UN TÍPICO AMBIENTE COMERCIAL U HOSPITALARIO.

Tabla 3

ES


GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE			
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL PRODUCTO DEBE ASEGURARSE DE QUE EL USO SE EFECTÚE EN DICHO AMBIENTE.			
PRUEBAS DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO-GUÍA
INTERFERENCIAS CONDUCTIDAS, INDUCIDAS POR CAMPOS A RADIOFRECUENCIA 61000-4-6	3 V EF. DE 150 KHZ A 80 MHZ	3 V EF. DE 150 KHZ A 80MHZ	<p>NO UTILIZAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RF PORTÁTILES Y MÓVILES CERCA DEL SILLÓN ELEVABLE NI DE SUS CABLES, Y MANTENER LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN RECOMENDADA, CALCULADA CON LA ECUACIÓN APLICABLE A LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR.</p> <p>DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS $D = 1,2\sqrt{P}$ DE 80 MHZ A 800 MHZ $D = 2,3\sqrt{P}$ DE 800 MHZ A 2,5 GHZ</p> <p>DONDE "P" INDICA LA POTENCIA NOMINAL MÁXIMA SUMINISTRADA POR EL TRANSMISOR EN VATIOS (W) SEGÚN EL FABRICANTE DEL TRANSMISOR Y "D" ES LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN RECOMENDADA EXPRESADA EN METROS (M). LA INTENSIDAD DEL CAMPO DE LOS TRANSMISORES RF FIJOS, DETERMINADA POR UN ESTUDIO ELECTROMAGNÉTICO IN SITU, PODRÍA SER INFERIOR AL NIVEL DE CONFORMIDAD EN CADA INTERVALO DE FRECUENCIA. PUEDE HABER INTERFERENCIA EN PROXIMIDAD DE APARATOS MARCADOS CON EL SIGUIENTE SÍMBOLO:</p> 
INTERFERENCIAS A RADIOFRECUENCIA EN 6100-4-3	3 V/M DE 80 MHZ A 2,5 GHZ	3 V/M DE 80 MHZ A 2.5 GHZ	
<p>NOTA 1: A 80 MHZ Y 800 MHZ SE APLICA LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN PARA EL INTERVALO DE FRECUENCIA MÁS ALTO.</p> <p>NOTA 2: ESTAS PAUTAS PODRÍAN NO SER VÁLIDAS EN TODAS LAS SITUACIONES. LA PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ES INFLUIDA POR LA ABSORCIÓN Y LA REFLEXIÓN POR PARTE DE ESTRUCTURAS, OBJETOS Y PERSONAS.</p>			
<p>^A LAS INTENSIDADES DE CAMPO EMITIDAS POR LOS TRANSMISORES FIJOS, COMO LAS ESTACIONES BASE PARA RADIOTELÉFONOS (MÓVILES E INALÁMBRICOS) Y RADIOMÓVILES DE TIERRA, RADIOAFICIONADOS, TRANSMISIONES DE RADIO EN AM Y FM Y TRANSMISIONES TELEVISIVAS, NO SE PUEDEN PREVER DE MANERA TEÓRICA CON PRECISIÓN. PARA EVALUAR EL AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO ORIGINADO POR TRANSMISORES RF FIJOS ES NECESARIO REALIZAR UN ESTUDIO ELECTROMAGNÉTICO IN SITU. SI LA INTENSIDAD DE CAMPO MEDIDA EN EL LUGAR DONDE SE UTILIZA EL SILLÓN ELEVABLE SUPERA EL NIVEL DE CONFORMIDAD RF APLICABLE MENCIONADO, EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL SILLÓN ELEVABLE SE DEBERÁ MANTENER BAJO OBSERVACIÓN. SI SE OBSERVAN PRESTACIONES ANÓMALAS, PODRÍA SER NECESARIO ADOPTAR OTRAS MEDIDAS, COMO CAMBIAR LA ORIENTACIÓN O LA POSICIÓN DEL SILLÓN ELEVABLE.</p> <p>^B LAS INTENSIDADES DE CAMPO EN UN INTERVALO DE FRECUENCIA DE 150 KHZ A 80 MHZ DEBERÍAN SER INFERIORES A 3 V/M.</p>			

Tabla 4

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES Y MÓVILES Y EL SILLÓN ELEVABLE.			
EL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN UN AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO DONDE LAS INTERFERENCIAS RF ESTÉN BAJO CONTROL. EL CLIENTE O EL USUARIO DEL SILLÓN ELEVABLE PUEDE CONTRIBUIR A EVITAR INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS MANTENIENDO UNA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LOS APARATOS DE COMUNICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA PORTÁTILES Y MÓVILES (TRANSMISORES) RESPECTO DEL CARGADOR DE BATERÍAS DEL SILLÓN ELEVABLE DURANTE LA CARGA Y RESPECTO DEL PRODUCTO SILLÓN ELEVABLE SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN, EN BASE A LA POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA DE LOS APARATOS DE RADIOCOMUNICACIÓN.			
PRUEBAS			
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MÁXIMA DEL TRANSMISOR W	DURANTE EL USO DEL SILLÓN ELEVABLE	DURANTE EL USO DEL SILLÓN ELEVABLE	DURANTE EL USO DEL SILLÓN ELEVABLE
	DE 150 KHZ A 80 MHZ D = 1,2√P	DE 80 KHZ A 800 MHZ D = 1,2√P	DE 800 KHZ A 2,5 GHZ D = 1,2√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
<p>PARA LOS TRANSMISORES CUYA POTENCIA DE SALIDA NOMINAL MÁXIMA NO APAREZCA INDICADA, LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN RECOMENDADA EN METROS (M) PUEDE DETERMINARSE UTILIZANDO LA ECUACIÓN APLICABLE A LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR, DONDE P ES LA POTENCIA DE SALIDA NOMINAL MÁXIMA DEL TRANSMISOR EN VATIOS (W) SEGÚN LO INDICADO POR EL FABRICANTE DEL TRANSMISOR.</p> <p>NOTA 1: A 80 MHZ Y 800 MHZ SE APLICA LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN PARA EL INTERVALO DE FRECUENCIA MÁS ALTO.</p> <p>NOTA 2: ESTAS PAUTAS PODRÍAN NO SER VÁLIDAS EN TODAS LAS SITUACIONES. LA PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ES INFLUIDA POR LA ABSORCIÓN Y LA REFLEXIÓN POR PARTE DE ESTRUCTURAS, OBJETOS Y PERSONAS</p>			

17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

17.1 Medidas y pesos*

Medida y peso



PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	150	10	130	58
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58

* Al tratarse de un producto tapizado, las medidas pueden variar unos cm.

17.2 Especificaciones técnicas



PO400G-XL (NINFEA Tejido FRANCIA CORTA)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido antimancha;
- Funda de sillón y cubrebrazos incluidos;
- Relleno de poliuretano expandido indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 kg/m³, piecero 18 kg/m³, asiento 35 kg/m³, brazos 40 kg/m³);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función de bipedestación;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- 2 pies frontales;

PO403x (CHLOE Tejido INCANTO)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido hidrófugo y antimancha;
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m³, reposapiés 18 Kg/m³, asiento 35 Kg/m³, reposabrazos 40 Kg/m³);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función de bipedestación elevación vertical de aprox. 7 cm
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- Ruedas de cortesía en la parte trasera y pies de PVC en la delantera;

PO410x (AGAVE Tejido LUX)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera;
- Tejido hidrófugo y antimancha;
- Relleno de poliuretano expandido indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 kg/m³, piecero 18 kg/m³, asiento 35 kg/m³, brazos 35 kg/m³);
- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Función de relajación total; Función TV; Función de bipedestación ;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;
- 2 pies delanteros;
- Sistema de rodillos 4 ruedas Ø 50 mm;



(sólo para los modelos
PO403x, PO425x y PO430x)

PO425x (MYRTHO CLASS Tejido LUX)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera
- Tejido hidrófugo y antimancha
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m³, reposapiés 18 Kg/m³, asiento 35 Kg/m³, reposabrazos 40 Kg/m³);
- Asiento de espuma de poliuretano con 2 cm de viscoelástica;

- Piecero regulable en varias posiciones;
- Respaldo regulable en varias posiciones;
- Brazos extraíbles con la posibilidad de insertar una tabla;
- Orejas extraíbles;
- 4 ruedas de Ø 50 mm, 2 con freno;
- Asidero de empuje;
- Funciones: Relajación total - TV; Bipedestación; Elevación vertical 10 cm; Cama 180°;
- 2 motores independientes;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;

PO430X (CLYZIA Tejido INCANTO)

- Bastidor de acero pintado con polvos y madera
- Tejido hidrófugo y antimancha
- Acolchado de espuma de poliuretano indeformable de densidad diferenciada (respaldo 18-22 Kg/m³, reposapiés 18 Kg/m³, asiento 35 Kg/m³, reposabrazos 40 Kg/m³);
- Doble estribo que permite una extensión de 11 cm;
- Doble Respaldo regulable en varias posiciones;
- Reposabrazos extraíbles con posibilidad de insertar una mesita;
- Orejas extraíbles;
- Roller system 4 ruedas de Ø 50;
- Asidero de empuje;
- Funciones: Relajación total; TV; Bipedestación; Elevación vertical 10cm; Cama unos 180°; Gravedad Cero
- 2 motores independientes con función Zero Gravity;
- Mando a distancia con 4 teclas con cable interno en el bolsillo;

17.3 Especificaciones técnicas generales

- 230V - 110W;
- Temperatura del ambiente operativo -20°C / + 60°C;
- Conservación recomendada: Conservar en un lugar fresco y seco y siempre lejos de fuentes directas de calor como la luz solar (temperatura recomendada entre -10°C y + 40°C);
- En caso de inactividad prolongada, desconectar la fuente de alimentación eléctrica y proteger las partes que podrían dañarse a causa del depósito de polvo.

17.4 Características de los tejidos

Todos los tejidos de los Sillónes son:



ANTIÁCARO



ANTIMANCHA



ANTIMICROBIANOS
Y ANTIBACTERIANOS



TRANSPIRABLE

18. ACCESORIOS

- Kit funda sillón (SÓLO PO403x, PO425x, PO430x)
- Mesita (SÓLO PO425x, PO430x)
- Kit batería portátil

Nota: La lista de accesorios está en continua actualización. Recomendamos contactar con los revendedores para enterarse de las novedades, conocer la disponibilidad y obtener más información.

18.1 Instrucciones para la instalación del Roller System



¡ATENCIÓN!

Las operaciones de instalación deben ser realizadas por personal autorizado.



¡ATENCIÓN!

El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de defectos de funcionamiento y daños derivados de una instalación incorrecta o una puesta en servicio efectuada por personal no habilitado.

Para instalar el accesorio Roller System (POA3xx) en el sillón es necesario seguir con atención los siguientes pasos:

- Poner el sillón en funcionamiento y llevarlo completamente a la posición lift;
- Desconectar la clavija eléctrica;
- Desmontar las dos ruedas delanteras utilizando una llave de 10 mm común;
- Volcar el sillón hacia delante;



Fig.2



Fig.3

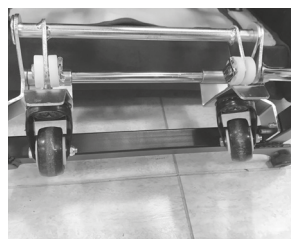


Fig.4

- Poner el Roller System (viene parcialmente ensamblado) dentro de la base de acero del sillón (fig. 2);
- Hacer coincidir los 4 orificios de la parte delantera de la base del bastidor del sillón con los orificios de los soportes del Roller System y bloquear todo con los 4 tornillos y tuercas a disposición (fig. 3.4);

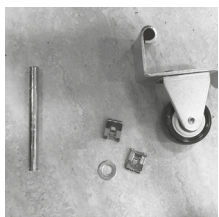


Fig.5

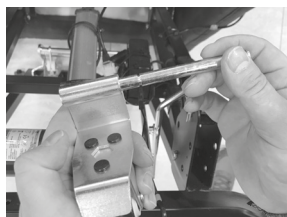


Fig.6

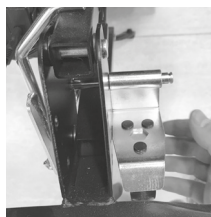


Fig.7



Fig.8

- Coger los componentes mostrados en la fig.5;
- Introducir el perno largo en el soporte de la rueda (fig. 6);
- Aplicar el perno y la rueda a la placa posterior derecha del bastidor (fig.7,8);
- Colocar el tope del perno del lado externo del bastidor;
- Colocar la arandela sobre el perno del lado interno del bastidor;



Fig.9



Fig.10



Fig.11

- Ensamblar sobre el perno la varilla del Roller System previamente instalado (fig. 9) y poner el tope también del lado interno;
- Coger los componentes mostrados en la fig.10;
- Introducir el perno corto en el soporte de la rueda;
- Aplicar el perno y la rueda a la placa posterior izquierda del bastidor (fig.11);
- Colocar la arandela sobre el perno del lado interno del bastidor;
- Colocar los topes en ambos extremos del perno;



Fig.12

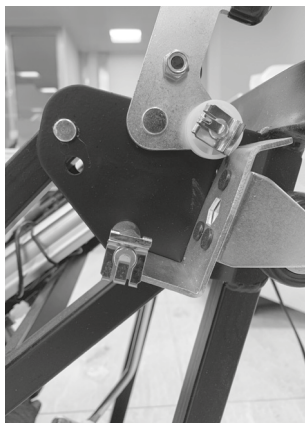


Fig.13

- Acercar la barra de acero con los 2 pernos restantes a las placas del bastidor girándola de manera que los puntales de goma negros queden orientados hacia abajo;
- Introducir la varilla curva derecha del Roller System en la ranura presente en la barra (fig.12);
- Introducir los pernos para bloquear la barra en las placas del bastidor del sillón;
- Colocar los topes sobre ambos pernos (fig.13);
- Volver a poner el sillón en posición normal;
- Conectar el sillón a la corriente y restablecer su posición natural.

19. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados por una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual de instalación, montaje y uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

Todo uso del sillón inadecuado y no previsto en el presente manual dejará la garantía y la responsabilidad del fabricante sin efecto en caso de accidentes o daños.

20. REPARACION

20.1 Reparación en garantía

Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor

Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

20.2 Reparación de un producto no cubierto por la garantía

Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

20.3 Productos no defectuosos

Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

21 REPUESTOS

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto. Para conseguir repuestos consultar exclusivamente el catálogo Moretti:

22. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____

Calle _____ Localidad _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FABRICADO EN ALBANIA

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com